

HYDRO med Blue

Augentropfen mit pharmazeutischem Hyaluron

Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder den Hersteller, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

BESCHREIBUNG

Dr. Theiss HYDRO med Blue Augentropfen mit pharmazeutischem Hyaluron pflegen, befeuchten die Augenoberfläche und lindern die Symptome des Trockenen Auges (Sicca Syndrom) wie z.B. gereizte, gerötete, juckende, tränende und/oder sehr empfindliche Augen durch die Bildung eines konservierungsmittelfreien, viskoelastischen, klaren Schutzfilms auf der Hornhaut ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen. Dies wird erreicht durch die hohe Wasserbindungsfähigkeit des enthaltenen Natriumhyaluronats, dem Natriumsalz der Hyaluronsäure, das auch von Natur aus u.a. im Glaskörper des Auges vorkommt. Dadurch bewirken **Dr. Theiss HYDRO med Blue Augentropfen mit pharmazeutischem Hyaluron** Linderung, Befeuchtung und Pflege bei Beschwerden in Zusammenhang mit:

- einer mechanischen Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung beispielsweise durch Zigarettenrauch,
- strapazierten Augen, z. B. durch Arbeit am Computer, mit Mikroskopen sowie bei/nach langen Autofahrten,
- einem Fremdkörpergefühl im Auge,
- der Einnahme bestimmter Arzneimittel,
- einer nachlassenden Tränenproduktion mit zunehmendem Alter,
- Allergene wie Pollen, Tierhaare, Staub etc..

Die Verbesserung der Befeuchtungssituation am Auge sorgt dafür, dass das Augenweiß wieder intensiver erscheint, da durch die Befeuchtung Reibungseffekte am Auge verringert werden und damit verbundene Rötungen gelindert werden.


Dr. Theiss HYDRO med Blue Augentropfen mit pharmazeutischem Hyaluron enthält außerdem den Farbstoff Patentblau V, der leichte Rötungen und gelbliche Verfärbungen im Auge vorübergehend mindert und sie heller erscheinen lässt.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind **Dr. Theiss HYDRO med Blue Augentropfen mit pharmazeutischem Hyaluron** gut verträglich.

ANWENDUNG

Zum Öffnen des Fläschchens entfernen Sie den Originalitätsverschluss durch Ziehen an der vorgefertigten Lasche, bis dieser komplett entfernt ist (1). Danach heben Sie die Kappe durch Ziehen nach oben ab (2). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab. Halten Sie das Fläschchen mit der Tropföffnung senkrecht nach unten und geben Sie durch gleichmäßig kräftigen, länger anhaltenden Druck 3 - 5mal täglich 1 - 2 Tropfen in den Bindehautsack des Auges (3 + 4). Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Das spezielle, sterile Luftfiltersystem des Fläschchens bedingt allerdings auch, dass nach jeder Entnahme einige Sekunden Wartezeit ohne Druck auf das Fläschchen verstreichen müssen, damit wieder genügend Luft einströmen kann. Ohne diese Wartezeit ist die weitere Entnahme nur erschwert möglich.

Vermeiden Sie jegliche Berührung der Tropföffnung mit dem Auge oder den Händen. Ein sich eventuell an der Tropföffnung noch befindlicher Tropfen sollte durch leichtes Klopfen auf den Fläschchenboden entfernt werden. Setzen Sie nun die Kappe durch leichten Druck wieder auf das Fläschchen (5).

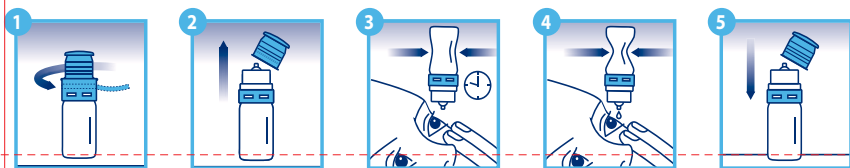

Mit zunehmender Entleerung des Fläschchens erfordert die Tropfentnahme, physikalisch bedingt, etwas mehr Druckaufwand.

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumhyaluronat, Natriumchlorid, Patentblau V, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: 1 x 10 ml

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE













- Nicht verwenden bei beschädigtem Fläschchen oder beschädigtem Originalverschluss.
- Das Auge mit der Tropföffnung des Fläschchens nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- In sehr seltenen Fällen kann die Anwendung der Augentropfen bei sehr empfindlichen Augen bzw. Augenlidern zu Reizungen führen. Folgende Befindlichkeitsstörungen am Auge können eventuell auftreten: Rötung, Schmerzen, Brennen, Stechen, Juckreiz, Schwellung, Fremdkörpergefühl.
- Falls Sie Kontaktlinsen tragen, so müssen Sie diese vor der Anwendung entfernen und dürfen diese frühestens 15 Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **Dr. Theiss HYDRO med Blue Augentropfen mit pharmazeutischem Hyaluron** sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett sowie der Faltschachtel eingeprägt.
- Nach dem ersten Öffnen des Fläschchens das Präparat nicht länger als 12 Monate anwenden.
- **Wichtige Information für Anwender mit schwerer Hornhautschädigung:** In sehr seltenen Fällen wurde über Ablagerungen von Calciumphosphat auf der Hornhaut während der Anwendung von phosphathaltigen Augentropfen berichtet.
- Aufgrund des speziellen, innovativen Sterilfilter-Systems des Tropfeinsatzes bleibt stets eine geringe Menge in der Flasche zurück. Zur Sicherstellung einer uneingeschränkten Tropffähigkeit wird eine regelmäßige Entnahme empfohlen.
- Bitte bewahren Sie das Produkt unzugänglich für Kinder auf.
- Schützen Sie Ihre Kleidung, bevor Sie die Augentropfen anwenden, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Sollte bei Ihnen eine schwerwiegende, unerwünschte Reaktion während der Anwendung oder in Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinproduktes auftreten, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

LAGERUNG

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Verschließen Sie das Fläschchen nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe. Das Fläschchen vor Licht geschützt in der Originalfaltschachtel aufbewahren.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturgrenzwerte und Lagerungstemperatur
	Vor Sonnenlicht schützen. Das Fläschchen vor Licht geschützt in der Originalfaltschachtel aufbewahren.
	Nach dem erstmaligen Öffnen die Augentropfen nicht länger als 12 Monate anwenden
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung (Fläschchen /Originalitätsverschluss) beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt
	Hersteller
	Vertriebspartner
	CE-Kennzeichnung = Symbol der Freiverkehrsfähigkeit in der EU mit Angabe der eingebundenen Benannten Stelle

 **Hersteller**
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Deutschland

 **Vertrieb in Deutschland**
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Deutschland