



## Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft



**MASSAGE- & GLEITÖL**  
Dermatologisch getestet\*

### **Ritex LONGTIME** **Massage- und Gleitöl in Premium Qualität**

- Extra lange gleitfähig
- Ohne Konservierungs- oder Zusatzstoffe
- Frei von Duftstoffen
- Für ein seidig-zartes Hautgefühl
- Mit allen Ritex Kondomen verwendbar

## Für lustvolle Zweisamkeit

---

**RITEX QUALITÄTSVERSPRECHEN**  
**Dermatologisch getestet · sehr gut hautverträglich**

---



## Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft

### Ritex LONGTIME – Massage- und Gleitöl

Ritex LONGTIME ist ein spezielles Silikonöl für lustvolle Massagen und zur Erhöhung der Gleitfähigkeit im Intimbereich.

### Erotik unbeschwert genießen

Ritex LONGTIME wurde speziell dafür entwickelt, das Liebesleben perfekt zu unterstützen: Sowohl für die intime Partnermassage als auch für das Extra an Gleitfähigkeit im Intimbereich. Wegen seiner hohen und langanhaltenden Gleiteigenschaften ist Ritex LONGTIME auch für die Anwendung im Analbereich sehr gut geeignet.

### Beste Qualität – Sehr gute Verträglichkeit

Ritex LONGTIME ist frei von Konservierungs-, Duft- und Zusatzstoffen. Es bildet auf der Haut einen intensiven und langanhaltenden Gleitfilm und hilft so, empfindliche Haut zu schützen. Dermatologische Tests\* bestätigen: Hautverträglichkeit „Sehr Gut“.

### Gleitmittel und Kondome

Ritex LONGTIME kann mit allen Ritex Kondomen verwendet werden. Einfach außen auf das bereits angelegte Kondom auftragen.

### Gleitmittel-Gebrauchshinweise

Ritex LONGTIME wird im Vaginal-, Anal- oder Penisbereich aufgetragen.

Bei Kondomverwendung das Gleitmittel auf die Außenseite des bereits über den Penis abgerollten Kondoms auftragen. Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom leichter abrutschen oder reißen kann.

Silikonöl kann Flecken auf Textilien verursachen, die teilweise nur schwer herauszuwaschen sind. Tube nach Gebrauch verschließen. Silikonöl soll nicht in die Augen gelangen, da der Gleitfilm die Sicht vorübergehend trüben kann. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gleitmittel können die Chance einer Befruchtung reduzieren. Wenn Sie schwanger werden wollen, empfehlen wir deshalb Ritex KINDERWUNSCH Gleitmittel.

Haltbarkeitsdatum und LOT Nr. siehe Boden der Faltschachtel und Tubenfalz.

### Ingredients (INCI):

Dimethicone

### Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:



Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.



Verfalldatum. Produkte nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.



Nummer der Produktcharge



Hersteller



Ritex GmbH  
Gustav-Winkler-Straße 50  
33699 Bielefeld · Germany

\*Mehr Infos unter: [www.ritex.de](http://www.ritex.de)

