

Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!




Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen


Anwendungsinformation

1.

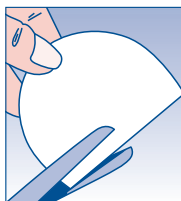


Oberkiefer-Prothese
Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung). Danach das Polster 10 Sek. in handwarmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.

1.

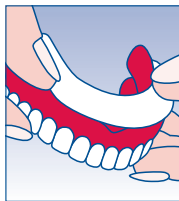


Unterkiefer-Prothese
Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.

2.

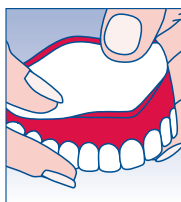

Polster auf die befeuchtete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben. Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt anliegt.

2.

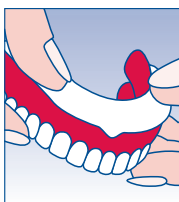

Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.

Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

Wichtige Hinweise

Nur auf der gesunden Schleimhaut anwenden. Aus hygienischen Gründen ist das **Protefix®** Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Die Anwendung von Haft-Polstern sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

Zusammensetzung

Vlies bestehend aus Natriumalginat, Viskose-Faser, Polypropylen-Faser.

Gegenanzeigen



Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Protefix® Haft-Polster möglichst trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.).

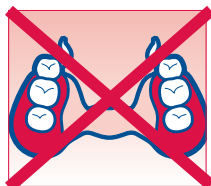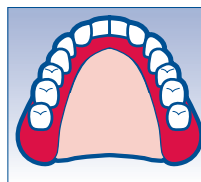

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 11/2011.

Queisser
PHARMA

D-24914 Flensburg
www.queisser.de

Vertrieb in der Schweiz:
Biomed AG
Überlandstr. 199
CH-8600 Dübendorf

