

### **D** Medizinprodukt **AUGENTROPFEN MIT HYALURON**

#### Zur verbesserten Befeuchtung, Linderung und Pflege trockener Augen

Die sterilen und konservierungsmittelfreien **Visiomax Augentropfen mit Hyaluron** befeuchten die trockene Augenoberfläche und machen sie gleitfähig. Das enthaltene Hyaluron, auch Natriumhyaluronat genannt, bildet einen stabilen Schutzfilm auf der Hornhaut, der für lang anhaltende Feuchtigkeit und Erleichterung bei brennenden Augen sorgt. Zudem lindert er Beschwerden wie mechanische Reizung durch Kontaktlinsen, äußere Umwelteinflüsse (Klimaanlage, Wind, Kälte, Staub oder Rauch) oder digitalen Sehsstress.


**Visiomax Augentropfen mit Hyaluron** im hygienischen Dosiersystem können über einen längeren Zeitraum verwendet werden und sind auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

#### **Zusammensetzung**

1 ml enthält: 0,15 % Natriumhyaluronsäure, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Citronensäure, Wasser für Injektionszwecke.

#### **Anwendung**

Zum Öffnen der Flasche entfernen Sie den Sicherheitsring durch Ziehen an der vorgefertigten Lasche, bis dieser komplett entfernt ist (1). Danach heben Sie die Kappe durch Ziehen nach oben ab (2). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab (3). Halten Sie die Flasche mit der Tropföffnung nach unten und geben Sie 3- bis 5-mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges (4). Die Kontaktlinsen müssen bei der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Tropföffnung mit dem Auge oder den Händen. Ein sich eventuell an der Tropföffnung noch befindlicher Tropfen sollte durch leichtes Klopfen auf den Flaschenboden entfernt werden. Setzen Sie nun die Kappe mit leichtem Druck wieder auf die Flasche auf (5). Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

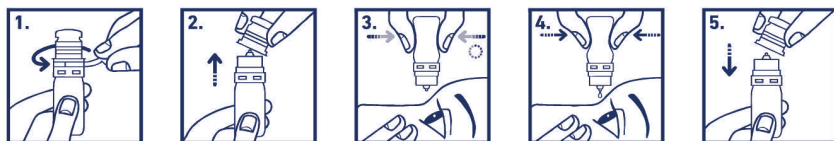

Das spezielle sterile Luftfiltersystem der Flasche bedingt allerdings auch, dass nach jeder Entnahme einige Sekunden Wartezeit ohne Druck auf die Flasche verstreichen müssen, damit wieder genügend Luft einströmen kann. Ohne diese Wartezeit ist die weitere Entnahme nur erschwert möglich. Zusätzlich erfordert dies physikalisch bedingt etwas mehr Druckaufwand mit zunehmender Entleerung der Flasche.

**Packungsgröße:** 10 ml = ca. 165 Anwendungen

#### **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise**

- Nicht verwenden bei Beschädigung an Flasche oder Siegelring.
- Mit der Tropföffnung der Flasche das Auge nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **Visiomax Augentropfen mit Hyaluron** sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett sowie der Faltschachtel eingeprägt.
- Nach dem ersten Öffnen des Fläschchens das Präparat nicht länger als 180 Tage anwenden.
- Aufgrund des speziellen innovativen Sterilfiltersystems des Tropfeinsatzes bleibt stets eine geringe Menge in der Flasche zurück.

#### **Lagerung**

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Verschließen Sie das Fläschchen nach Gebrauch wieder mit der Verschlusskappe. Flasche vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.

### **dm** Markenqualität



Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, D-92551 Stulln

**CE 0483**

Vertrieb durch:  
VITALIA Vertriebs GmbH  
Beethovenstraße 1a, D-97080 Würzburg

► Hergestellt in Deutschland

☎ 0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Carl-Metz-Straße 1  
DE-76185 Karlsruhe  
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:  
dm drogerie markt  
AT-5071 Wals  
www.dm-drogeriemarkt.at



Bitte beifügen Sie  
Gebrauchsinformation  
lesen.



Bitte bewahren Sie **Visiomax Augentropfen mit Hyaluron** zwischen 2 °C und 25 °C auf.



Chargennummer und  
Verfallsdatum sind auf dem  
Etikett und der Faltschachtel-  
Unterseite aufgeprägt.



Bei beschädigter Ver-  
packung nicht verwenden.

**STERILE A**

Steriles Produkt durch  
aseptische Filtration.

**(CZ) Zdravotnický prostředek**  
**OČNÍ KAPKY S HYALURONÁTEM SODNÝM**

**Pro zvlhčení, zmírnění suchých očí a následná péče**

**Visiomax oční kapky s hyaluronátem sodným** jsou sterilní a neobsahují konzervační látky, zvlhčují povrch suchých očí. Obsažený hyaluronát sodný vytváří na rohovce stabilní ochranný film, který zajišťuje dlouhotrvající vlhkost a úlevu od pálení očí. Současně zmírňuje potíže způsobené např. mechanickým podrážděním kontaktní čočkou, vnějšími okolními vlivy (klimatizace, vítr, chlad, prach nebo kouř) nebo digitálním očním stresem.




**Visiomax oční kapky s hyaluronátem sodným** mohou být používány delší dobu díky hygienickému systému dávkování a jsou vhodné i pro uživatele kontaktních čoček.

**Složení**

1 ml obsahuje 0,15 % hyaluronát sodný, chlorid sodný, citrát sodný, kyselina citronová, voda pro injekční účely.

**Použití**

1. Pro otevření lahvičky odstraňte nejdříve tahem celý bezpečnostní pečetní kroužek.
2. Sejměte víčko tahem směrem nahoru.
3. Zakloňte mírně hlavu, podívejte se směrem nahoru, dolní víčko stáhněte prstem lehe dolů.
4. Držte lahvičku dnem vzhůru a nakapejte 3-5 krát denně jednu kapku do spojivky.
5. Při používání očních kapek není nutné vyjmout kontaktních čoček. Zavřete pomalu oči, tím se tekutina rovnoměrně rozprostře po celé ploše oka. Zabraňte jakémukoli styku lahvičky nebo rukou s okem. Zbylou kapku v místě otvoru lahvičky odstraňte jemným poklepáním na dno lahvičky. Následně nasadte víčko zpět na lahvičku jemným zatlačením. Pokud se Vaše potíže zhorší nebo stav nezlepší, vyhledejte očního lékaře.

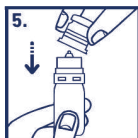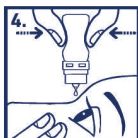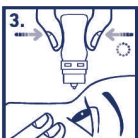

Speciální sterilní vzdušný filtrační systém lahvičky způsobuje, že po každé aplikaci je nutné počkat několik sekund, aby mohl proniknout další vzduch. Bez této čekací doby bude další aplikace ztížená. Čím prázdnější je lahvička, tím je z fyzikálního hlediska nutné vyvíjet více tlaku na lahvičku.

**Balení:** 10 ml = ca. 165 použití

**Bezpečnostní opatření a upozornění**

- Nepoužívejte v případě poškození lahvičky nebo pečetního kroužku.
- Zabraňte kontaktu otvoru lahvičky s okem.
- Nepoužívejte při precitlivlosti na nějakou složku obsaženou v očních kapkách.
- Pokud používáte ještě jiné další oční kapky/masty, měli byste dodržet časový odstup 15 minut od poslední aplikace.
- Visiomax oční kapky s hyaluronátem sodným** byste měli aplikovat vždy jako poslední.
- Nepoužívejte na infikované nebo poraněné oko.
- Po aplikaci může dojít přechodně ke snížení vidění; v takovém případě byste neměli řídit vůz nebo obsluhovat stroj – vyčkejte do doby, než se Vám obnoví zpět normální vidění.
- Nepoužívejte oční kapky po uplynutí doby použitelnosti. Datum použitelnosti najdete na etiketě stejně tak i na krabičce výrobku.
- Od prvního otevření lahvičky nepoužívejte preparát déle než 180 dní.
- Díky speciálnímu inovativnímu sterilnímu systému zůstane vždy určité nepatrné množství očních kapek v lahvičce.

**Skladování**

Skladujte při teplotě 2 °C–25 °C. Chraňte před mrazem. Po aplikaci lahvičku vždy uzavřete víčkem. Lahvičku chraňte před světlem tak, že ji uchovávejte v originální krabičce.

**dm Markenqualität**



Penta Arzneimittel GmbH, Werksstraße 3, D-92551 Stulln

**CE 0483**

Distributor pro D:  
VITALIA Vertriebs GmbH  
Beethovenstraße 1a, D-97080 Würzburg

► Vyrobeno v Německu.

☎ 0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Carl-Metz-Straße 1  
DE-76185 Karlsruhe  
www.dm.de/visiomax

Distributor pro AT:  
dm drogerie markt  
AT-5071 Wals  
www.dm-drogeriemarkt.at

Distributor pro ČR:  
dm drogerie markt s. r. o.  
Jeronýmova 1485/19  
37001 Č. Budějovice  
www.dm.cz



Přečtete si prosím  
příbalovou informaci.



Skladujte **Visiomax oční kapky  
s hyaluronátem sodným** při  
teplotě 2 °C–25 °C.



Číslo šarže/datum použitelnosti do:  
viz etiketa a dno krabičky výrobku.



Nepoužívejte prosím žádné  
poškozené ampule.



**STERILE A**

Sterilní produkt díky  
aseptické filtraci.



• Papier aus 100 %  
Recycling-Material  
• Papier recyclebar