

Medizinprodukt **AUGENTROPFEN MIT HYALURON**

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Visiomax Augentropfen sind ein steriles, konservierungsmittelfreies Produkt und bilden einen viskoelastischen, klaren Schutzfilm auf der Hornhaut. Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen.

Visiomax Augentropfen schützen und befeuchten die Augenoberfläche und machen sie gleitfähig. Dadurch bewirken sie lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch Klimaaanlagen, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch,
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

Anwendungsgebiet

Augentropfen zum Schutz, zur Befeuchtung und Gleitfähigkeit der Augenoberfläche.

Dosierungsanleitung und Anwendung

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge. Die Kontaktlinsen müssen während der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden. Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt.

Zusammensetzung

0,15 % Natriumhyaluronat, Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser. Frei von Konservierungsmitteln.

Packungsgröße: Ein-Dosis-Behältnisse, 15x 0,35 ml

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt. Da **Visiomax Augentropfen** keine Konservierungsmittel enthalten, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.
- Nicht an infizierten Augen verwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein, in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie **Visiomax Augentropfen** nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.
- **Visiomax Augentropfen** enthalten Phosphatpuffer. Bei längerfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von **Visiomax Augentropfen** zu Ausfällungen von Calciumsalzen in der Hornhaut führen.

Sonstige Hinweise

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Markenqualität

 Dr. Kleine Pharma GmbH,
Opalstraße 1, D-33739 Bielefeld

CE 0481

 **Hergestellt in Deutschland**

 **0800 3658633**

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Straße 1
DE-76185 Karlsruhe
www.dm.de/visiomax

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at



Gebrauchsanweisung
beachten.



Lagertemperatur

2 °C



Chargennummer und Verfallsdatum
sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis
und dem Faltschachtel-Deckel
aufgepreßt.



Bei beschädigter Packung
nicht verwenden.



Nicht zur Wiederverwendung

STERILE A

Aseptische Herstellung

Stand der Information: 2018.11

210041-02_29.04.77.02_047_REV04

Orvostechnikai eszköz SZEMCSEPP HIALURON

Kedves Páciens!

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő használati útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz a jelen orvostechnikai eszköz alkalmazását illetően. Felmerülő kérdés esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészehez.

A **VisiomaX szemcsepp** egy steril és tartósítószer-mentes termék, mely a szaruhártyán egy viszkoelasztikus, tiszta védőréteget képez. Kizárólag természetes, biológiai összetevőket tartalmaz. A **VisiomaX szemcsepp** védi, nedvesíti és síkosítja a szem felületét. Hosszantartó enyhülést ad a következő panaszok esetén:

- mechanikai igénybevétel, pl. kemény vagy lágy kontaktlencse hordásakor vagy a szemén végzett diagnosztikai beavatkozások esetén,
- környezeti stressz, pl. klímaberendezés, szél, hideg, száraz vagy szennyezett levegő, cigarettafüst esetén,
- a szem intenzív igénybevétele, pl. számítógép képernyője, mikroszkóp vagy hosszabb vezetés, esetén.

Felhasználási javaslat

Szemcsepp a szem felületének védelmére, nedvesítésére és síkosítására.

Adagolási és használati útmutató

Válasszon le egy egydagos tartályt. Ellenőrizze, hogy a tartály sértetlen. A tartály lapos végét csavarja le (ne húzza). Cseppentsen egy-két szemcseppet mindkét szembe. A kontaktlencsét nem kell kivenni a használat során. Tartós panasz esetén konzultáljon szemorvossal.

Összetétel

Nátrium-hilauronát (0,15 %), nátrium-klorid, nátrium-monohidrogén-foszfát, nátrium-dihidrogén-foszfát, tisztított víz. Nem tartalmaz tartósítószert.

Kiszerezési egység: egydagos tartályok, 15 x 0,35 ml

Általános óvintézkedések

- Ne használja, ha sérült az egydagos tartály.
- Az egydagos tartály ne érjen a szemhez.
- A fertőzésveszély elkerülése érdekében ne érjen az egydagos tartály nyílásához.
- Ne használja bármely összetevővel szemben fennálló túlérzékenység esetén.
- Csak egyszeri használatra alkalmas. Mivel a **VisiomaX szemcsepp** nem tartalmaz tartósítószert, ezért a megmaradt oldatot már ne használja fel.
- Ne használja más szemcseppekkel együtt.
- Ne használja fertőzött szemén.
- A használat után átmenetileg csökkenhet a látásélesség, ebben az esetben ne vezessen semmilyen járművet, ne kezeljen gépeket és várjon addig, míg a normál látásélesség visszatér.
- Ne használja a **VisiomaX szemcseppet** a felhasználhatósági idő lejárta után. Ez az egydagos tartályon látható.
- A **VisiomaX szemcsepp** nem tartalmaz foszfát puffert. Hosszabb használat, valamint a szaruhártya funkciók zavarai esetén a **VisiomaX szemcsepp** használata a szaruhártyán a káliumsók kicsapódását okozhatja.

Egyéb adatok

2 °C és 25 °C között, fagytól védett helyen, kisgyermekek elől elzárva tárolandó.

Markenqualität

 **Gyártó:** Dr. Kleine Pharma GmbH,
Opalstraße 1, D-33739 Bielefeld

CE 0481

 Gyártás helye: Németország

 0800 3658633

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Straße 1
DE-76185 Karlsruhe
www.dm.de/visiomaX

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

Forgalmazza: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4.



Tartsa be a használati útmutató előírásait



Tárolási hőmérséklet



Gyártási szám/ A lejárató idő az egydagos tartályon és a doboz alján látható.



Ha a csomagolás sérült, ne használja a szemcseppet.



Csak egyszeri használatra

STERILE A

Aszeptikus gyártás



• Papier aus 100 % Recycling-Material
• Papier recyclebar



Az információ dátuma: 2018 január