

### **Verwendungshinweise**

1. Prothese gründlich mit Gebissreinigertabletten reinigen und anschließend abtrocknen. 2. 3–4 dünne Haftcreme-Streifen auf die Prothese auftragen. 3. Prothese einsetzen und einige Sekunden von Hand andrücken. 4. 5 Minuten abwarten bis zur nächsten Einnahme von Speisen und Getränken. Sollten Rückstände der Haftcreme auch nach der normalen Reinigung auf der Prothese verbleiben, so lassen sich diese mit einer weichen Zahnbürste und warmem Wasser entfernen. Suchen Sie regelmäßig Ihren Zahnarzt auf, um den korrekten Sitz Ihrer Prothese kontrollieren zu lassen.