

1. Die Zahnsperre abspülen und zusammen mit einer Dentodont Zahnsperrenreinigungstablette in ein Glas geben. 2. Das Glas mit warmem Wasser füllen, bis die Zahnsperre vollständig bedeckt ist, und die Lösung 10 Minuten wirken lassen. Kein kochendes Wasser verwenden, da dieses die Zahnsperre beschädigen kann. 3. Die Zahnsperre vor dem Wiedereinsetzen unter klarem Wasser gründlich abspülen. Ein weiteres Abbürsten ist nicht erforderlich. 4. Die Reinigungslösung entsorgen und das Glas ausspülen.