



Medizinprodukt Nasenstrips

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollten.

Mivolis Nasenstrips erleichtern die Nasenatmung, indem sie durch leichten Zug auf die Nasenflügel die Nasenpassage sanft öffnen und somit die Luftzufuhr verbessern. Sie wirken daher ohne den Einsatz von Medikamenten rein mechanisch.

Mivolis Nasenstrips überzeugen durch ihren bequemen Tragekomfort, sind einfach zu entfernen und in Einheitsgröße.

Klebstoff: Acrylat-Basis, latexfrei.

Mivolis Nasenstrips helfen bei

- **der Linderung bei verstopfter Nase**

Öffnung der Nasenwege, sodass Sie wieder freier durch die Nase atmen können, auch bei verstopfter Nase, infolge einer Erkältung oder Allergie.

- **der Reduzierung von Schnarchen**

Kann durch Verstärkung bzw. Verbesserung der Atmung durch die Nase Schnarchen reduzieren und die Schlafqualität verbessern. Es kann 7–10 Tage dauern, bis eine Besserung eintritt. Wenn sich das Schnarchen nach 10 Tagen nicht verringert hat, liegt möglicherweise eine schwerwiegendere Problematik vor und Sie sollten mit Ihrem Arzt sprechen.

- **der Verbesserung der sportlichen Leistung**

Kann die Atmung verbessern, was physiologische Vorteile mit sich bringen kann, die zu einer besseren körperlichen Ausdauer führen. 30 Minuten vor dem Trainingsbeginn applizieren, damit der Nasenstrip beim Schwitzen besser haftet.

Anwendung:



1. Vor der Anwendung

Waschen Sie die Nase ab und trocknen Sie sie. Make-up und Feuchtigkeitscremes können die Haftungsfähigkeit verringern. Die Klebeflächen des Strips möglichst nicht berühren. Den Strip wie abgebildet an der Schutzfolie anfassen.



2. Die richtige Positionierung

Den Strip an der Schutzfolie anfassen und mittig auf dem Nasenrücken positionieren. Andrücken und einen Moment festhalten, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.



3. Die richtige Applikation

Auf beiden Seiten des Strips nach außen streichen, um eine komplette Haftung zu gewährleisten. 30 Sekunden andrücken.

Entfernen

Der Strip lässt sich besonders leicht entfernen, wenn die Nase vorher mit warmem Wasser befeuchtet wird (z. B. beim Gesichtwaschen oder unter der Dusche). Beide Enden vorsichtig anheben und langsam abziehen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Vorsicht:

Nur zur externen Anwendung an der Nase. Nicht auf gereizter, sonnengeschädigter Haut oder wunder Haut anwenden. Maximal 12 Stunden pro Tag auf der Haut lassen. Bei Auftreten eines Ausschlags oder einer Hautreizung die Anwendung sofort beenden. Nicht für die Anwendung bei Kindern unter 5 Jahren bestimmt. Schlafapnoe ist eine gravierende medizinische Problematik, die eine genaue Diagnose und die richtige Therapie erfordert. Wenn Sie vermuten, dass Sie an diesen Beschwerden leiden, sprechen Sie vor der Anwendung dieses Produktes mit Ihrem Arzt.

Jeder in Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfall ist an info@asoeurope.com sowie der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland: BfArM) zu melden.

 Aso LLC, 300
Sarasota Center Blvd.
34240 Sarasota FL
USA



Importeur

EC REP MIV-081021

Aso Europe BV,
Bijsterhuizen 1160e,
6546 AS Nijmegen,
The Netherlands

Distributor:
Dr. Kleine Pharma
GmbH
Heidsieker Heide 114
DE-33739 Bielefeld

Vertrieb durch:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:

dm drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at



Trocken
aufbewahren



Temperatur-
begrenzung



Bitte Packungs-
beilage beachten



Nicht wieder-
verwenden



Chargen-
bezeichnung



Verwendbar
bis