



## HÜHNERAUGEN PFLASTER

Bitte lesen Sie diesen Beipackzettel aufmerksam, bevor Sie mit der Verwendung des Produkts beginnen. Er enthält wichtige Informationen für Sie. Bewahren Sie diesen Beipackzettel auf. Möglicherweise müssen Sie ihn noch einmal lesen.

Informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde für Medizinprodukte, sollten schwerwiegende Nebenwirkungen mit dem Produkt auftreten.



### FÜR EINE GEZIELTE ENTFERNUNG VON HÜHNERAUGEN

Die Balea Hühneraugen-Pflaster mit integriertem Schaumstoffring sorgen für sofortige Druckentlastung im Bereich des Hühnerauges und lindern damit effektiv den Schmerz. Der Wirkstoffkern mit Salicylsäure hilft durch die erweichende Wirkung zudem dabei, das Hühnerauge gezielt zu entfernen. Die dermatologisch getesteten, hypoallergenen Pflaster schützen so die betroffenen Stellen vor Reibung und Druck und helfen gleichzeitig, die Hühneraugen sicher und schmerzfrei zu entfernen. Balea Hühneraugen-Pflaster können auch bei starker

Hornhaut zur gezielten Entfernung und Druckminderung eingesetzt werden.

### Anwendungsgebiet:

- Die Hühneraugen-Pflaster mit einem Schaumstoffring mit Wirkstoffkern wirken polsternd und schützend.
- Die Hühneraugen-Pflaster machen die Haut weicher, erleichtern die mechanische Entfernung und sorgen so für eine schnelle und schmerzfreie Hornhautentfernung.
- Darüber hinaus schützt die Dicke des Schaumstoffrings der Hühneraugen-Pflaster die betroffene Stelle vor Reibung und Druck.



### ANWENDUNG

Vor Aufkleben des Pflasters die zu schützende Hautstelle sorgfältig reinigen und trocknen, um eine perfekte Haftung und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Hühneraugen-Pflaster von der Schutzfolie abziehen und mittig auf das zu schützende Hautareal kleben. Täglich ein neues Pflaster verwenden.



### HAUTVERTRÄGLICHKEIT

- Dermatologisch bestätigt



### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAS- NAHMEN

- Nur zur äußerlichen Anwendung für die Behandlung von Hühneraugen.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden.
- Nicht auf geröteter, geschädigter oder rissiger Haut anwenden.

- Bei Sensibilisierung oder Reizung die Behandlung sofort abbrechen.
- Vor Anwendung des Produktes durch Diabetiker, Menschen mit Durchblutungsproblemen, Schwangere, stillende Frauen, Kinder unter 16 Jahren oder im Zweifelsfall einen Arzt fragen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Enthält 35-40% Salicylsäure.
- **Nicht länger als 2 Wochen anwenden**, außer nach Rücksprache mit dem Arzt.

### Lagerung:

Das Produkt in der Originalpackung an einem sauberen, trockenen und kühlen Platz aufbewahren.

### Hinweise:

Zur örtlichen Anwendung.  
Enthalten kein Latex oder PVC.

## Medizinprodukt

Vertrieb:

Dr. Kleine Pharma GmbH  
Heidsieker Heide 114  
33739 Bielefeld



EUROSIREL S.p.A  
Viale Europa 30  
20047 Cusago (MI)  
Italien

**REF** AS015379



**dm** Markenqualität  
► Hergestellt in Italien

Vertrieb durch:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Am dm-Platz 1  
DE-76227 Karlsruhe  
Tel. 0800 3658633  
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:

dm drogerie markt  
AT-5071 Wals  
Tel. 0800 3658633  
www.dm.at



Inhalt: **8 Stück**