



# Gebrauchsanweisung Traubenkernkissen



## Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Hier haben wir Ihnen wichtige Informationen zu diesem Produkt zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese – insbesondere die Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zur Anwendung und Pflege – genau durch.



Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!



**LOT** Siehe Verpackung!

## 1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgendes Produkt:  
Traubenkernkissen

## 2. Produktinhalt

Traubenkernkissen

### **3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das babylove Traubenkernkissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden.

Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.

### **4. Anwendungsgebiete**

Das Traubenkernkissen ist als Wärmeauflage ausschließlich bei folgenden Anwendungs- gebieten geeignet:

Bauchschmerzen/-krämpfen, Darmträgheit, Blähungen, Erkältung, allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen.

### **5. Anwendungs- und Erwärmungshinweise**

- Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen.
- In der Mikrowelle auf der kleinsten oder mittleren Auftaustufe (max. 180 Watt!) für max. 1 Minute (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) erwärmen.
- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110°C für max. 3 Minuten erwärmen.
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen. Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

## 6. ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!



Halte dich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energiestufen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).

Prüfe vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers der Mikrowelle erlaubt ist. Nach dem Erwärmen die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43°C) an deiner Armbeuge prüfen! Kissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen. Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen! Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.

Bitte suche bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf. Verwende das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden. Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen-, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.

Achte auf unversehrte Nähte! Bei losen Traubenkernen besteht Verschluckungs- und Erstickenungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne herausfallen, entsorge das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.

Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

## 7. Reinigung, Lagerung, Haltbarkeit und Entsorgung









Kissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern! Produkt trocken lagern! Vor Feuchtigkeit schützen! Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nach 4 Jahren ersetzt werden. Das Produkt kann im Restmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recyclingsystem zuführen. Bitte beachte die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

Bitte diese Gebrauchsanweisung aufbewahren.

## 8. Materialzusammensetzung

- Bezug und Inhalt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Traubenkerne kompostierbar
- Folie und Karton recyclebar
- Karton aus mindestens 90% Recycling-Material

## 9. Erläuterung der verwendeten Symbole

	Hersteller
	Achtung!
	Chargenbezeichnung
	Herstellungsdatum
	Gebrauchsanweisung beachten!
	Trocken aufbewahren
	Medizinprodukt
	Eindeutige Produktidentifizierung

Version: 2024-09-30 HA-008-015

Hersteller:

GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH

Münchener Str. 21

DE-85123 Karlskron

info@gruenspecht.de

www.gruenspecht.de

Vertrieb durch:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Am dm-Platz 1

DE-76227 Karlsruhe

www.dm.de

Vertrieb in Österreich:

dm drogerie markt

AT-5071 Wals • www.dm.at