

# FFP2 NR SCHUTZMASKE

## Faltbare Atemschutzmaske

Vor Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung lesen. Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009.



### Gebrauchsanleitung

1. Halten Sie die Maske mit dem Nasenbügel zwischen den Fingerspitzen und falten Sie die Maske vorsichtig auf, ohne sie an der Innenseite mit den Fingern zu berühren. 2. Legen Sie die einstellbaren Bänder hinter die Ohren und passen Sie die Länge für ein angenehmes Tragen an. 3. Der Nasenbügel wird auf die Nase gelegt und durch vorsichtiges Drücken der Nasenform angepasst. Stellen Sie sicher, dass die Maske gut abschließt. 4. Überprüfen Sie den richtigen Sitz: Decken Sie die Maske mit Ihren Händen ab und atmen Sie schnell ein und aus. Sollte Luft am Nasenrand entweichen, passen Sie den Nasenbügel an. Sollte Luft an den Seiten entweichen, passen Sie die Länge der Bänder so an, dass die Maske am Gesicht abschließt.

### Maskentyp und Eigenschaften

FFP (Filtering Face Piece) bezeichnet partikelfiltrierende Halbmasken zum Arbeitsschutz und Eigenschutz. / Diese dienen dem Zweck, den Träger der Maske vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen. / Diese Maske erfüllt die Anforderungen nach Kategorie FFP2 der EN 149:2001+A1:2009. / Sobald Sie die Maske entfalten, entsteht ein dreidimensionaler Atemraum. Mit Hilfe des Nasenbügels und der beiliegenden Klammern können Sie die Maske für optimalen Sitz justieren. / Es wird empfohlen, die Maske nach 4 Stunden auszutauschen. / Bitte entsorgen Sie die Maske nach Gebrauch ordnungsgemäß.