

Gebrauchsanweisung ELANEE Brust-Ringe



Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere ELANEE Brust-Ringe entschieden haben! Die Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, das Produkt möglichst optimal einzusetzen. Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung – insbesondere die Anwendung und Sicherheitshinweise – vor der ersten Anwendung genau durch. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung!
Ihr ELANEE-Team



Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!



LOT

Siehe Verpackung!

Hergestellt in Deutschland

1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die folgenden Produkte:

REF

222-00 ELANEE Brust-Ringe

222-V1 ELANEE Brust-Ringe, Klinikpackung

2. Produktinhalt

ELANEE Brust-Ringe:

5 Paar Brust-Ringe im Polybeutel (5 Stück mit und 5 Stück ohne Kerbe), 1 Gebrauchsanweisung

ELANEE Brust-Ringe, Klinikpack:

50 Paar Brust-Ringe jeweils im Polybeutel (50 Stück mit und 50 Stück ohne Kerbe), 1 Gebrauchsanweisung

3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die ELANEE Brust-Ringe können zur kurzzeitigen Anwendung an der weiblichen, laktierenden Brust eingesetzt werden. Sie schützen empfindliche, schmerzende, wund und entzündete Brustwarzen durch Hohllagerung vor Außenberührung, wodurch Schmerzen gelindert werden können. Das Produkt ist für den privaten und professionellen Gebrauch bestimmt. Für andere als die genannten Anwendungszwecke sind die Brust-Ringe nicht geeignet.

4. Anwendungsgebiete

Die ELANEE Brust-Ringe sind für stillende Frauen mit empfindlichen, schmerzenden, wunden oder entzündeten Brustwarzen vorgesehen.

5. Funktionsweise

Die Brust-Ringe besitzen in der Mitte eine Aussparung für die Brustwarzen. Werden die Ringe in den lockeren BH mittig auf die Brust gelegt, stellen sie aufgrund der entstandenen Hohllagerung eine Barriere zwischen Brust und Textil dar, wodurch die beanspruchten Brustwarzen sehr gut abheilen können. Das Material besitzt eine hohe Elastizität bei ausgeprägter Stauchhärte und gewährleistet somit auch bei Druck den Abstand zum Textil. Die besondere Birnenform der Brust-Ringe polstert zusätzlich die Brust ergonomisch optimiert ab. Die Brust-Ringe sind mit oder ohne einer Kerbe versehen, um das Anlegen an die linke und rechte Brust zu unterscheiden. Somit wird einer Kreuzkontamination bei erneutem Anlegen nach dem Stillen vorgebeugt.

6. Anwendung

1.

Achten Sie auf saubere Bedingungen vor der Anwendung der Brust-Ringe (z.B. Hände waschen).

2.

Lockern Sie Ihren BH (Träger und Umfang großzügig einstellen).

3.

Nehmen Sie bitte einen Brust-Ring mit Kerbe aus der Verpackung und legen Sie diesen mit der Kerbe nach unten direkt mittig auf die linke Brustseite in den BH ein.

Bitte nehmen Sie einen Brust-Ring ohne Kerbe und legen Sie diesen auf die rechte Brust mit der breiteren Seite nach unten (in Form einer „Birne“).

4.

Entfernen Sie die Brust-Ringe vor dem Stillen.

5.

Verwenden Sie nach dem Stillen wieder den Brust-Ring mit Kerbe für die linke Brustseite und den Ring ohne Kerbe für die rechte Brustseite.

6.

Entsorgen Sie verschmutzte oder feuchte Ringe sofort - spätestens jedoch nach 24 Stunden - im Hausmüll und verwenden Sie einen neuen Brust-Ring gemäß der beschriebenen Anwendung unter Punkt 2 und 3.

Tipp: Falls ein Ring nicht ausreichen sollte, um die Brustwarze hohl zu lagern, nehmen Sie bitte einen zweiten Ring und legen diesen auf den ersten Ring. Um die beanspruchten Brustwarzen zu pflegen, empfiehlt sich die Verwendung einer Brustwarzen-Salbe. Zum Feuchtigkeitsschutz kann zwischen dem Brust-Ring und der Kleidung eine saugfähige Stilleinlage eingelegt werden.

7. Pflegehinweise und Lagerung



Achten Sie auf saubere Bedingungen bei der Verwendung der Brust-Ringe (z.B. Hände waschen).



Bitte prüfen Sie Ihre Brust-Ringe vor der Erstanwendung. Verwenden Sie nur verpackte und einwandfreie Brust-Ringe. Verwenden Sie keine Brust-Ringe, deren Verpackung beschädigt ist.



Die Brust-Ringe dürfen nicht zu fest an die Brust gedrückt werden (BH nicht zu eng), da dadurch die Milchgänge abgedrückt werden können und ein Milchstau entstehen kann.



Als Nebenwirkungen können Hautreizungen wie Rötung, Schwellung, Brennen oder Jucken an der Brust auftreten.



Bei bekannter Überempfindlichkeit und Allergie gegen das Material sollte von der Anwendung abgesehen werden bzw. diese nur in Absprache mit einem Arzt erfolgen.



Die Brust-Ringe sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen maximal 24 Stunden verwendet werden. Verschmutzte oder feuchte Ringe müssen sofort entsorgt und durch einen neuen Ring ersetzt werden, um ein Infektionsrisiko zu vermeiden.



Die Ursachen für schmerzende Brustwarzen können auch Anzeichen von bösartigen Erkrankungen sein. Deshalb sollten die Brust-Ringe bei Wunden, schmerzenden oder entzündeten Brustwarzen nur als Ergänzung zu therapeutisch-ärztlichen Maßnahmen angewendet werden.

Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Symptomen einen Arzt auf.



Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

8. Aufbewahrung, Haltbarkeit, Lagerung und Transport

Das Produkt muss trocken und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden.

9. Reinigungs- und Entsorgungshinweise

Die Brust-Ringe sind ein Einmalprodukt und dürfen maximal 24 Stunden verwendet werden. Sie können im Hausmüll entsorgt werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung müssen sortenrein getrennt und dem entsprechenden Recycling-System zugeführt werden. Bitte beachten Sie dabei die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

10. Materialzusammensetzung

Die ELANEE Brust-Ringe bestehen aus 100 % Polyurethan-Schaumstoff.

11. Erläuterung der verwendeten Symbole



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten!



Chargennummer



Nicht zur Wiederverwendung



Artikelnummer



Achtung!



Trocken lagern



Vor Sonnenlicht schützen!



Herstellungsdatum (TT.MM.JJ.)



Medizinprodukt

GA-042-02 Version: 2021-01-31

Hersteller:
GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21
DE-85123 Karlskron
www.elanee.de