

# Gebrauchsanweisung Rapssamen-Kissen mit Bezug



## Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Hier haben wir Ihnen wichtige Informationen zu diesem Produkt zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese – insbesondere die Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zur Anwendung und Pflege – genau durch.



Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!



**LOT** Siehe Verpackung!

## 1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Produkte:



106-00 Wärmekissen „Grünspecht“  
376-00 Rapssamen-Kissen mit Bezug „Waffelpiqué“  
322-00/324-00/325-00/327-00/328-00/330-00/  
335-00/336-00/337-00 Wärme-Kuscheltier mit  
Rapssamen-Kissen (verschiedene Designs)

## 2. Produktinhalt

Rapssamen-Kissen mit Bezug, Gebrauchsanweisung

### 3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Rapssamen-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.

### 4. Anwendungsgebiete

Das Rapssamen-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet:

- Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen

### 5. Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen!

Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten:

**REF** 106-00/335-00/336-00/337-00 Ø12 cm rund

- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 4 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) bei max. 180 Watt für max. 1,5 Minuten erwärmen.
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen.

**REF** 376-00 12x12 cm quadratisch

- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 4 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) bei max. 300 Watt für max. 1 Minute erwärmen.
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen.

**REF** 322-00/325-00/328-00 15x17 cm


- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 6 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) bei max. 300 Watt für max. 2 Minuten erwärmen.
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen.

**REF** 324-00/327-00/330-00 19x23 cm

- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 6 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) bei max. 400 Watt für max. 2 Minuten erwärmen.
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen.

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen.

Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

**6. ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!**   
Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!). Bezug nicht mit erhitzen! Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist. Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen! Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Bezug gelegt wurde, bitte die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen! Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!

Das Produkt sollte ohne direkten Hautkontakt z. B. auf einem dünnen körpernahen Textil angewandt werden und sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden. Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf. Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit vermindertem Schmerzempfinden.

Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden. Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Rapssamen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Rapssamen austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Samen sofort und unzugänglich für Kinder.

Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

## **7. Pflegehinweise und Lagerung**

Der Bezug ist abnehmbar und bei 30 °C in der Maschine waschbar. Bitte Bezug vor dem ersten Verwenden waschen. Empfehlung: Bezug auf niedriger Schleudergeschwindigkeit und für eine besonders schonende Reinigung in einem Wäschenetz waschen.

Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt! Das mit Rapssamen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/ Schimmelbildung zu verhindern! Produkt trocken lagern! Vor Feuchtigkeit schützen!

## 8. Hinweise zur Haltbarkeit und Entsorgung

Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nach 4 Jahren ersetzt werden. Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

## 9. Materialzusammensetzung

Innenkissen:

Stoff: 100% Baumwolle

Füllung: Rapssamen

Bezug:

**REF**

322-00/324-00/325-00/327-00/328-00/330-00/  
335-00/336-00/337-00

Stoff: 100% Polyester

Füllung: 100% Polyester

**REF**

106-00

Stoff: 100% Polyester

**REF**

376-00

Stoff: 100% Baumwolle

## 10. Erläuterung der verwendeten Symbole



Hersteller



Achtung!



Katalognummer



Chargenbezeichnung



Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten!



Trocken aufbewahren



Medizinprodukt



Eindeutige Produktidentifizierung



Mikrowelle



Backofen

Version: 2025-06-01 GA-032-08

Hersteller:

GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH

Münchener Str. 21

DE-85123 Karlskron

[info@gruenspecht.de](mailto:info@gruenspecht.de)

[www.gruenspecht.de](http://www.gruenspecht.de)