



FFP2

Diese partikelfiltrierende Halbmaske schützt auch vor wässrigen und öligen Aerosolen.

Gebrauchsanweisung

1. Nehmen Sie die Maske so in Ihre Handfläche, dass der Nasenclip auf Ihren Fingerspitzen liegt und die Ohrschlaufen unter der Hand hängen.
2. Legen Sie die Maske über Mund und Nase, und zwar so, dass der Nasenclip aus Metall quer auf dem Nasenrücken liegt. Der untere Maskenrand wird unters Kinn geschoben.
3. Ziehen Sie die Ohrschlaufen mit der anderen Hand über beide Ohren.
4. Alternativ können Sie für einen stärkeren Halt die Ohrschlaufen mit dem beiliegenden Haken verbinden und hinter dem Kopf tragen.
5. Legen Sie Ihre Fingerspitzen auf den Nasenclip der Maske. Passen Sie diesen Ihrer Nasenform an, indem Sie den Nasenclip an beiden Seiten leicht herunterdrücken.
6. Prüfen Sie den Dichtsitz der Maske wie folgt: Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab und atmen Sie kräftig aus. Sollte dabei in Höhe des Nasenclips Luft entweichen, korrigieren Sie den Sitz des Nasenclips entsprechend. Entweicht Luft am Maskenrand, justieren Sie die Ohrschlaufen nach. Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis die Atemschutzmaske gut abschließt.

Herstellerinformationen

Modell: RB-008/101885
 Herstellungsdatum: Siehe beiliegendes Qualitätszertifikat
 Haltbarkeitsdauer: 3 Jahre
 Konformitätsstandard: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR
 Einschlägige Verordnung: VO (EU) 2016/425

Hersteller: Zhejiang Quzhou Rongbo Medical Instrument Co., Ltd.
 Adresse: Nr. 680 Century Road, Quzhou City, Zhejiang, 324000 China
Notifizierte Stelle: CCQS Certification Services Limited (2834)
 Adresse: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Rd., Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irland

Farbe: Schwarz

Link zur EU-Konformitätserklärung:
www.promotion-pets.com/docs/101885_doc.pdf

Warnhinweise

1. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieser Atemschutzmaske und/oder das Nichttragen zu allen Zeiten der Exposition kann die Wirksamkeit des Atemschutzes verringern und zu Krankheit oder Tod führen.
2. Gesundheitsgefährdende Partikel können so klein sein, dass man sie nicht mit bloßem Auge erkennen kann.
3. Verlassen Sie den kontaminierten Bereich sofort und wenden Sie sich an eine Aufsichtsperson, wenn Schwindel, Reizung oder andere Beschwerden auftreten.
4. Lagern Sie die Atemschutzmaske, wenn sie nicht benutzt wird, fern von kontaminierten Bereichen.
5. Ersetzen Sie die Atemschutzmaske, wenn Sie durch die Maske nur noch schlecht Luft bekommen, die Maske beschädigt und/oder verschmutzt ist.
6. Testen Sie den Sitz der Atemschutzmaske vor jedem Gebrauch wie im Abschnitt „Gebrauchsanweisung“ beschrieben.

Aufbewahrung

Lagern Sie die Atemschutzmaske vor dem Gebrauch in der Originalverpackung. Halten Sie die Maske fern von kontaminierten Bereichen, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und schädlichen Chemikalien. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt -20° C bis 40° C, die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 80 % liegen. Für den Transport des Produkts verwenden Sie die Originalverpackung.

Import & Vertrieb

Promotion Pets GmbH
 Winterhuder Weg 80, 22085 Hamburg, Deutschland
 Tel: (+49) 40- 429 49 67-0, www.promotion-pets.com
shop@promotion-pets.com

Non-medical

