



Gebrauchsanweisung Kirschkern-Kissen



Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Das Mivolis Kirschkern-Kissen wird mit größter Sorgfalt in Deutschland hergestellt. Das Produkt wurde auf Schadstoffgeprüft und entspricht dem Standard 100 by OEKO-TEX®, Produktklasse I.

Hier haben wir Ihnen wichtige Informationen zu diesem Produkt zusammengestellt.

Bitte lesen Sie diese – insbesondere die Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zur Anwendung und Pflege – genau durch.



Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!



LOT Siehe Verpackung!

1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgendes Produkt:



REF DM 110-V4 Kirschkern-Kissen

2. Produktinhalt

Kirschkern-Kissen

3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kirschkerne-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendungen zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.

4. Anwendungsgebiete als Wärmeauflage

Das Kirschkerne-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für folgenden Gebrauch bestimmt:

- Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Muskelschmerzen/-verhärtungen
- Muskel-/Nackenverspannungen
- Menstruationsbeschwerden
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen

5. Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Kirschkerne-Kissen sind ein traditionelles Hausmittel für wohltuende Wärmeanwendungen, da Kirschkerne Wärme sehr gut aufnehmen und dosiert wieder abgeben können. Das Kissen lässt sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen.

Zum Erwärmen des Kirschkerne-Kissens gibt es folgende Möglichkeiten:

- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110°C für max. 5 Minuten erwärmen.
- In der Mikrowelle bei max. 300 Watt für max. 2 Minuten erwärmen. (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!)
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen.

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

6. ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!

Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr)! Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist. Kissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen. Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen! Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Wird das Kirschkern-Kissen bei Babys oder Kindern angewendet, bitte zusätzlich folgende Hinweise beachten: Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Kirschkernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder. Nach dem Erwärmen die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43°C) an Ihrer Armbeuge prüfen! Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!

7. Pflegehinweise

Kirschkern-Kissen sollten nicht gewaschen werden, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern. Produkt trocken lagern! Vor Feuchtigkeit schützen!

8. Haltbarkeit und Entsorgung

Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nach 4 Jahren ersetzt werden. Das Kissen kann im Hausmüll entsorgt werden.

9. Materialzusammensetzung

Stoff: 100% Baumwolle

Füllung: Kirschkerne

10. Erläuterung der verwendeten Symbole



Hersteller



Achtung!



Chargenbezeichnung



Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten!



Trocken aufbewahren



Medizinprodukt

Version: 2021-09-30 DM 110-V4

Hersteller:
GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21
DE-85123 Karlskron
info@gruenspecht.de
www.gruenspecht.de

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals • www.dm.at