


- Wenn Sie am Fälligkeitstag Ihrer Periode oder danach testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen.
- Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen, müssen Sie für den Test Ihren Morgenurin verwenden. Vermeiden Sie vor dem Test übermäßiges Trinken.

TESTA^{med} Schwangerschaftsfrühtest ist für den qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin zum Nachweis einer Schwangerschaft mit einer Genauigkeit von über 99% ab dem Fälligkeitstag der Periode. Der Test verwendet eine Kombination aus Antikörpern, die einen monoklonalen hCG Antikörper enthalten, um selektiv erhöhte hCG-Spiegel nachzuweisen. TESTA^{med} Diagnostics Schwangerschaftsfrühtest kann bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode verwendet werden. **Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.**

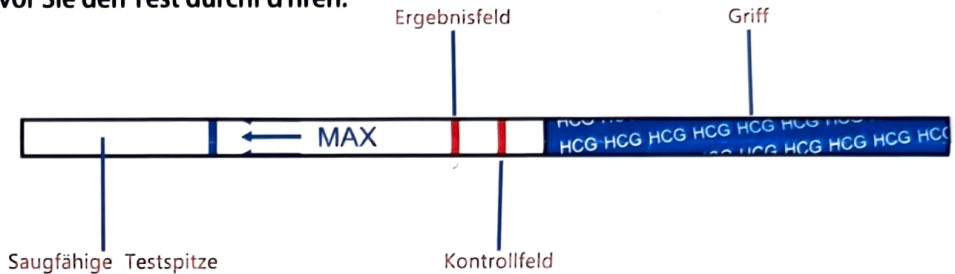

BEVOR SIE BEGINNEN:


- Lesen Sie das Merkblatt VOLLSTÄNDIG durch und halten Sie eine Uhr mit Sekundenzeiger bereit.
- Prüfen Sie das Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des Verfallsdatums darf der Test nicht mehr verwendet werden.



Bei Raumtemperatur verwenden.

DURCHFÜHRUNG DES TESTS:


1. Öffnen Sie die Folienverpackung erst UNMITTELBAR vor der Verwendung.
2. Nehmen Sie den Teststreifen aus der Folienverpackung.

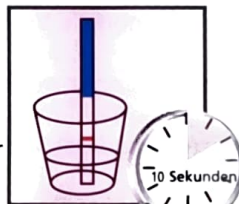

Mit der Testspitze nach unten in die Urinprobe halten.

3. Sie fangen eine Urinprobe in einem sauberen und trockenen Behälter auf. Tauchen Sie die saugfähige Testspitze für 10 Sekunden in die Urinprobe ein.

4. Legen Sie den Test flach auf eine trockene, nicht saugende und saubere Fläche, so dass die Reaktionsfläche nach oben zeigt.

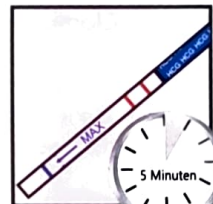

ABLESEN IHRES ERGEBNISSES:

Positive Ergebnisse sind oft schon 1 Minute nach der Benetzung der Testspitze mit Urin (10 Sekunden) ablesbar. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen, bitte die komplette Reaktionszeit von 5 Minuten abwarten. Ihr

Ergebnis lesen Sie wie folgt ab: Im Kontrollfenster erscheint eine pinke Linie, die anzeigt, dass der Test funktioniert hat. Eine pinke Linie im Kontrollfeld UND eine pinke Linie im Ergebnisfeld zeigen ein positives Ergebnis an („schwanger“).

Eine pinke Linie im Kontrollfeld UND KEINE pinke Linie im Ergebnisfeld zeigen ein negatives Ergebnis an („nicht schwanger“).

Lesen Sie Ihr Ergebnis **SPÄTESTENS** 10 Minuten nach Durchführung des Tests ab.

Wenn im Kontrollfeld innerhalb von 10 Minuten **KEINE** pinke Linie erscheint, hat der Test nicht funktioniert (siehe Frage 8).

ERGEBNIS „SCHWANGER“

Eine pinke Linie im Kontrollfeld UND eine pinke Linie im Ergebnisfeld. Die Linie kann schwächer sein als die andere, sie müssen nicht übereinstimmen.




ERGEBNIS „NICHT SCHWANGER“

Eine pinke Linie im Kontrollfeld UND KEINE pinke Linie im Ergebnisfeld.



TEST HAT NICHT FUNKTIONIERT

Im Kontrollfeld erscheint keine Linie (siehe Frage 8).

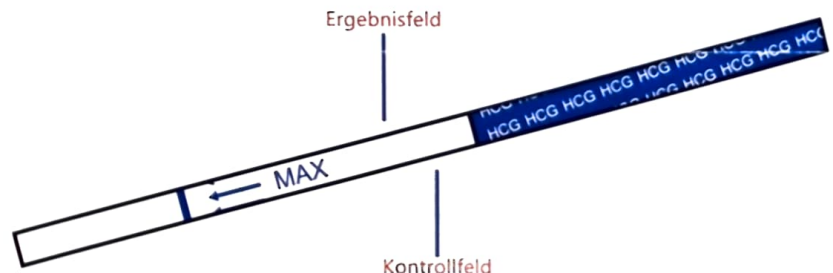

FRAGEN UND ANTWORTEN

1. WIE FUNKTIONIERT DER TEST :

Der Test stellt im Urin das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin) fest, das Ihr Körper produziert, wenn Sie schwanger sind. Das Ergebnis „schwanger“ zeigt an, dass hCG in Ihrem Urin festgestellt wurde.

2. WIE GENAU IST DER TEST ?

Der Test hat in klinischen Tests bei Anwendung ab dem Fälligkeitstag der Periode eine Genauigkeit von über 99% gezeigt.

3. WIE EMPFINDLICH IST DER TEST ?

Der Schwangerschaftsfrühtest weist hCG im Urin ab einer Konzentration von 20 mIU/ml oder mehr nach. Der Test wurde nach dem 4. Internationalen Standard der WHO standardisiert.

4. WANN KANN ICH DEN TEST DURCHFÜHREN?

Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre normale Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag einer Periode bis zum Tag vor Beginn der nächsten Periode zählen.

- Wenn Ihr Zyklus unregelmäßig ist, sollten Sie vor dem Testen von der Anzahl der Tage des längsten Zyklus der letzten Monate ausgehen.
- Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre Periode fällig ist, empfehlen wir, frühestens 19 Tage nach dem letzten Zeitpunkt zu testen, an dem Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten.
- Wenn Sie am Fälligkeitstag Ihrer Periode oder danach testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Wenn Sie vor Fälligkeit Ihrer Periode testen, müssen Sie für den Test Ihren Morgenurin verwenden. Vermeiden Sie vor dem Test übermäßiges Trinken.

5. WANN KANN ICH DAS ERGEBNIS FRÜHESTENS ABLESEN?

Das Ergebnis „schwanger“ kann spätestens nach 1 Minute nach Benetzung des Teststreifens mit Urin (10 Sekunden) angezeigt werden. Lesen Sie Ihr Ergebnis spätestens 10 Minuten nach Durchführung des Tests ab. Änderungen, die nach diesem Zeitpunkt auftreten, haben keinerlei Bedeutung. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen, bitte die komplette Reaktionszeit von 5 Minuten abwarten.

6. WAS KANN ICH MACHEN, WENN ICH MIR ÜBER DAS ERGEBNIS NICHT IM KLAREN BIN?

Das Ergebnis lautet „schwanger“, wenn innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests im Kontrollfeld eine pinke Linie UND im Ergebnisfeld eine pinke Linie erscheint. Das Ergebnis lautet „nicht schwanger“, wenn innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests im Kontrollfeld eine pinke Linie UND im Ergebnisfeld KEINE Pinke Linie erscheint. Wenn das Ergebnis „nicht schwanger“ lautet und Sie trotzdem glauben, dass Sie schwanger sind, lesen Sie Frage 10.

7. KANN DAS TESTERGEBNIS DURCH EINNAHME VON MEDIKAMENTEN ODER KRANKHEITEN BEEINFLUSST WERDEN?

- Lesen Sie immer die Herstelleranweisungen der von Ihnen eingenommenen Medikamente, bevor Sie den Test durchführen.
- Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können zu irreführenden Ergebnissen führen. (Diese Arzneimittel werden üblicherweise injiziert. Wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind.)
- Andere Fruchtbarkeitstherapien (wie etwa Clomiphencitrat), Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z.B. „die Pille“) sollten das Ergebnis nicht beeinflussen.
- Wenn Sie erst kürzlich aufgehört haben, hormonelle Verhütungsmittel einzunehmen, oder wenn Sie Fruchtbarkeitsbehandlungen mit z.B. Clomiphencitrat durchführen, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein, so dass Sie den Test möglicherweise zu früh durchführen.
- Wenn Sie vor kurzem schwanger waren (selbst wenn die Schwangerschaft vorzeitig endete), können Sie ein falsches „schwanger“-Ergebnis erhalten.
- Eine Extrauterinschwangerschaft (Bauchhöhlenschwangerschaft), Eierstockzysten, die Menopause (Wechseljahre) und bestimmte seltene Krankheiten können das Testergebnis verfälschen.
- Wenn Sie das Ergebnis „schwanger“ erhalten haben, können Sie eventuell später herausfinden, dass Sie nicht schwanger sind, weil die Schwangerschaft auf natürliche Weise im Frühstadium beendet wurde.

Wenn Sie ein unerwartetes Ergebnis erhalten, sollten Sie dies mit Ihrem Arzt besprechen.

8. ICH HABE DEN TEST DURCHGEFÜHRT, IM KONTROLLFELD IST JEDOCH KEINE PINKE LINIE ERSCHIENEN. WAS BEDEUTET DAS?

Wenn im Kontrollfeld innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests keine pinke Linie erscheint, hat der Test nicht funktioniert. Mögliche Ursachen:

- Sie haben zu viel oder zu wenig Urin verwendet
- Sie haben den Test nicht korrekt durchgeführt
- Sie haben einen Teststreifen verwendet, dessen Verfallsdatum bereits überschritten war

9. DER TEST HAT ERGEBEN, DASS ICH SCHWANGER BIN. WAS SOLLTE ICH TUN?

Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, der Sie über die nächsten Schritte beraten kann.

10. DER TEST HAT ERGEBEN, DASS ICH NICHT SCHWANGER BIN, OBWOHL ICH GLAUBE, DASS ICH SCHWANGER BIN. WAS SOLLTE ICH TUN?

Wahrscheinlich sind Sie nicht schwanger oder der Schwangerschaftshormonspiegel ist noch nicht hoch genug, um nachgewiesen zu werden. Oder Sie haben den Fälligkeitstag Ihrer Periode falsch berechnet.

- Wenn Sie früh getestet haben, testen Sie nochmals, wenn Ihre Periode fällig ist.
- Wenn Ihre Periode überfällig ist, testen Sie in 3 Tagen erneut mit einem neuen Test. Wenn auch dieser Test das Ergebnis „nicht schwanger“ anzeigt und Ihre Periode noch immer nicht eingetreten ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Kinderwunsch?

Wir empfehlen Ihnen zur Bestimmung Ihrer fruchtbaren Tage den TESTamed Ovulationstest.

Beratungsservice


Tel. 06742/ 900 291 oder unter www.testamed.de. Bitte halten Sie die Chargennummer **LOT** bereit (auf der Packung zu finden).

Aus der Reichweite von Kindern fernhalten. Bei 2-30°C aufbewahren. Nur zum einmaligen Gebrauch. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Teststäbchen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Symbole

	Gebrauchsanweisung beachten		Für <x> Anwendungen		Hersteller		Bei 2 - 30°C lagern		Bestellnummer
	Nur für In-vitro Diagnostik		Verwendbar bis		Nicht zur Wiederverwendung		Chargenbezeichnung		Bevollmächtigter Vertreter

Rev. 2024-06-21

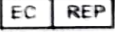 MT Promed Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany
TEL: +49-0-6894 581020
FAX: +49-0-6894 581021
E-mail: ear@mt-procons.com

Vertrieb: Sebapharma GmbH & Co. KG
Postfach 12 20
56136 Boppard - Bad Salzig

Hersteller: ATLAS LINK (Beijing) Technology Co. Ltd.
Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road
Shijingshan Dist. Beijing 100043 China