



# Gebrauchsanweisung ELANEE Brust-Gelaufagen



## Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere ELANEE Brust-Gelaufagen entschieden haben! Die Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, das Produkt möglichst optimal einzusetzen. Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung – insbesondere die Anwendung und Sicherheitshinweise – vor dem ersten Gebrauch genau durch. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung!  
Ihr ELANEE-Team



Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!



**LOT** Siehe Verpackung!

## 1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die folgendes Produkt:

**REF** 221-00 ELANEE Brust-Gelaufagen

## 2. Produktinhalt

6 x 2 ELANEE Brust-Gelaufagen

1 Gebrauchsanweisung

### **3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Die ELANEE Brust-Gelaufagen sind eine nicht aktive, mechanische Barriere und können zur kurzzeitigen Anwendung an der weiblichen, laktierenden Brust eingesetzt werden. Sie dienen dem Schutz und der Abdeckung von Brustwarzen mit oberflächlichen Wunden, bei denen die Dermis nicht durchtrennt ist. Die ELANEE Brust-Gelaufagen verkleben nicht mit der Brustwarze und fühlen sich angenehm und kühl auf der Haut an. Das Produkt ist für den privaten und professionellen Gebrauch bestimmt. Für andere als die genannten Anwendungszwecke sind die ELANEE Brust-Gelaufagen nicht geeignet.

### **4. Anwendungsbereiche**

Die ELANEE Brust-Gelaufagen sind für stillende Frauen mit wunden Brustwarzen vorgesehen.

### **5. Funktionsweise**

Die ELANEE Brust-Gelaufagen stellen eine mechanische Barriere zwischen der Brustwarze und dem Textil dar und schützen so die wunden Brustwarzen vor äußeren Einwirkungen. Die Brust-Gelaufagen verkleben nicht mit der Haut und fühlen sich angenehm und kühl auf der Haut an.

### **6. Anwendung**

1.

Achten Sie auf saubere Bedingungen vor der Anwendung der Brust-Gelaufagen (z.B. Hände waschen).

2.

Öffnen Sie den Folienbeutel an der Perforation.

3.

Nehmen Sie bitte eine Brust-Gelaufage aus der Packung und ziehen Sie die durchsichtige Schutzfolie ab. Legen Sie anschließend die Auflage mit der Gel-Seite mittig auf die Brustwarze. Führen Sie die gleichen Schritte bei der zweiten Auflage für die andere Brustseite durch. Sollten Sie nur eine Brust-Gelaufage benötigen, können Sie die andere bis zu 24 Stunden in der Verpackung aufbewahren. Legen Sie diese gut verschlossen in den Kühlschrank.

4.

Entfernen Sie die Brust-Gelauf lagen vor dem Stillen durch ein leichtes Ziehen an den seitlichen Abrundungen. Legen Sie die Brust-Gelauf lagen auf eine saubere Fläche mit der Gel-Seite nach oben.

5.

Legen Sie nach dem Stillen die Auflagen jeweils wieder auf die gleiche Brustseite, um eine mögliche Kreuzinfektion zu vermeiden.

6.

Entsorgen Sie die Brust-Gelauf lagen spätestens nach 24 Stunden im Hausmüll und verwenden Sie ein neues Paar gemäß der beschriebenen Anwendung unter Punkt 3-6. Verschmutzte Brust-Gelauf lagen müssen sofort entsorgt werden.

**Tipp:** Für ein zusätzliches kühles Gefühl können Sie die Brust-Gelauf lagen vor der Anwendung im Kühlschrank lagern.

## 7. Sicherheitshinweise



Bitte prüfen Sie Ihre Brust-Gelauf lagen vor der Anwendung. Verwenden Sie nur verpackte und einwandfreie Brust-Gelauf lagen. Verwenden Sie keine Brust-Gelauf lagen, deren Verpackung beschädigt ist.



Treten Hautreizungen im Bereich der Brust auf, bitte die Brust-Gelauf lagen nicht weiterverwenden.



Bei bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegen das Material sollte von der Anwendung abgesehen werden bzw. diese nur in Absprache mit einem Arzt erfolgen.



Die Brust-Gelauf lagen sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen maximal bis zu 24 Stunden verwendet werden. Verschmutzte Brust-Gelauf lagen müssen umgehend entsorgt und durch neue Auflagen ersetzt werden, um ein Infektionsrisiko zu vermeiden.



Verwenden Sie die Brust-Gelauf lagen nur bei oberflächlichen Wunden.

 Die Brust-Gelauflagen sind mit einem Verfallsdatum versehen (siehe Unterseite der Verpackung). Das Produkt sollte nach Ablauf des Datums nicht mehr verwendet werden.

 Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.

 Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

### **8. Aufbewahrung, Haltbarkeit, Lagerung und Transport**

Das Produkt muss vor Sonnenlicht geschützt zwischen 0 und 30 °C gelagert werden. Die Brust-Gelauflagen sind mit einem Verfallsdatum versehen (siehe Unterseite der Verpackung). Das Produkt sollte nach Ablauf des Datums nicht mehr verwendet werden.

### **9. Reinigungs- und Entsorgungshinweise**

Die Brust-Gelauflagen sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen maximal bis zu 24 Stunden verwendet werden. Die Brust-Gelauflagen können im Hausmüll entsorgt werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung müssen sortenrein getrennt und dem entsprechenden Recycling-System zugeführt werden. Die regionalen Entsorgungsrichtlinien sind dabei zu beachten.

### **10. Materialzusammensetzung**

Wasser, Glykol, Polymer

## 11. Erläuterung der verwendeten Symbole

	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargennummer
	Nicht zur Wiederverwendung
	Artikelnummer
	Achtung!
	Trocken lagern
	Vor Sonnenlicht schützen!
	Vorgegebene Lagertemperaturen
	Verwendbar bis: JJJJ-MM-TT
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden!
	Medizinprodukt

GA-091-02 Version: 2022-07-31

Hersteller:  
GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH  
Münchener Str. 21  
DE-85123 Karlskron  
[www.elanee.de](http://www.elanee.de)