

PreSense

EARLY

Schwangerschafts-Frühtest



Gebrauchsanweisung - bitte vor Anwendung sorgfältig lesen!

Anwendung

1. Folienbeutel öffnen, Teststab entnehmen und Schutzkappe abziehen.
2. Testspitze für ca. 10 Sekunden in den Urinstrahl halten oder in einen sauberen Behälter gesammelten Urin eintauchen.
3. Schutzkappe aufsetzen und 3 Minuten warten.



Ergebnis nach ca. 3 Minuten ablesen.



1 Kontrolllinie = nicht schwanger

Nach 5 Minuten kann das Ergebnis nicht mehr sicher ausgewertet werden. In einigen seltenen Fällen kann nach dem Trocknen des Tests eine leichte, grau-transparente Testlinie entstehen, die als eine **Verdunstungslinie** gewertet werden sollte!



Ist die Periode überfällig, führen Sie nach 2-3 Tagen einen neuen Test durch.



1 Test- und 1 Kontrolllinie = schwanger

Es entstehen gleichzeitig 2 Linien, die je nach hCG-Konzentration von unterschiedlicher Farbintensität sein können. Bedingt durch niedrige hCG-Werte gerade zu Beginn einer Schwangerschaft kann die Testlinie (links) nur sehr leicht gefärbt sein. Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Frauenarzt und vermeiden potentielle Risiken wie z. B. Röntgen.

24-Stunden-Hilfetelefon „Schwangere in Not“ ☎ 0800 40 40 020
Ein Service des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend



Keine Linie = ungültiges Testergebnis

Der Test hat sehr wahrscheinlich nicht genug Urin aufgenommen. Bitte führen Sie einen neuen Test durch.

Haben Sie mehrere Tests durchgeführt und verschiedene Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt.