

PreSense

EASY

Schwangerschaftstest



Gebrauchsanweisung - bitte vor Anwendung sorgfältig lesen!

Anwendung

1. Urin in einen sauberen Behälter sammeln.
2. Folienbeutel öffnen und Teststreifen entnehmen.
3. Weiße Testspitze bis zur Markierung unter den MAX-Pfeilen für ca. 3-4 Sekunden in den Urin eintauchen.
4. Teststreifen auf eine ebene Fläche legen und warten.



Ergebnis nach ca. 3 Minuten ablesen.
In einigen Fällen erscheint es schon nach 1 Minute.

1 Kontrolllinie = nicht schwanger




Ist die Periode überfällig, führen Sie bitte am nächsten Tag einen neuen Test durch und wenden sich an Ihren Frauenarzt.

Nach 5 Minuten kann das Ergebnis nicht mehr sicher ausgewertet werden, da in seltenen Fällen nach dem Trocknen des Tests eine leichte, transparente Testlinie entstehen kann, die als Verdunstungslinie zu deuten ist.



1 Test- und 1 Kontrolllinie = schwanger

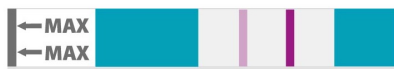


Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Frauenarzt. Vermeiden Sie potentielle Risiken wie z. B. Röntgen.

Es entstehen gleichzeitig 2 Linien, die je nach hCG-Konzentration von unterschiedlicher Farbintensität sein können. Bedingt durch niedrige hCG-Werte gerade zu Beginn einer Schwangerschaft kann die Testline (links) nur sehr leicht gefärbt sein.

24-Stunden-Hilfetelefon „Schwangere in Not“ ☎ 0800 40 40 020
Ein Service des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Keine Linie = ungültiges Testergebnis

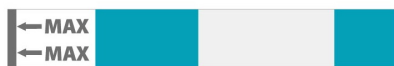

Der Test hat sehr wahrscheinlich nicht genug Urin aufgenommen. Bitte führen Sie einen neuen Test durch.

Haben Sie mehrere Tests durchgeführt und verschiedene Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt.