

6 Tage früher*

Schwangerschaftstests

*Der Test kann bereits 6 Tage vor Ausbleiben der Periode verwendet werden (5 Tage vor dem erwarteten ersten Periodentag). Dieser Test ist an dem Tag, an dem Ihre Periode normalerweise einsetzen würde, am genauesten.

ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- Timer (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Probensammelbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten)

INHALT DES KITS

- 1 oder mehr Schwangerschaftstests
- 1 Packungsbeilage

Informationsblatt

Vor der Durchführung des Tests bitte alle Informationen in dieser Packungsbeilage lesen.



- **Ergebnis schnell und einfach abzulesen.**
- **Genaues Ergebnis: 99 % Genauigkeit am Tag des Ausbleibens Ihrer Periode.**
- **Bequem: Sie können den Test zu jeder Tageszeit durchführen, doch am empfindlichsten ist der Test mit dem ersten Urin am Morgen.**

ANWENDUNG

Lassen Sie den Schwangerschaftstest auf Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C) kommen.

- 1 Nehmen Sie den Schwangerschaftstest aus dem Folienbeutel und verwenden Sie den Test innerhalb 1 Stunde. Halten Sie den Test am Daumengriff fest und ziehen Sie die Kappe ab, werfen Sie diese jedoch nicht weg.

Entweder

Fangen Sie Urin in einem sauberen trockenen Glasbehälter auf, halten Sie den Test dann aufrecht und tauchen Sie nur die Saugspitze mindestens 15 Sekunden lang in den Urin ein.

HINWEIS: Den Urin nicht in Kontakt mit dem Ergebnisfenster kommen lassen.



Oder

Halten Sie den Test am Daumengriff und mit der freiliegenden Saugspitze nach unten gerichtet mindestens 15 Sekunden lang direkt in Ihren Urinstrahl, bis die Spitze vollständig durchfeuchtet ist.

HINWEIS: Den Urin nicht in Kontakt mit dem Ergebnisfenster kommen lassen.



- 2 Nachdem Sie den Test wieder aus Ihrem Urin gezogen haben, setzen Sie sofort die Kappe wieder auf die Saugspitze auf, legen den Test auf eine flache Oberfläche, wobei Test- und Kontrollfenster nach oben weisen, und starten dann den Timer.

Hinweis: Den Urin nicht in Kontakt mit dem Ergebnisfenster kommen lassen. Sobald der Test gestartet ist, sehen Sie, dass sich eine rötlich-violette Linie im Kontrollbereich (C) bildet, die anzeigt, dass der Test ordnungsgemäß funktioniert.



- 3 Manchmal sind positive Ergebnisse bereits nach 1 Minute zu sehen. Dies ist abhängig von der hCG-Konzentration. Warten Sie aber bis zu 3 Minuten, ob eine Linie im Testbereich (T) erscheint.

WICHTIG!

Lesen Sie die Ergebnisse innerhalb von 10 Minuten ab. Entsorgen Sie nach dieser Zeit das Teststäbchen. Nach 10 Minuten sollten Sie weitere Veränderungen am Ergebnis oder Linien, die nach dieser Zeit erst sichtbar werden, nicht mehr beachten.



- 4 Erscheint nicht innerhalb von 3 bis 10 Minuten eine farbige Linie im Kontrollbereich (C), hat der Test nicht ordnungsgemäß funktioniert.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

SCHWANGER



Zwei eindeutig sichtbare farbige Linien erscheinen. Die eine Linie sollte sich im Kontrollbereich (C) befinden und die andere im Testbereich (T). Es kann sein, dass eine Linie heller ist als die andere; sie müssen nicht exakt identisch sein. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich schwanger sind.

WENN DER TEST AN EINEM TAG VOR DEM ERWARTETEN ERSTEN TAG IHRER PERIODE POSITIV IST, WIEDERHOLEN SIE DEN TEST BITTE AM ERWARTETEN ERSTEN PERIODENTAG, UM DAS ERGEBNIS ZU BESTÄTIGEN.

NICHT SCHWANGER



Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich (C). Im Testbereich (T) ist keine Linie zu sehen. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind.

UNGÜLTIG



Das Ergebnis ist ungültig, wenn im Kontrollbereich (C) keine farbige Linie erscheint, auch wenn im Testbereich (T) eine Linie zu sehen ist. Die wahrscheinlichsten Gründe für ein ungültiges Ergebnis sind unzureichende Urinmenge oder unsachgemäße Vorgehensweise. Sie sollten den Test mit einem neuen Schwangerschaftstest wiederholen.



6 Tage früher*

Schwangerschaftstests

FRAGEN UND ANTWORTEN

F: Wie funktioniert der Test?

A: Der Schwangerschaftstest weist ein Hormon in Ihrem Urin nach, das Ihr Körper während einer Schwangerschaft bildet (hCG – humanes Choriongonadotropin). Die Menge des Schwangerschaftshormons nimmt im Laufe der Schwangerschaft zu.

F: Wie bald kann ich den Test machen, wenn ich den Verdacht habe, schwanger zu sein?

A: Sie können Ihren Urin bereits 6 Tage vor Ausbleiben der Periode testen (5 Tage vor dem erwarteten ersten Periodentag), der Test ist jedoch am Tag des Ausbleibens der Periode am genauesten.

F: Muss ich den Test mit dem ersten Urin am Morgen machen?

A: Sie können den Test zwar zu jeder Tageszeit machen, aber der erste Urin am Morgen ist in der Regel der konzentrierteste des Tages und dürfte den höchsten hCG-Spiegel enthalten. Trinken Sie nicht zu viel, bevor Sie den Test durchführen.

F: Woher weiß ich, dass der Test funktioniert hat?

A: Das Erscheinen einer farbigen Linie im Kontrollbereich (C) zeigt Ihnen, dass Sie das Testverfahren korrekt befolgt haben und der Test funktioniert hat.

F: Muss ich die ganzen 3 Minuten warten, bevor ich meine Ergebnisse ablesen kann?

A: Ja. Es ist wichtig, dass Sie abwarten, ob eine Linie im Testbereich (T) zu sehen ist, bevor Sie das Ergebnis ablesen. Es kann zwar sein, dass die Linie im Kontrollbereich (C) schnell erscheint, doch es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis eine Linie im Testbereich (T) zu sehen ist.

F: Wenn ich jeweils eine Linie im Test- und im Kontrollbereich sehe, aber die eine Linie dunkler ist als die andere, bin ich dann schwanger?

A: Ja. Selbst wenn eine Linie dunkler ist als die andere bedeutet dieses Ergebnis, dass Sie wahrscheinlich schwanger sind.

F: Wie genau ist der Test?

A: Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Schwangerschaftstest am Tag des Ausbleibens Ihrer Periode am genauesten (99 %) ist.

F: Wie empfindlich ist der Test?

A: Der Schwangerschaftstest weist hCG im Urin bei einer Konzentration von 10 mIE/ml oder höher nach. Waren in der Urinprobe LH (300 mIE/ml), FSH (1000 mIE/ml) und TSH (1000 µIE/ml) vorhanden, hatte dies keinen Einfluss auf das erwartete Ergebnis.

F: Was sollte ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich schwanger bin?

A: Es bedeutet, dass Ihr Urin hCG enthält und dass Sie wahrscheinlich schwanger sind. Gehen Sie zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, um sich Ihre Schwangerschaft bestätigen zu lassen und die weiteren Schritte zu besprechen, die Sie nun einleiten sollten.

F: Was sollte ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich nicht schwanger bin?

A: Es bedeutet, dass kein hCG in Ihrem Urin nachgewiesen wurde und Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Falls Ihre Periode jedoch nicht innerhalb einer Woche nach dem erwarteten Datum einsetzt, wiederholen Sie den Test mit einem neuen Schwangerschaftstest. Wenn Sie nach Wiederholung des Test ein negatives Ergebnis erhalten und Ihre Periode immer noch nicht einsetzt, sollten Sie zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin gehen.

F: Haben häufig verordnete Medikamente oder deren Stoffwechselprodukte Auswirkungen auf den Test?

A: In den angegebenen Konzentrationen wirkte sich keine der folgenden Substanzen auf die Testergebnisse aus: Acetaminophen (Paracetamol 20 mg/dl), Acetessigsäure (2 g/dl), Acetylsalicylsäure (Aspirin 20 mg/dl), Albumin (2 g/dl), Bilirubin (2 mg/dl), Koffein (20 mg/dl), Codein (10 mg/dl), Ephedrin (20 mg/dl), Ethanol (1 %), Gentisinsäure (20 mg/dl), Glucose (2 g/dl), Hämoglobin (1 mg/dl), Methadon (10 mg/dl), Methanol (10 %), Phenylpropanolamin (20 mg/dl), Phenothiazin (20 mg/dl), Salicylsäure (20 mg/dl).

Der Schwangerschaftstest ist ein schneller Lateral-Flow-Immunoassay für den qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin als Hilfestellung beim Nachweis einer Schwangerschaft. Der Test verwendet eine Kombination aus Antikörpern einschließlich eines monoklonalen hCG-Antikörpers, um einen erhöhten hCG-Spiegel selektiv nachzuweisen. Der Test wird so durchgeführt, dass Urin direkt auf die Saugspitze des Schwangerschaftstests abgegeben oder die Saugspitze in eine Urinprobe getaucht wird und daraufhin das Ergebnis von den farbigen Linien abgelesen wird.

DATEN AUS DER KLINISCHEN FORSCHUNG

Es wurde eine Studie durchgeführt, um die Genauigkeit des Suresign 6 Tage früher Schwangerschaftstests vor dem erwarteten ersten Periodentag von Tag zu Tag zu bewerten. Die folgende Tabelle zeigt diese Ergebnisse:

Anzahl von Tagen vor dem erwarteten ersten Periodentag	5 Tage vorher	4 Tage vorher	3 Tage vorher	2 Tage vorher	1 Tag vorher	Erwarteter erster Periodentag	Tag nach dem erwarteten ersten Periodentag
Prozentuale Genauigkeit des Ergebnisses	76 %	96 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %

EINSCHRÄNKUNGEN

- Wenn eine Frau erst vor kurzem schwanger war (selbst wenn sie nicht die normale Schwangerschaftsdauer durchlaufen hat), kann es zu einem falschen Ergebnis „Schwanger“ kommen.
- Neben einer Schwangerschaft können eine Reihe von Erkrankungen wie Trophoblasterkrankungen und bestimmte nicht-trophoblastische Neoplasmen einschließlich Hodenkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs und Lungenkrebs erhöhte hCG-Spiegel verursachen.
- In Fällen in denen sehr hohe hCG-Konzentrationen vorliegen (> 500.000 mIE/ml), kann es aufgrund des sogenannten High-Dose-Hook-Effekts zu einem falsch-negativen Ergebnis kommen.
- Eine hohe Flüssigkeitsaufnahme sollte vor dem Test vermieden werden, da ein Ergebnis „Nicht schwanger“ erzielt werden könnte, wenn die Urinprobe zu stark verdünnt ist.
- Fruchtbarkeitsmedikamente, die hCG enthalten, können irreführende Ergebnisse verursachen. Diese Fruchtbarkeitsmedikamente werden in der Regel als Injektion verabreicht und ein Test, der zu kurz nach der Verabreichung durchgeführt wird, kann zu einem falschen Ergebnis „Schwanger“ führen.
- Andere Fruchtbarkeitstherapien (z. B. Clomiphencitrat), Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika und hormonelle Kontrazeptiva (z. B. die „Pille“) dürften die Ergebnisse nicht beeinträchtigen.
- Ein falsch-positives Testergebnis kann neben einer Schwangerschaft von einer Reihe von Erkrankungen, bei denen es zu erhöhten hCG-Konzentrationen kommt (z. B. Brust- und Lungenkrebs oder Trophoblasterkrankungen), verursacht werden.
- Die Diagnose einer Schwangerschaft mit diesem Test sollte von einem Arzt oder einer Ärztin bestätigt werden, der/die alle klinischen und Laborbefunde ausgewertet.
- Treffen Sie KEINE medizinischen Entscheidungen auf Grundlage der Ergebnisse dieses Tests ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

WARNHINWEISE

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Für *in-vitro*-diagnostische Zwecke.
- Nicht einnehmen.
- Trockenmittel nicht essen.
- Der Schwangerschaftstest ist nicht wiederverwendbar.
- Den Test-Folienbeutel erst unmittelbar vor Durchführung des Tests öffnen.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel eingerissen oder beschädigt ist.
- Den verwendeten Test hygienisch einwandfrei im Hausmüll entsorgen.
- Dieses Produkt dient der Selbsttestung.
- Nicht nach Ablauf des auf dem Folienbeutel aufgedruckten Verfallsdatums verwenden.

LAGERUNG

- Trocken bei 4 °C bis 30 °C lagern.
- Nicht einfrieren.

SYMBOLS

- Achtung, siehe Gebrauchsanweisung
- Zwischen 4°C und 30°C lagern
- Tests pro Kit
- Nicht zur Wiederverwendung
- Nur für *in-vitro*-diagnostische Zwecke
- Chargenbezeichnung
- Verwendbar bis
- Hersteller
- Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
- Bestell-Nr.
- Gebrauchsanweisung beachten

CIGA Healthcare Ltd
Kilcarr House, Kildowney Road, Ballymena, BT44 9EY, Northern Ireland

E-Mail
info@suresign.com
Online
www.suresign.com

REF 00268
PN: 01314A
REV: 05/24