

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZOW S.A.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name		Renu Advanced		Kolor nadruku Colours	
				Black	
Kraj Country (ISO)		Poland/Czechia/Slovakia (PL/CZ/SK)		Nr wyrobnika Spec No	
				55149	
Opracowane przez Designed by		Mateusz Fron Mateusz.Fron@bauschhealth.com		Kod Wytwórcy Manufacturer code	
				IS1085673W	
Nr korekty Proof No		4 Data Date		27-10-2021	
				Kod farmaceutyczny Pharmacode	
				-	
Kod wersji Code version		P1PLCZSK01		Inny kod Other code	
				-	
Rozmiar czcionki Font size		minimum 5 pt		Wymiar ulotki PIL size	
				170 x 240 mm	
Kod czcionki Font used		Myriad Pro Regular Myriad Pro Bold		Gramatura papieru Paper weight	
				- g/m²	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN_20-0673-A - New set of artworks for new product					
Aceptacja Techniczna Technical Approval					
Aceptacja Uzupełn. Rejestracji regulatory Affairs Dept. Approval					
Aceptacja Uzupełn. Rejestracji regulatory Affairs Dept. Approval					

APPROVATO

Da Massimo Brambilla alle 16.07 , 08/11/2021

Aceptacja Uzupełn. Rejestracji regulatory Affairs Dept. Approval

ZATWIERDZONE

Przez Malgorzata.Slezak o godz. 10:07, 8/11/21

APPROVED

By Katarina.Molnarova at 9:14 am, Nov 04, 2021

APPROVED

By Magdalena Šavrdá Zwan at 9:51 pm, Oct 27, 2021

ZATWIERDZONE

Przez Krzysztof Sarnacki o godz. 10:41, 4/11/21

BAUSCH + LOMB

ReNu

ADVANCED
płyn wielofunkcyjny
wiciełowy roztok
wiciełowy roztok

pl: Należy zapoznać się uważnie z treścią niniejszej ulotki i zachować ją, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Zaleca się, aby wszyscy specjaliści omówili te informacje ze swoimi pacjentami.

Do pielęgnacji, czyszczenia, usuwania białek i dezynfekcji soczewek kontaktowych należy wykonać następujące proste kroki:

KROK 1: Nanieść co najmniej 3 krople płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced na każdą soczewkę z obu stron i delikatnie pocierać przez 20 sekund.

KROK 2: Dokładnie wypłukać soczewki z obu stron płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced przez 5 sekund.

KROK 3: Oczyszczone soczewki umieścić w pojemniku na soczewki i napełnić go świeżym płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced. Pozostawić soczewki w płynie przez co najmniej 4 godziny. Należy zawsze używać świeżego płynu - po każdym użyciu, usunąć płyn z pojemnika.

Soczewki są gotowe do założenia. Jeżeli na soczewkach znajdują się resztki osadu, przed założeniem należy je opłukać płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced.

Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty. Biorąc pod uwagę indywidualny skład lez i harmonogram noszenia soczewek specjalista może zalecić dodatkowe procedury lub procedury. Należy soczewki nie będą zalecały natychmiast, należy przechowywać je w zamkniętym pojemniku na soczewki.

Soczewki przed użyciem, można przechowywać w zamkniętym pojemniku przez maks. 30 dni. W przypadku przechowywania soczewek przez dłuższy czas, należy przed założeniem oczyścić je i zdezynfekować świeżym płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced.

Skład: Jony roztworu izotonicznego zawierający poloksaminy, polokamer 181, diglicynę, glicynian sodu, kwas borowy, boran sodu, sól dwusulfowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego i chlorek sodu, konserwowany potrojnym systemem dezynfekującym (biguanid poliaminopropylu 0,00005%, polikwaternium 0,00011% i aleksydin 0,0002%).

Działanie: Stosowany codziennie płyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced rozpuszcza białko, czyści, rozrzedza i usuwa nagromadzony film, zanieczyszczenia i osady z miękkich soczewek kontaktowych. Płyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced pomaga zapobiegać powstawaniu drażniących osadów na powierzchni soczewki. Niszczą szkodliwe drobnoustroje znajdujące się na soczewce. Płyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced służy także do płukania soczewek.

Korzyści ze stosowania płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced: Płyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced ma wyjątkowo potrojnny system dezynfekujący. Płyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced nawilża soczewki.

Wskazania (zastosowanie): Płyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji, czyszczenia, usuwania zrogów białkowych, płukania, dezynfekcji chemicznej (nie termicznej) i przechowywania miękkich (hydrofiliowych) soczewek kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrofiliowych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Przeciwwskazania (kiedy nie stosować): Nie ma znanych przeciwwskazań do stosowania płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced. Jednak nie należy stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

OSTRZEŻENIE: PROBLEMY Z SOCEWKAMI KONTAKTOWYMI I PRODUKTAMI DO ICH PIELĘGNACJI MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ INFEKCI I LUB OWRZODZENIA ROGÓWKI I PROWADZIĆ DO UTRATY WZROKU. Należy koniecznie stosować się do zaleceń swojego specjalisty i przestrzegać wszystkich poleceń na etykiecie instrukcji dotyczących właściwego używania soczewek i produktów do ich pielęgnacji, w tym pojemników do przechowywania soczewek.

Problemy z oczami, w tym owrzodzenia rogówki, mogą szybko się rozwijać i prowadzić do utraty wzroku. Soczewki przeznaczone do noszenia w trybie dziennym powinny być zdejmowane na czas snu. Badania kliniczne wykazały, że częstsze występowania ciężkich reakcji niepożądanych jest większa u osób noszących soczewki w trybie przedłużonym niż u osób noszących soczewki w trybie dziennym.

Badania wykazały także, że ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych jest tym większe, im dłużej nosi się soczewki w trybie przedłużonym bez zdejmowania w celu oczyszczenia i dezynfekcji lub wymiany na nowe. Badania wykazały również, że reakcje niepożądane występują częściej u osób palących. W przypadku pojawienia się uczucia dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian w widzeniu lub zaozerwienia oka należy natychmiast zdjąć soczewki kontaktowe i niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą. Osobom noszącym soczewki kontaktowe zaleca się zgłaszanie na wizyty do specjalisty dwa razy do roku lub częściej, zgodnie z zaleceniami.

Przechowywanie soczewek w płynie: Pojemnik na soczewki należy napełniać za każdym razem świeżą porcją płynu, nie wolno dolewać świeżego płynu do zużytego ani używać tej samej porcji wielokrotnie. Płyn należy wycisnąć natychmiast po wycięciu soczewek z pojemnika.

Nie należy narażać soczewek na kontakt z wodą z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem.

OSTRZEŻENIE: Niewylenianie soczewki z pojemnika na soczewki po każdym użyciu, dolanie świeżego płynu do starego lub użycie wody do pielęgnacji soczewek może doprowadzić do zanieczyszczenia skutkującego uszkodzeniem oka i potencjalną utratą wzroku.

Czas pocierania i płukania: Nanieść co najmniej 3 krople płynu na każdą soczewkę z obu stron i pocierać przez 20 sekund. Płukać soczewki z obu stron płynem przez 5 sekund.

OSTRZEŻENIE: Aby odpowiednio zdezynfekować soczewki i zmniejszyć ryzyko ich zanieczyszczenia, należy przestrzegać wszystkich zaleceń na etykiecie produktu dotyczących czasu pocierania i płukania. Krótsze tarcie lub płukanie może spowodować, że soczewki nie będą odpowiednio oczyszczone.

Do dezynfekcji soczewek nigdy nie należy używać wody, soli fizjologicznej ani kropli nawilżających. Te płyny nie przyniosą soczewki. Niestosowanie zalecanego środka dezynfekującego może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

Pielęgnacja pojemnika na soczewki: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać pojemnik na soczewki płynem dezynfekującym do soczewek.

Każdorazowo po wycięciu soczewek pojemnik należy oczyścić, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Aby umożliwić usunięcie osadów z pojemnika, można go suszyć do góry dnem.

Pojemnik na soczewki należy wymieniać regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać wody ani niejakołych płynów do przechowywania soczewek i płukania pojemnika na soczewki. Należy używać tylko świeżego płynu wielofunkcyjnego, aby nie zanieczyszczyć soczewek ani pojemnika na soczewki. Stosowanie niejakołego płynu może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

Działanie wody: Podczas noszenia soczewek nie należy narażać ich na kontakt z wodą.

Należy zaprzyc swojego specjalistę o zalecenia dotyczące noszenia soczewek podczas aktywności związanej z wodą.

Data przydatności: Wyrzucić po upływie 90 dni od otwarcia.

OSTRZEŻENIE:

• Stosowanie płynu wielofunkcyjnego po dacie przydatności może skutkować jego zanieczyszczeniem i prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub utraty wzroku.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji użycia produktu może prowadzić do utraty wzroku.
- Należy zgłaszać się na regularne kontrole do specjalisty.
- Przed dotknięciem soczewek należy zawsze umyć i wysuszyć ręce.
- Nie używać wody z kranu, wody butelkowanej czy sily do soczewek czy pojemnika na soczewki.
- Nie stosować w przypadku braku lub uszkodzenia pierścienia zabezpieczającego butelkę.
- Do czyszczenia i dezynfekcji soczewek kontaktowych należy używać wyłącznie świeżego roztworu.
- Po każdym cyklu dezynfekcji należy zawsze wypłukać płyn pozostały w pojemniku na soczewki.
- Sól fizjologiczna ani krople nawilżające nie zdezynfekują soczewek.
- Należy zawsze wymieniać płyn, soczewki i pojemnik na soczewki na nowe zgodnie z zaleceniami.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie należy dotykać końcówki butelki żadnej powierzchnią. Po użyciu dokładnie zakręcić nakrętkę.
- Nie stosować dezynfekcji termicznej/ciepłej.

Środki ostrożności:

- Zawsze wylewać roztwór z pojemnika na soczewki po każdym użyciu.
- Butelka powinna być szczelnie zamknięta, gdy nie jest w użyciu.
- Przechowywać płyn w temperaturze pokojowej. Nie zamrażać.
- Zużyć przed datą ważności na opakowaniu kartonowym i butelce.
- Wyrzucić pozostały płyn po upływie 90 dni od otwarcia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Reakcje niepożądane (problemy i jak sobie z nimi radzić): Mogą wystąpić następujące problemy: kłucie, pieczenie lub swędzenie oczu (podrażnienie), obniżenie komfortu w porównaniu z pierwszym użyciem soczewek, uczucie czegoś obcego w oku (ciało obce, zadrapanie), nadmierne łzawienie oka (łzawienie), nieprzyjemne wydzieliny z oka, zaozerwienie oka, zmniejszona ostrość widzenia (słaba ostrość widzenia), nieostre widzenie, łęcza lub halo wokół przedmiotów, wrażliwość na światło (swiatłowstręt) lub suchosć oczu. W razie wystąpienia któregoś z powyższych objawów:

Natychmiast zdjąć soczewki.

- Jeśli dyskomfort lub problem ustąpi, należy przyznać się soczewce.
- Jeśli soczewka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, nie należy jej ponownie zakładać. Umieścić soczewkę w pojemniku na soczewki i skontaktować się ze swoim specjalistą.
- Jeśli na soczewce znajdują się zanieczyszczenia, reszki lub inne ciało obce, lub problem ustąpi, a soczewka wygląda na nieuszkodzoną, należy ją dokładnie oczyścić, wypłukać i zdezynfekować, a następnie ponownie ją założyć.

Jeśli problem nie ustępuje, należy natychmiast zdjąć soczewkę i skonsultować się ze swoim specjalistą.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, może to oznaczać poważne zagrożenie, takie jak infekcja, owrzodzenie rogówki, neowaskularyzacja lub zapalenie tętnic. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę i leczenie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń oczu.

W celu oceny potencjalnego zakażenia oka, na wizytę u lekarza okulisty należy zabrać ze sobą soczewki, płyn i pojemnik na soczewki, aby wykonać posiew i rozpoznać mikroorganizmy.

Przepisywanie higieny przy pielęgnacji soczewek:

- Przed dotknięciem soczewek należy zawsze umyć i opłukać ręce.
- Każdorazowo po zdjęciu soczewek należy je oczyścić, wypłukać i zdezynfekować.
- Zawsze należy zdejmować/zakładać soczewki od tej samej strony, lewej lub prawej, by uniknąć pomyłek.
- Po użyciu pojemnik na soczewki należy zawsze opróżnić i wypłukać świeżą porcją płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced i pozostawić do wyschnięcia. Nieużywana butelka powinna być szczelnie zamknięta.

Sposób dostarczania wyrobu: wielofunkcyjny płyn ReNu® Advanced jest dostępny w sterylnych plastikowych butelkach. Butelki i kartony są oznaczone numerem serii i datą ważności.

are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

©2020 Bausch & Lomb Inc.

Data wydania: 2021-10

Os: Preście si prosim pozorné túto príbalovú informáci a uchovajte ju pro budúci potrebu. Nie ma znanych przeciwwskazań do stosowania płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced. Jednak nie należy stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

OSTRZEŻENIE: PROBLEMY Z SOCEWKAMI KONTAKTOWYMI I PRODUKTAMI DO ICH PIELĘGNACJI MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ INFEKCI I LUB OWRZODZENIA ROGÓWKI I PROWADZIĆ DO UTRATY WZROKU. Należy koniecznie stosować się do zaleceń swojego specjalisty i przestrzegać wszystkich poleceń na etykiecie instrukcji dotyczących właściwego używania soczewek i produktów do ich pielęgnacji, w tym pojemników do przechowywania soczewek.

Problemy z oczami, w tym owrzodzenia rogówki, mogą szybko się rozwijać i prowadzić do utraty wzroku. Soczewki przeznaczone do noszenia w trybie dziennym powinny być zdejmowane na czas snu. Badania kliniczne wykazały, że częstsze występowania ciężkich reakcji niepożądanych jest większa u osób noszących soczewki w trybie przedłużonym niż u osób noszących soczewki w trybie dziennym.

Badania wykazały także, że ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych jest tym większe, im dłużej nosi się soczewki w trybie przedłużonym bez zdejmowania w celu oczyszczenia i dezynfekcji lub wymiany na nowe. Badania wykazały również, że reakcje niepożądane występują częściej u osób palących. W przypadku pojawienia się uczucia dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian w widzeniu lub zaozerwienia oka należy natychmiast zdjąć soczewki kontaktowe i niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą. Osobom noszącym soczewki kontaktowe zaleca się zgłaszanie na wizyty do specjalisty dwa razy do roku lub częściej, zgodnie z zaleceniami.

Przechowywanie soczewek w płynie: Pojemnik na soczewki należy napełniać za każdym razem świeżą porcją płynu, nie wolno dolewać świeżego płynu do zużytego ani używać tej samej porcji wielokrotnie. Płyn należy wycisnąć natychmiast po wycięciu soczewek z pojemnika.

Nie należy narażać soczewek na kontakt z wodą z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem.

OSTRZEŻENIE: Niewylenianie soczewki z pojemnika na soczewki po każdym użyciu, dolanie świeżego płynu do starego lub użycie wody do pielęgnacji soczewek może doprowadzić do zanieczyszczenia skutkującego uszkodzeniem oka i potencjalną utratą wzroku.

Czas pocierania i płukania: Nanieść co najmniej 3 krople płynu na każdą soczewkę z obu stron i pocierać przez 20 sekund. Płukać soczewki z obu stron płynem przez 5 sekund.

OSTRZEŻENIE: Aby odpowiednio zdezynfekować soczewki i zmniejszyć ryzyko ich zanieczyszczenia, należy przestrzegać wszystkich zaleceń na etykiecie produktu dotyczących czasu pocierania i płukania. Krótsze tarcie lub płukanie może spowodować, że soczewki nie będą odpowiednio oczyszczone.

Do dezynfekcji soczewek nigdy nie należy używać wody, soli fizjologicznej ani kropli nawilżających. Te płyny nie przyniosą soczewki. Niestosowanie zalecanego środka dezynfekującego może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

Pielęgnacja pojemnika na soczewki: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać pojemnik na soczewki płynem dezynfekującym do soczewek.

Każdorazowo po wycięciu soczewek pojemnik należy oczyścić, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Aby umożliwić usunięcie osadów z pojemnika, można go suszyć do góry dnem.

Pojemnik na soczewki należy wymieniać regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać wody ani niejakołych płynów do przechowywania soczewek i płukania pojemnika na soczewki. Należy używać tylko świeżego płynu wielofunkcyjnego, aby nie zanieczyszczyć soczewek ani pojemnika na soczewki. Stosowanie niejakołego płynu może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

Działanie wody: Podczas noszenia soczewek nie należy narażać ich na kontakt z wodą.

Należy zaprzyc swojego specjalistę o zalecenia dotyczące noszenia soczewek podczas aktywności związanej z wodą.

Data przydatności: Wyrzucić po upływie 90 dni od otwarcia.

OSTRZEŻENIE: Aby odpowiednio zdezynfekować soczewki i zmniejszyć ryzyko ich zanieczyszczenia, należy przestrzegać wszystkich zaleceń na etykiecie produktu dotyczących czasu pocierania i płukania. Krótsze tarcie lub płukanie może spowodować, że soczewki nie będą odpowiednio oczyszczone.

Do dezynfekcji soczewek nigdy nie należy używać wody, soli fizjologicznej ani kropli nawilżających. Te płyny nie przyniosą soczewki. Niestosowanie zalecanego środka dezynfekującego może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

Pielęgnacja pojemnika na soczewki: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać pojemnik na soczewki płynem dezynfekującym do soczewek.

Każdorazowo po wycięciu soczewek pojemnik należy oczyścić, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Aby umożliwić usunięcie osadów z pojemnika, można go suszyć do góry dnem.

Pojemnik na soczewki należy wymieniać regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać wody ani niejakołych płynów do przechowywania soczewek i płukania pojemnika na soczewki. Należy używać tylko świeżego płynu wielofunkcyjnego, aby nie zanieczyszczyć soczewek ani pojemnika na soczewki. Stosowanie niejakołego płynu może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

Działanie wody: Podczas noszenia soczewek nie należy narażać ich na kontakt z wodą.

Należy zaprzyc swojego specjalistę o zalecenia dotyczące noszenia soczewek podczas aktywności związanej z wodą.

Data przydatności: Wyrzucić po upływie 90 dni od otwarcia.

- Čocky by neměly přijít do kontaktu ani byt uchovány ve vodě, pouzdro na čocky nemá být oplachováno vodou, jako například z vodovodního kohoutku, z láhve nebo destilovanou vodou či jakýmkoli nesterilním roztokem.

VAROVÁNÍ:

- Pokud roztok z pouzdra na čocky po každém použití nezhliďte, pokud „doleváté“ roztok nebo použijete vodu pro ošetření svých čock, může dojít ke kontaminaci s výsledným poraněním oka a možnou ztrátou zraku.

Doba čištění a oplachování:

- Měňte povrch čocky po dobu 20 sekund s použitím nejméně 3 kapek roztoku na každé straně čocky.
- Každou stranu čocky oplachujte roztokem po dobu 5 sekund.

VAROVÁNÍ:

- Dodržujte doporučené doby ošetření a oplachování čock uveden v příbalové letáku, aby došlo k odpovídající dezinfekci čock a snížilo se riziko jejich kontaminace. Při krácení doby ošetření nebo oplachování nemusí být čock dostatečně čisté.
- Nikdy nepoužívejte vodu, slany roztok nebo zvlhčovací kapky pro dezinfekci svých čock. Tyto roztoky čockám neposkytnou dezinfekci. Nepoužití doporučeného dezinfekčního prostředku může vést k těžké infekci, ztrátě zraku nebo slepotě.

Pěse o pouzdro na čocky:

- Před prvním použitím pouzdro na čocky a jeho víčko důkladně opláchněte pomocí dezinfekčního roztoku na kontaktní čocky.
- Při každém vyjmutí čock pouzdro očistěte, vypláchněte a osušte. Aby mohli nadbytečný roztok odtéct, můžete při sušení na vzduchu pouzdro otáčet.
- Svě pouzdro na čocky často vyměňujte, nejméně jednou za tři měsíce.

VAROVÁNÍ:

- Neuchováváte čocky nebo neoplachujte pouzdro na čocky vodou nebo jakýmkoli nesterilním roztokem. Používejte pouze čerstvý, neředěný roztok, abyste nedošlo ke kontaminaci čock nebo pouzdra. Použití nesterilního roztoku může vést k závažné infekci, ztrátě zraku nebo slepotě.

Účinky vody:

- Nevytvářejte své kontaktní čock během nošení v oku, počít někde v oku.
- Požadujte svého očního specialistu o doporučení ohledně nošení čock při jakékoli činnosti, při které dochází ke kontaktu s vodou.

Datum likvidace:

- Veškerý zbytek roztoku zlikvidujte 90 dní po otevření.

VAROVÁNÍ:

- Použití víceúčelového roztoku po datu použitelnosti může vést ke kontaminaci roztoku a k závažné infekci, ztrátě zraku nebo slepotě.

Důležité bezpečnostní informace:

- Vždy postupujte podle instrukcí pro použití výrobku. Nedodržení návodu pro použití může vést ke ztrátě zraku.
- Pravidelně navštěvujte svého očního lékaře.
- Vždy si před manipulací s čockami umyjte a osušte ruce.
- Nepoužívejte vodu z kohoutku, balenou vodu nebo sily při manipulaci s čockami nebo pouzrem na čocky.
- Nepoužívejte, pokud je pojitný kroužek na lahvičce poškozený nebo chybí.
- Po čištění a dezinfekci kontaktních čock používejte pouze čerstvý roztok.
- Po každém dezinfekčním cyklu vždy zlikvidujte zbytek roztoku z pouzdra na čocky.
- Sily nebo zvlhčující kapky nezasahují dezinfekci čock.
- Vždy vyměňujte své roztoky, čocky a pouzdro na čocky dle instrukcí.
- Aby nedošlo ke kontaminaci roztoku, nedotýkejte se hrotem nádobky žádného povrchu. Po použití nasadte víčko.
- Nepoužívejte tepelnou (termální) dezinfekci.

Upozornění:

- Po každém použití vždy roztok z pouzdra na čocky zlikvidujte.
- Uchovávejte lahvičku těsně uzavřenou, pokud ji nepoužíváte.
- Uchovávejte roztok při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem.
- Použíjte před uplynutím data použitelnosti uvedeného na krabici a lahvičce.
- Veškerý zbytek roztoku zlikvidujte 90 dní po otevření.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nežádoucí účinky (Potíže a co dělat): Mohou se vyskytnout následující potíže: pocit bodání, pálení nebo svědění očí (podráždění), pohlíží je menší než při prvním vložení čocky do oka, pocit něžného v oku (díží těleso, poškrábání plocha), nadměrné slzení oka, neobvyklý výtok z oka, zarudnutí oka, snížená ostrota vidění (špatná zraková ostrota), rozmazané vidění, duhy nebo halo efekt kolem objektů, citlivost na světlo (fotofobie) nebo suchost očí. Pokud si všimnete čehokoli z výše uvedeného:

Očistěte a vyměňte své čocky:

- Pokud nepříjemné pocity nebo problém odezní, čocky si pak pečlivě prohlédněte.
- Pokud jsou čocky poškozené, nevhádejte je zpět do pouzdra. Vložte je do pouzdra na uchování čock a kontaktujte svého očního lékaře.
- Pokud je na čocke nečistota, řasa nebo jiné cizí těleso, nebo problém odezní a čock se zdá nepoškozená, důkladně očistěte, opláchněte a zdezinfekujte a poté ji znovu vložte do oka.

Pokud problém přetrvává, okamžitě vyměňte čocky a poraďte se s lékařem.

Pokud se vyskytnou kterýkoli z výše uvedených problémů, může to být známa závažná stáva, jako je infekce, vřed rohovky, neovaskularizace nebo iritida (žánět duhovky). Okamžitě vyhleďte odbornou konzultaci a ošetření, abyste se vyhnuli závažnému poškození očí.

Na konzultaci u svého očního lékaře pro posouzení potenciální oční infekce přineste čocky, roztok a pouzdro na čocky s sebou, aby bylo možné provést kultivaci a lépe identifikovat jakékoli mikroorganizmy.

Správná hygiena a péče o čocky:

- Vždy si před manipulací s čockami umyjte a opláchněte ruce.
- Pokud jsou čocky poškozené, nevhádejte je zpět do pouzdra. Vložte je do pouzdra na uchování čock a kontaktujte svého očního lékaře.
- Vždy nejméně zavazujte stejnou čock, pravou nebo levou, abyste se vyhnuli záměně.
- Po použití vždy vyprázdněte a vypláchněte pouzdro na čocky čerstvým víceúčelovým roztokem ReNu® Advanced a nechte ho uschnout na vzduchu.