



cemio
switzerland

Zdravotnický prostředek

GLYCERIN care

Glycerinové
čípky pro dospělé 2500 mg

Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití!

Cemio GLYCERIN care je jednorázový zdravotnický prostředek ve formě čípku na bázi glycerolu, používaný k usnadnění vyprazdňování střev při zácpě.

Jak působí? Glycerol má mechanický projímavý účinek, založený na vtažování vody do stolice, které vede k jejímu zvlhčení a změkčení a následnému rozpohybování střev a vyprázdnění.

Indikace: Cemio GLYCERIN care se používá ke krátkodobé léčbě občasných zácp.

Účinná složka: Glycerol.

Kdy se nesmí používat? Nepoužívejte čípky k léčbě akutní bolesti břicha ani jiné bolesti neznámého původu.

Dávkování: Podle potřeby použijte 1–2 čípky za den.

Způsob použití: Vyjměte čípek z hliníkové fólie a zašpičatělým koncem napřed jej zcela zasuňte do konečníku. Pokud je čípek příliš měkký na zavedení, před vyjmutím z fólie jej ponořte na chvíli do studené vody, dokud nezíská pevnější konzistenci. Po zavedení čípku si umyjte ruce.

Varování: Určeno k jednorázovému použití. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti nebo alergie na nějakou z obsažených složek. V případě přetrvávající zácpy je důležité se poradit s lékařem a vyloučit jiné příčiny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nemělo by se používat často a ne déle než 7 dní. Dlouhodobější užívání je možné na doporučení lékaře, který řádně posoudil Váš zdravotní stav. Při zácpě je nejprve vhodné upravit jídelníček a obohatit jej dostatečným množstvím vody a vlákniny. O použití výrobku během těhotenství či kojení se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. O použití během těhotenství a kojení nejsou k dispozici žádné studie.

Uchovávání: Skladujte na suchém místě při teplotách v rozmezí od 4 °C do 30 °C, mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte slunečnímu záření. Datum spotřeby je platné pouze pro správně skladovaný produkt v neporušeném obalu.

Datum spotřeby: Datum spotřeby je uvedené na obalu. Nepoužívejte po překročení tohoto data.

Balení: 12 čípků pro dospělé po 2500 mg.

Vysvětlení symbolů

	Zdravotnický prostředek
	Číslo šarže
	Jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně
	Datum použitelnosti

	Skladujte při teplotě v rozmezí 4 až 30 °C
	Nevyhazujte mimo nádoby určené ke sběru komunálního odpadu
	Výrobce
	Čtěte návod k použití



New.Fa.Dem. S.r.l.
Via Ferrovia dello Stato, 1 Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)
Itálie

Distributor:
Cemio Switzerland, s. r. o.
Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha 4, Česko

Poslední revize návodu: 04/2024



GLYCERIN
careGlycerínové
čapíky pre dospelých 2500 mg

Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod k použitiu!

Cemio GLYCERIN care je jednorazová zdravotnícka pomôcka vo forme čapíkov na báze glycerolu, používaný na uľahčenie vyprázdňovania čriev pri zápche.

Ako pôsobí? Glycerol má mechanický prehŕňavý účinok, založený na vťahovaní vody do stolice, ktoré vedie k jej zvlhčeniu a zmäkčeniu a následnému rozpo-
hybovaniu čriev a vyprázdneniu.

Indikácie: Cemio GLYCERIN care sa používa na krátkodobú liečbu občasnej zápchy.

Účinná zložka: Glycerol.

Kedy sa nesmie používať? Nepoužívajte čapíky na liečbu akútnej bolesti brucha ani iné bolesti nezná-
meho pôvodu.

Dávkovanie: Podľa potreby použite 1–2 čapíky za den.

Spôsob použitia: Vyberte čapík z hliníkovej fólie a zašpičatým koncom napred ho úplne zasuňte do konečníka. Pokiaľ je čapík príliš mäkký na zavedenie, pred vybratím z fólie ho ponorte na chvíľu do studenej vody, kým nezíska pevnejšiu konzistenciu. Po zavedení čapíka si umyte ruky.

Varovanie: určené na jednorazové použitie. Nepou-
žívajte v prípade precitlivenosti alebo alergie na nejakú
z obsiahnutých zložiek. V prípade pretrvávajúcej zá-
pchy je dôležité poradiť sa s lekárom a vylúčiť iné príčiny.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemalo by sa používať
často a nie dlhšie ako 7 dní. Dlhodobejšie užívanie je
možné na odporúčanie lekára, ktorý riadne posúdil Váš
zdravotný stav. Pri zápche je najprv vhodné upraviť je-
dálničiek a obohatiť ho dostatočným množstvom vody
a vlákniny. O použití výrobku počas tehotenstva či do-
jčenia sa poraďte so svojim lekárom či lekárnikom. O
použití počas tehotenstva a dojčenia nie sú k dispozícii
žiadne štúdie.

Uchovávanie: Skladujte na suchom mieste pri tep-
lotách v rozmedzí od 4 °C do 30 °C, mimo dosahu
zdrojov tepla a nevystavujte slnečnému žiareniu. Dátum
spotreby je platný iba pre správne skladovaný produkt
v neporušenom obale.

Dátum spotreby: Dátum spotreby je uvedený na
obale. Nepoužívajte po prekročení tohto dátumu.

Balenie: 12 čapíkov pre dospelých po 2500 mg.

Vysvetlenie symbolov

	Zdravotnícka pomôcka
	Číslo šarže
	Jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane
	Dátum použiteľnosti

	Skladujte pri teplote v rozmedzí 4 °C až 30 °C
	Nevyhádzajte mimo nádoby určenej na zber komunálneho odpadu
	Výrobca
	Čítajte návod na použitie



New.Fa.Dem. S.r.l.
Via Ferrovia dello Stato, 1 Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA)
Taliansko

Distribútor:
Cemio Switzerland, s. r. o.
Tomičkova 2144/1,
148 00 Praha 4, Česko

Posledná revízia návodu: 04/2024

