

Hyaluron Nasenspray

Gebrauchsinformation  – Bitte sorgfältig lesen!

 **Mivolis Hyaluron Nasenspray** ist zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut besonders gut geeignet. Hyaluronsäure haftet gut auf der Schleimhaut und bildet einen langanhaltenden Schutzfilm. Darüber hinaus besitzt sie ein wesentlich höheres Wasserbindungsvermögen als Meersalz. **Mivolis Hyaluron Nasenspray** enthält keine Konservierungsstoffe und kein Treibgas. Durch trockene Raumluft, Rauch, Staub, Wind, Kälte oder als Folge eines Schnupfens kann es zum „Austrocknen“ der Nasenschleimhaut und zum Verlust der natürlichen Feuchtigkeit kommen. Eine „trockene Nase“ wird nicht nur als unangenehm empfunden, sondern erleichtert Viren und Bakterien, sich in der Schleimhaut einzunisten. Als Folge können Infektionen ausgelöst werden. **Mivolis Hyaluron Nasenspray** hilft, die Nasenschleimhaut nachhaltig anzufeuchten, und erleichtert so eine ungehinderte Nasenatmung sowie Reinigung der Nase.

Gebrauchsinformation: Verschlusskappe abnehmen. Vor der ersten Anwendung die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und die Pumpe 1- bis 2-mal betätigen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel entsteht. Danach ist **Mivolis Hyaluron Nasenspray** gebrauchsfertig.

 **Dosieranleitung:** 3-mal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen. Bei Bedarf kann die Dosis entsprechend erhöht werden. Hyaluron Nasenspray kann über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und die Pumpe 1- bis 2-mal pro Nasenloch betätigen. Nach jeder Anwendung den Sprühkopf abwischen und Verschlusskappe wieder aufsetzen. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionsübertragungen sollte jedes Spray nur von einer Person benutzt werden.

Zusammensetzung: Natriumhyaluronat 0,4mg/ml, Natriumchlorid, Phosphatpuffer. Vegan.

Sonstige Hinweise: Nach Anbruch 6 Monate verwendbar. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise: Bei einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Nasenspray oder Nasentropfen sollte ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten eingehalten werden, wobei **Mivolis Hyaluron Nasenspray** immer zuletzt verabreicht werden sollte. Nicht anwenden, wenn Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz oder Rötung auftreten. Im Allgemeinen verschwinden diese Symptome rasch nach Beendigung der Anwendung. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller zu melden. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Stand der Information: 02-2023 SP-F-051