


USZKA MALUSZKA  
HIGIENA

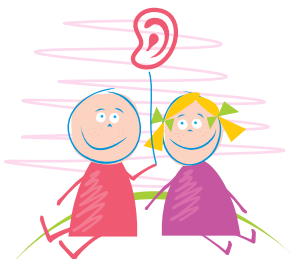

**HIGIENA  
USZKA MALUSZKA**  
WYRÓB MEDYCZNY



**3m+**

15ml e

**CaheyPharma**



**Skład:** squalan,  
olej z oliwek,  
olejek miętowy



NIE ZAWIERA  
WODY

W 100% naturalne składniki

**Bez konserwantów  
Bez wody**



Sposób użycia, dawkowanie,  
przeciwwskazania  
w załączonej ulotce




Przechowywać  
w pozycji pionowej  
w temperaturze 15-25°C

Wyłącznie do użytku zewnętrznego



**HIGIENA  
USZKA MALUSZKA**  
WYRÓB MEDYCZNY

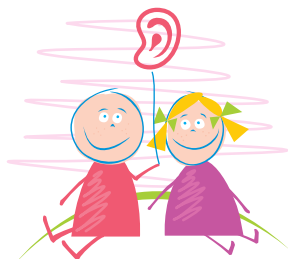

**3m+**

15ml e

**CaheyPharma**



W 100% naturalny spray  
do rozpuszczania i usuwania woskowiny  
uszej dodatkowo nawilżający kanał  
słuchowy, zapobiegający ponownemu  
gromadzeniu się woskowiny

**ZASTOSOWANIE**

**OCZYSZCZANIE Z WOSKOWINY**

- ułatwia usuwanie korków woskowinowych
- pomaga zapobiegać powstawaniu korków woskowinowych
- wspomaga naturalny proces samoczyszczania ucha z woskowiny

**BABYCAP**

- nie wylewa się z uszu
- nie wymaga przepłukiwania
- może być stosowany w każdej pozycji



WYTWÓRCA: CAPEYPHARMA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
01-684 Warszawa, ul. Klaudyńny 28c



**PRODUKT POLSKI**

**www.caheypharma.com**

**CaheyPharma**

**LOT**



5 1902020 672159



**LOT** NA SPÓDZIE OPAKOWANIA

[www.capeypharma.com](http://www.capeypharma.com)





## BABYCAP HIGIENA USZKA MALUSZKA

### SPRAY DO USUWANIA WOSKOWINY USZNEJ

Wyrób medyczny

#### Czym jest woskowina uszna?

Woskowina, zwana inaczej woskiem usznym, stanowi naturalną wydzielinę gruczołów ucha. Nadmierna ilość wosku może wywołać niepożądane efekty, takie jak osłabienie słuchu, dyskomfort, ból, kaszel.

Osłabienie słuchu występuje gdy skumulowane złoży woskowiny blokują kanał uszny ograniczając lub uniemożliwiając łatwy dostęp fal dźwiękowych do błony bębenkowej. Dyskomfort lub ból mogą wystąpić gdy nadmiar woskowiny uciska błonę bębenkową. Kaszel może się pojawić w przypadku, gdy czop woskowiny stymuluje nerwy wspólne dla kanału usznego oraz gardła, wywołując uczucie "łaskotania w gardle."

#### Wskazania i działanie:

BABYCAP to w 100% naturalny spray do rozpuszczania i usuwania woskowiny usznej dodatkowo nawilżający kanał słuchowy, zapobiegający ponownemu gromadzeniu się woskowiny, łączący w sobie cechy mechanicznego związku myjącego oraz cechy wspomaganie procesu samooczyszczania uszu z woskowiny.

#### Zastosowanie:

##### OCZYSZCZANIE Z WOSKOWINY

- ułatwia usuwanie korków woskowinowych
- pomaga zapobiegać ponownemu powstawaniu korków woskowinowych
- wspomaga naturalny proces samooczyszczania uszu z woskowiny

Preparat do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3 miesiąca życia.

#### Sposób użycia i dawkowanie:

Może być stosowany w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej



#### Przy korku woskowinowym

Rozpylić 1-2 dawki do ucha od 3 do 5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia woskowiny.

W trudnych przypadkach należy wyprostować kanał uszny pociągając delikatnie płatek uszny do góry i do tyłu głowy, aby substancja przedostała się do wewnętrznych części kanału ucha (patrz rysunek obok)

#### Profilaktycznie:

- Rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha od 1 do 2 razy w tygodniu jako zapobieganie tworzenia się korków woskowinowych.
- Rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio przed kąpielą w basenie lub innym akwenu wodnym.

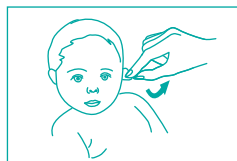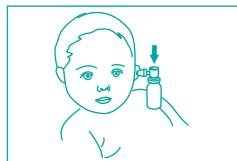

Pojemność: 15 ml

Forma sprayu z aplikatorem równomiernie rozpyla preparat i precyzyjnie dawkuje. Kanał ucha nie wymaga przepłukiwania po zastosowaniu preparatu.

#### SKŁAD:

Squalan, olej z oliwek, olejek miętowy

- BABYCAP nie zawiera wody.
- BABYCAP nie zawiera konserwantów.
- BABYCAP zawiera naturalne składniki.



#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- nie stosować u pacjentów z perforacją błony bębenkowej
- unikać kontaktu z oczami
- u małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem
- przechowywać z dala od dzieci
- nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu
- nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
- po użyciu końcówkę aplikatora umyć pod bieżącą wodą

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



#### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w pozycji pionowej.

Po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami



#### CAPEYPHARMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
01-684 Warszawa, ul. Klaudydy 28c  
[www.capeypharma.com](http://www.capeypharma.com)



Pojemność: 15 ml

Data sporządzenia instrukcji użytkowania: Wydanie 3 z 06.2014