

SPRAY
WODA MORSKA
do nosa



SPRAY WODA MORSKA do nosa

WYRÓB MEDYCZNY



DO CODZIENNEJ
HIGIENY NOSA
U NIEMOWŁĄT I DZIECI

30 ml e

CapeyPharma



**BABYCAP
WODA MORSKA DO NOSA W SPRAYU**
Izotoniczny roztwór wody morskiej
z mikroelementami

SKŁAD:
Baby cap to w 100% naturalny, izotoniczny
roztwór wody morskiej bogaty
w mikroelementy bez konserwantów
i gazu sprężającego.
Woda morską, Woda oczyszczoną.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO



Sposób użycia, dawkowanie,
przeciwwskazania w załączonej ulotce



Przechowywać w pozycji pionowej



CAPEYPHARMA
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k
01-684 Warszawa, ul. Klaudyjny 28c

1m+

WWW.BABYCAP.PL

CapeyPharma



SPRAY WODA MORSKA do nosa

WYRÓB MEDYCZNY



DO CODZIENNEJ
HIGIENY NOSA
U NIEMOWŁĄT I DZIECI

30 ml e

CapeyPharma



**BABYCAP
WODA MORSKA DO NOSA W SPRAYU**
Izotoniczny roztwór wody morskiej
z mikroelementami

WSKAZANIA:

- Delikatne oczyszczanie nosa w ramach
codziennej higieny
- Oczyszczanie niedrożnego nosa w przebiegu
infekcji górnych dróg oddechowych

**Odpowiedni dla niemowląt
od 1 miesiąca życia i dzieci**

- Łagodny strumień
- Łatwy w użyciu w każdej pozycji



WWW.BABYCAP.PL

CapeyPharma

LOT



5 902020 672166

**IZOTONICZNY
ROZTWÓR WODY MORSKIEJ
Z MIKROELEMENTAMI.**

Do codziennej higieny nosa u dzieci
i niemowląt od 1 miesiąca życia.

SKŁAD:

Woda morską, Woda oczyszczona.

SPOSÓB UŻYCIA, DAWKOWANIE:

Końcówkę aplikatora włożyć do nosa
i krótko nacisnąć.

Stosować od 1 do 5 razy dziennie
do każdego otworu nosowego
w zależności od potrzeby.



Przechowywać w pozycji pionowej



**SPRAY
WODA MORSKA
do nosa**

WYRÓB MEDYCZNY

30 ml e

1m+

CapeyPharma



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Stosować wyłącznie do użytku
zewnętrznego.

Unikać kontaktu z oczami.

Przechowywać z dala od dzieci.

Nie stosować u osób uczulonych
na składniki preparatu.

Nie stosować po upływie
terminu ważności.

Po użyciu końcówkę aplikatora
umyć pod bieżącą wodą.



CAPEYPHARMA

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k

01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 28c

www.capeypharma.com

www.babycap.pl

NA SPODZIE OPAKOWANIA



98X40



BABYCAP SPRAY

WODA MORSKA do nosa

WYRÓB MEDYCZNY



Izotoniczny roztwór wody morskiej z mikroelementami do codziennej higieny nosa u dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia.

Nos, będący początkowym odcinkiem układu oddechowego, pełni wiele funkcji fizjologicznych.

Do jego zadań należy m. in. oczyszczanie wdychanego powietrza, nawilżanie oraz ogrzewanie zanim dotrze ono do pęcherzyków płucnych. Wyścielająca nos błona śluzowa stanowi pierwszą barierę ochronną przechwytyjąc i unieszkodliwiając zanieczyszczenie powietrza czy alergenów wziewne.

Dzięki delikatnej technologii spray BabyCap pozwala udrożnić i oczyścić nos, zapobiegając rozwojowi odczynu zapalnego błony śluzowej tylnej części gardła. Kontakt pomiędzy roztworem i błoną śluzową nosa pozwala na absorpcję soli mineralnych oraz elementów soli morskiej.

WSKAZANIA:

- Delikatne oczyszczanie nosa w ramach codziennej higieny
- Oczyszczanie niedrożnego nosa w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych

Pojemność: 30 ml

WWW.BABYCAP.PL

SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE:

Babycap może być stosowany w każdej pozycji.
Odpowiedni aplikator delikatnie dozjuje produkt
do otworów nosowych niemowląt i dzieci.



**Końcówkę aplikatora włożyć do nosa i krótko nacisnąć.
Stosować od 1 do 5 razy dziennie do każdego otworu nosowego
w zależności od potrzeby.**



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Stosować wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać z dala od dzieci.
Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Po użyciu końcówkę aplikatora umyć pod bieżącą wodą.
Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i do
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

SKŁAD:

BABYCAP to w 100% naturalny, izotoniczny roztwór wody morskiej
bogaty w mikroelementy.
Preparat nie zawiera konserwantów.
Woda morska
Woda oczyszczona



Przechowywać w pozycji pionowej

Po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



**CAPEYPHARMA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k**
01-684 Warszawa, ul. Klaudyń 28c



Pojemność: 30 ml

WWW.BABYCAP.PL

Data sporządzenia instrukcji używania: Wydanie 2 z 01.2015.