

HIPERTONIC SPRAY

Wyrób medyczny

WSKAZANIA

Do stosowania przy zapaleniu błon śluzowych nosa i zapaleniu zatok

Usuwa wydzielinę zapalną

DZIAŁANIE

Hipertonic Spray zawiera hipertoniczny roztwór chlorku sodu, który przynosi ulgę poprzez:

- głębokie oczyszczenie i udrożnienie nosa
- normalizację środowiska błon śluzowych nosa
- wspomaganie usuwania wydzieliny nosowej
- wymywanie kurzu, pyłków i innych alergenów
- nawilżenie błon śluzowych.

Dawkowanie i sposób użycia

Aby głęboko oczyścić i udrożnić: przechyl głowę, włóż końcówkę do nozdrza, naciśnij ją i trzymaj naciśniętą do momentu, kiedy płyn zacznie wypływać z nosa.

Aby nawilżyć: naciśnij przez 1-2 sekundy, po krótkim czasie wydmuchaj nos. Anatomiczna końcówka umożliwia użycie sprayu pod każdym kątem.

Hipertonic Spray nie uszkadza błon śluzowych, może być stosowany tak długo, jak to potrzebne.

Hipertonic Spray jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Hipertonic Spray może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Hipertonic Spray może być stosowany z innymi środkami, w tym lekami. W przypadku stosowania innego aerozolu do nosa w tym samym czasie, Hipertonic Spray należy zaaplikować w pierwszej kolejności.

SKŁAD

3% roztwór chlorku sodu, bufor fosforanowy, woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera konserwantów.

Szczelna zastawka daje pewność sterylności zawartości opakowania aż do ostatniej dawki.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na spodzie opakowania.

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

OSTRZEŻENIA

Użycie przez więcej niż jedną osobę nie zalecane ze względów higienicznych. Po każdym użyciu wyczyścić końcówkę w wodzie z mydłem i przepłukać gorącą wodą.

Nie stosować do iniekcji. Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po użyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia czy gorących powierzchni. Zakaz palenia. Pojemnik pod ciśnieniem, może wybuchnąć po podgrzaniu.

EAN kod opakowania jednostkowego 5902143819332

DYSTRYBUTOR:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa,

tel.: +48 (71) 714 94 00