

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
110 mm x 160 mm

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	U-SRZL-2200-000_COC_2		
Preparat/ Product:	STARAZOLIN PODRAŻNIONE OCZY		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 130 x 180 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Trebuchet MS 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	xxx g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	XXX
Kolorystyka/ Colours:	 Pantone 2767 U	Opracował/ Prepared by:	27.01.2015 D. Kasiewicz

Starazolin® Podrażnione Oczy

**Krople do oczu na bazie wyciągu z bławatka
10 ml, do wielokrotnego użytku**

Starazolin Podrażnione Oczy to sterylny nawilżający roztwór do oczu o fizjologicznym pH, na bazie hialuronianu sodu, wyciągu z bławatka oraz wyciągu z rumianku.

10 ml roztworu **Starazolin Podrażnione Oczy** znajduje się w butelce wielokrotnego stosowania i zawiera chlorek benzalkonium jako substancję konserwującą.

Wyciąg z bławatka wykazuje właściwości nawilżające oraz łagodzące zaczerwienienie oczu. Rumianek posiada właściwości kojące i odświeżające. Stosowany jest w celu łagodzenia bólu i zaczerwienienia śluzówki oczu. Hialuronian sodu ma działanie nawilżające i tworzy warstwę, która chroni śródbłonek rogówki przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz niekorzystnym wpływem środowiska.

Starazolin Podrażnione Oczy jest wskazany dla osób cierpiących z powodu dyskomfortu (bolesność, zaczerwienienie) spowodowanego przez czynniki środowiskowe (klimatyzacja, nadmierne promieniowanie słoneczne, wiatr, dym, zanieczyszczenia, sól, woda morską), długą pracę przy monitorze komputera, naukę lub w przypadku długotrwałego używania soczewek kontaktowych.

Instrukcja używania

Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.

- W celu użycia należy otworzyć butelkę i wkropić 2-3 krople do każdego oka.
- Po zastosowaniu natychmiast zamknąć butelkę. Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia.
- Krople należy stosować kilkakrotnie w ciągu dnia.
- Przed zastosowaniem należy wyjąć soczewki kontaktowe oraz odczekać 15 minut po zastosowaniu przed ponownym ich założeniem.

Skład

Wodny wyciąg z kwiatów bławatka, wodny wyciąg z koszyczka rumianku, hialuronian sodu, dwuzasadowy heptahydrat fosforanu sodu, jednozasadowy dwuhydrat fosforanu sodu, Polisorbat 80, chlorek sodu, chlorek benzalkonium, woda do iniekcji.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego na śluzówkę oka.

Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.

Nie należy stosować produktu na soczewki kontaktowe.

Nie należy stosować produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone lub było niedokładnie zamknięte przed pierwszym otwarciem.

Podczas aplikacji nie należy dotykać opakowaniem oka ani żadnej innej powierzchni. W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej zewnętrznej warstwy oka (rogówki), mogą pojawić się mętne plamki na rogówce, spowodowane odkładaniem się wapnia. Nie należy stosować produktu jeśli wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik.

Nie należy stosować produktu po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu należy zaprzestać jego używania i skonsultować się z lekarzem.

Po zastosowaniu natychmiast zamknąć butelkę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie

Butelka wielokrotnego stosowania zawierająca 10 ml roztworu.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia.

Termin ważności

36 miesięcy od daty produkcji w nienaruszonym opakowaniu. Nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na butelce i kartoniku.



COC Farmaceutici s.r.l.

Via Modena, 15

40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo)

Włochy

Dystrybutor: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pełplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska



0373

WYROB MEDYCZNY

STERILE	A
---------	---

Data ostatniej aktualizacji 12/2010