

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA : STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO

Opaska na kostkę podtrzymuje uszkodzone tkanki (stawy, ścięgna, torebkę stawową, więzadło). Efekt kompresji zapewniony przez opaskę wspiera funkcje więzadeł i przez to odciąża stawy. Ponadto opaska doskonale pomaga zapobiegać nietypowym ruchom.

Wskazania

Uszkodzenie ścięgna Achillesa, gips, skręcenie, zwichnięcie, uraz po zabiegach operacyjnych, na uszkodzenia więzadła w celu zapewnienia ucisku, zniwelowania bólu i obrzęku oraz zabezpieczeniu przeciwko urazom.

Materiał

Wersja neoprenowa: 100% Neopren, obszycie 100% z poliester

Wersja siatkowa: 85% poliamid, 15% spandex

Model termoplastyczny: zewnętrzna powierzchnia zrobiona z termoplastycznego materiału, wewnętrzna powierzchnia zrobiona z gąbki laminowanej obustronnie nylonem

Zakładanie produktu

Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiedni dla obwodu kostki.

Rozepnij rzepy, jeśli są

Noś produkt tak, jakbyś nosił skarpetkę

W razie otwartych ran upewnij się, że rany pozostaną odkryte.

Dla modelu z podporą więzadła upewnij się, że wzmocnienia zabezpieczą kostkę przed zewnętrzną i wewnętrzną rotacją.

Dla modelu termoplastycznego upewnij się, że ustawiłeś stopę w pozycji zalecanej przez lekarza

Wersja z dodatkową taśmą: umieść stopę pośrodku taśmy, a jej końce poprowadź do góry i na krzyż i połącz z tyłu kostki na kształt cyfry 8.

Upewnij się, że nie zawiązasz taśmy zbyt ciasno, gdyż to może doprowadzić do odcięcia krążenia krwi do stopy.

Zapnij rzepy jeśli dostępne.

Ważne informacje i ostrzeżenia

Niniejszy przedmiot został zaprojektowany do użytku przez jednego pacjenta.

Nie zapinaj rzepów zbyt ciasno, gdyż to może doprowadzić do odcięcia krążenia krwi do stopy.

W razie zdrętwienia, poluzuj taśmę i usuń jeśli to konieczne. Jeśli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli chcesz dokonać niewielkich zmian w produkcie w imię komfortu lub ulgi w użyciu, poproś o wsparcie techniczne swojego lekarza lub firmę, w której zakupiłeś produkt. Nie wystawiaj przedmiotu na działanie gorąca lub otwartego płomienia. Produkt nie może być użyty w innym celu niż wymienione wskazania ani w połączeniu z innymi produktami o podobnym działaniu. Może być stosowany tylko w wymienionych wskazaniach. Użycie produktów neoprenowych musi trwać dłużej niż 3-4 godzin.

W przypadku innych materiałów użycie nie powinno przekroczyć 8 godzin, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeśli jesteś wrażliwy na ciepło, nie korzystaj z produktów wykonanych z neoprenu bez zgody lekarza.

Jeśli jesteś uczulony na lateks lub gumę, sprawdź skład materiałowy produktu i, w przypadku ryzyka podrażnienia, włóż tkaninę lub część garderoby między produkt a skórę, by chłonięła pot i wilgoć.

Używaj z zalecenia lekarza.

Instrukcja prania

Zapnij rzepy

Usuń elementy odpinane przed praniem (dodatkowe taśmy)

Pierz ręcznie w temp. 300C

Susz rozłożone na ręczniku. Nie wyżymaj.

Upewnij się przed użyciem, że produkt jest zupełnie suchy (nie prasuj!)

Wytrzyj termoplastyczny materiał mokrą szmatką.



PMT Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 79,
31-352 Kraków

