

dm
Mivolis

**Gebrauchsanweisung
für die Probenentnahme**
Bitte aufmerksam lesen

Selbsttest mit Laboranalyse Lebensmittel- Reaktion

Wichtige Informationen

Allgemeine Hinweise

- Dieses Produkt ist für die Anwendung von Personen ab 18 Jahren bestimmt.
- Die Produkte des Blutentnahmesets ausschließlich wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben verwenden.
- Bei unzureichender Betropfung (Blutmenge) ist keine Analyse möglich. Bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Rückseite beachten.
- Das Blutentnahmeset darf nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (letzter Tag des angegebenen Monats und Jahres) nicht mehr verwendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen


- Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei vorliegender Blutungsneigung, Gerinnungsstörung, der Einnahme gerinnungsbeeinflussender Medikamente, während Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Blutentnahmeset nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden.
- Die Alkoholtupfer von potenziellen Zündquellen fernhalten.
- Die Alkoholtupfer dürfen nicht in Kontakt mit Schleimhäuten und Augen kommen und von ihnen ausgehende Dämpfe sollten nicht eingeatmet werden.
- Die Lanzetten (Stechhilfen) vor Gebrauch auf Beschädigungen prüfen und die Lanzette im Fall einer Beschädigung nicht benutzen.
- Die Kappen der Lanzetten (Stechhilfen) stellen einen sterilen Schutz dar. Nicht verwenden, wenn die Kappe bereits entfernt wurde.
- Die Produkte keinesfalls mehrfach verwenden, da dies zu Infektionen und schweren Verletzungen führen kann.
- Die für die Probenaufnahme markierten Bereiche der Trockenblutkarte nicht berühren.
- Die Trockenblutkarte darf nicht in Kontakt mit anderen Flüssigkeiten kommen.
- Eventuell auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Zusammensteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Inhalt

1 Karte zur Testaktivierung



1 Gebrauchsanweisung

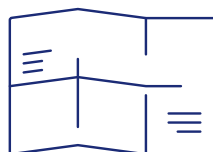

2 Alkoholtupfer

Hersteller


B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
DE-34212 Melsungen



2 Lanzetten (Stechhilfen)

Hersteller

Owen Mumford Ltd
Brook Hill, Woodstock
UK-Oxfordshire OX20 1TU

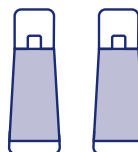

EC-Rep


Owen Mumford GmbH
Alte Häge 1
DE-63762 Großostheim



2 Kompressen

Hersteller


PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
DE-89522 Heidenheim

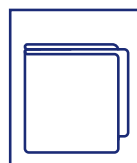

1 Trockenblutkarte in 1 Klarsichthülle

Hersteller der Trockenblutkarte


Ahlstrom Germany GmbH
Niederschlag 1
DE-09471 Bärenstein

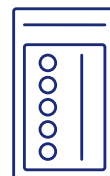

2 Pflaster

Hersteller

BSN medical GmbH
Schützenstr. 1–3
DE-22761 Hamburg

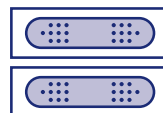

1 Rücksendeumschlag

Der Versand ist ausschließlich über Briefkästen oder Postfilialen der Deutschen Post innerhalb von Deutschland möglich und ist kostenfrei.



Zweckbestimmung

Der **Mivolis Selbsttest mit Laboranalyse Lebensmittel-Reaktion** dient der Entnahme und dem Versand einer kapillaren Blutprobe auf einer Trockenblutkarte für die Laboruntersuchung von allergenspezifischen IgE-Antikörpern. Die kapillare Blutentnahme erfolgt mit der Lanzette (Stechhilfe). Die Einstichstelle wird mittels Alkoholtupfer desinfiziert und mit einer Komresse und einem Pflasterstreifen versorgt. Die Anwendung kann in Eigenanwendung stattfinden. Für *in vitro*-Diagnosezwecke.

Zusammensteller der Behandlungseinheit:

MVZ Labor Krone GmbH
Siemensstraße 40
DE-32105 Bad Salzuflen
www.laborkrone.de

Stand der Information: 07/2025

	Inhalt ausreichend für 1 Anwendung
	Vor Nässe schützen
	Vor Hitze (Sonneneinstrahlung) schützen
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
	Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung
	Einwegprodukt, nicht wiederverwenden
IVD	In-vitro-Diagnostikum
MD	Medizinprodukt
UDI	Eindeutige Produktidentifizierung

CE	CE-Kennzeichnung
STERILE R	Sterilisiert mit Bestrahlung
STERILE EO	Sterilisiert mit Ethylenoxid
	Einfaches Sterilbarriersystem
	Biologische Risiken
	Nicht erneut sterilisieren
LOT	Chargennummer
	Haltbarkeitsdatum (JJJ-MM)



DMLMRE07.25V02



Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Rückseite



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG


SCHRITT 1

Vor der Probenentnahme den Test mithilfe der Beschreibung auf der beiliegenden Karte zur Testaktivierung im Online-Portal aktivieren.



SCHRITT 2

Alle enthaltenen Utensilien entnehmen und zur Vorbereitung auf eine flache, saubere Fläche legen.

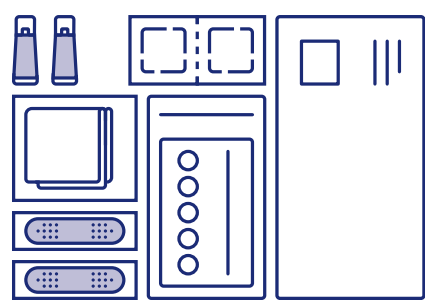


SCHRITT 3

Hände gut mit warmem Wasser und Seife waschen.




SCHRITT 4

Die Trockenblutkarte entnehmen und bereitlegen, ohne das Innere der Kreise zu berühren. Die Klarsichthülle nicht entsorgen, da sie noch für den Versand benötigt wird.

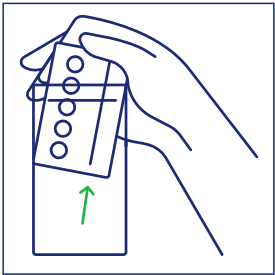


SCHRITT 5

Die Lanzette (Stechhilfe) durch Drehen der weißen Kappe öffnen und diese abziehen. Die geöffnete Lanzette bereitlegen.

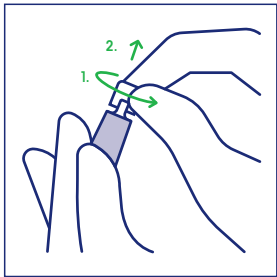


SCHRITT 6

Um die Durchblutung anzuregen, den Arm 5–10 Mal kreisen und anschließend den Mittel- oder Ringfinger mit leichtem Druck von der Handinnenfläche zur Fingerspitze massieren.

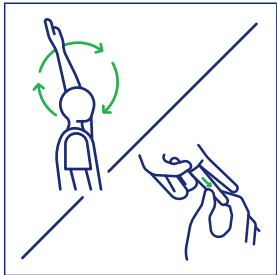


SCHRITT 7

Mittel- oder Ringfinger mit dem beiliegenden Alkoholtupfer reinigen und ca. 15 Sekunden warten, bis es getrocknet ist.

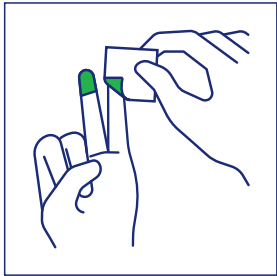

SCHRITT 8

Die Kompresse öffnen und bereitlegen. Die Hand auf eine feste Unterlage legen und die Lanzette (Stechhilfe) leicht seitlich gegen die Fingerspitze des Mittel- oder Ringfingers drücken. Die Lanzette löst durch Druck automatisch aus. Jede Lanzette kann und darf nur einmal verwendet werden.

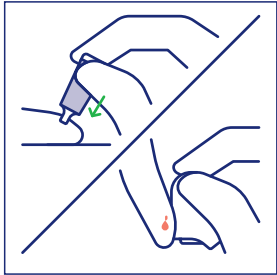


Nach dem Einstich die Arme herabhängen lassen, um den Blutfluss anzuregen. Bei Bedarf den Finger mit leichtem Druck von der Handinnenfläche zur Fingerspitze massieren.

Den ersten Blutstropfen mit der Kompresse abwischen.

SCHRITT 9


Die folgenden Blutstropfen auf die vorgedruckten Kreise der Trockenblutkarte tropfen. Alle 5 Kreise der Trockenblutkarte füllen. Dafür das Blut auf der Vorderseite auftragen. Die Kreise sollten gut gefüllt und durchgezogen sein, sodass die Karte auf Vorder- und Rückseite etwa gleich aussieht.

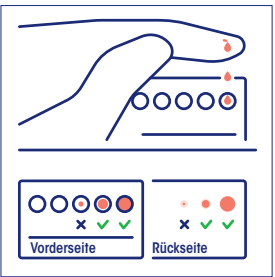

Bei Bedarf den Finger leicht massieren, um den Blutfluss weiter anzuregen. Sofern notwendig die Durchführung mit der zweiten Lanzette (Stechhilfe) an einem anderen Finger wiederholen. Bereits getrocknetem Blut darf kein neues Blut mehr hinzugefügt werden. Die Einstichstelle anschließend ggf. mit der beiliegenden Kompresse und dem Pflaster versorgen.


SCHRITT 10

Die Trockenblutkarte mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen. Dazu die Karte schräg an einen Gegenstand lehnen. Die Trockenblutkarte nicht ins Sonnenlicht legen und keine Heizquelle zur Trocknung verwenden.

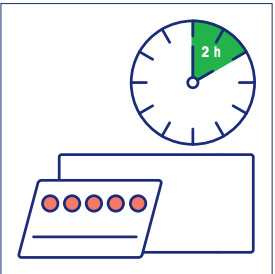

SCHRITT 11

Die getrocknete Trockenblutkarte in die Klarsichthülle geben und verschließen, ohne das Innere der Kreise zu berühren.

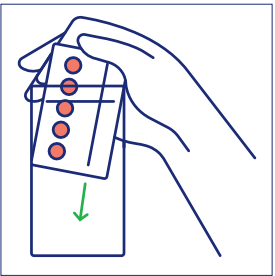

SCHRITT 12

Die Trockenblutkarte in der Klarsichthülle in den Rücksendeumschlag geben. Der Versand ist ausschließlich über Briefkästen oder Postfilialen der Deutschen Post innerhalb von Deutschland möglich und ist kostenfrei.

Die Probe noch am selben Tag mit der Post versenden, spätestens am Folgetag.

