

Gebrauchsanweisung

SCHOLL 2in1 Hühneraugen Set Pflaster

PZN: 17240501

Medizinprodukt

Wodurch zeichnet sich dieses Produkt aus?

Das Scholl 2 in 1 Hühneraugen Set ist eine Komplettlösung zur Entfernung von Hühneraugen und zur Linderung dadurch verursachter Schmerzen.

Achtung: Nicht anwenden, wenn Sie unter Diabetes, schweren Durchblutungsstörungen oder Nervenschäden leiden, Sie gegen Aspirin oder einen der Inhaltsstoffe empfindlich sind oder die umgebende Haut entzündet oder verletzt ist. Holen Sie sich ärztlichen Rat, wenn Sie das Produkt länger als 2 Wochen anwenden oder wenn Kinder unter 16 Jahren behandelt werden sollen oder wenn das Produkt in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet wird. Wenden Sie das Wirkstoffpflaster möglichst nur auf dem Hühnerauge an, da es bei Kontakt mit der umliegenden Haut zu Hautreizungen oder Ausschlägen kommen kann. In einem solchen Fall entfernen Sie das Produkt und unterbrechen die Anwendung vorübergehend. Wenn die Hautreizung verschwunden ist, wenden Sie ein neues Pflaster nur auf dem Hühnerauge an. Falls andere Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendung: Anwendung der Pflaster auf sauberer und trockener Haut.

Schritt 1 Behandlung des Hühnerauges: Entfernen Sie das Wirkstoffpflaster vom Trägerpapier und kleben Sie es direkt auf das Hühnerauge. Decken Sie die betroffene Stelle mit dem Schutzpflaster ab.
Schritt 2 Zusätzliche Druckschmerzlinderung: Entfernen Sie das Druckschutz Schaum-Pflaster vom Trägerpapier und kleben Sie es auf die betroffene Stelle. Fest andrücken, damit das Pflaster sicher haftet. Dieses Pflaster kann auch bei Druckbeschwerden an anderen Stellen des Fußes angewendet werden.

Warnhinweise: außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25°C aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung des Kartons beschädigt ist. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.