

 **Manufacturer:** Suretex
Limited 31/1 Moo 4,
Suratthani – Thakurapha
Road, Tambon Khao Hua
Kwai, Amphur Phunphin,
Suratthani 84130, Thailand

 **Importer:** LifeStyles Europe
SAS 4-6 Rue des Chaffours
CS 70006 95095 Cergy Cedex,
Frankreich

 **Country of origin** - INDIA

 **Distributor:** MAPA GmbH,
Industriestraße 21-25, 27404
Zeven, Germany,
www.billy-boy.de

Artikel-Nr. 11.520.186

 **Medizinprodukt**
(EU) No. 2017/745

 **EC REPRESENTATIVE:** SKWell
Belgium, Lenniksebaan 451/35
1070 Anderlecht, BELGIUM

Rev. 11 (2024-10)

CE 2797
ISO 23409:2011

BILLY BOY®

GEBRAUCHSHINWEISE



VORSICHT

Gefahr bei Wiederverwendung von Kondomen: Kreuzinfektion, Undichtigkeit durch Reinigung, Verlust der Gleitfähigkeit und eine erhöhte Gefahr des Reißens.

Alle diese Faktoren erhöhen das Risiko einer Schwangerschaft oder der Übertragung einer Geschlechtskrankheit.

Bei manchen hochempfindlichen Personen können Inhaltsstoffe dieser Kondome allergische Reaktionen auslösen.

Tritt eine Reizung oder ein Brennen auf, stellen Sie den Gebrauch dieses Kondoms ein und suchen Sie einen Arzt bzw. eine Ärztin auf. Verwenden Sie keine auf Öl basierten Gleitmittel, wie Massageöl, Körperlotionen, Babyöl, Butter, Margarine, Vaseline usw., da Polyisopren-Kondome durch ölhaltige Substanzen beschädigt werden können.

Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein.

Vor der Anwendung von Gleitmitteln bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten.

Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrutscht oder reißt.

Nicht vaginale Verwendung von Kondomen, d.h. Oralsex (da die Zähne das Kondom beschädigen können) und Analsex (da es an natürlicher Gleitfähigkeit mangeln kann), erhöht das Abrutsch- und Beschädigungsrisiko.

Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten.

Werden im Bereich von Penis und Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen.

Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) oder Partner bzw. Partnerinnen immer ein neues Kondom verwenden.

WICHTIGE HINWEISE

BILLY BOY SKYN Kondome

Verwendungszweck: zur Empfängnisverhütung und zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

 **Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen.**

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

Kondome kühl , trocken  und vor Hitze  und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum  - nach Ablauf sollte das Kondom nicht mehr verwendet werden!


BILLY BOY SKYN Kondome sind aus Polyisopren hergestellt.

BILLY BOY SKYN Kondome sind frei von Naturkautschuklatex und geeignet für Menschen mit einer bekannten oder vermuteten Latexallergie. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat.

Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Die richtige Verwendung von Kondomen senkt das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft und Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten wie HIV/AIDS. Kondome bieten einen wirksamen Schutz vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Aber wie bei allen Verhütungsmitteln kann ein 100%iger Schutz nicht garantiert werden. Falls Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben oder falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie bitte schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt bzw. eine Ärztin auf.  Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde. Genießt das Haut-an-Haut Gefühl mit BILLY BOY SKYN Hautnah.

Das latexfreie Material Polyisopren ist besonders anschlussfähig und lässt euch das einmalige Hautnah-Gefühl erleben.

1.

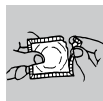

Die Siegelfolie vorsichtig an einer der Zacken öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie

das Kondom beschädigen. Ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder die Verpackungsfolie (☒) beschädigt, nicht das darin befindliche Kondom, sondern ein anderes mit einer unbeschädigten Verpackungsfolie verwenden. Verwenden Sie nie mehr als ein Kondom auf einmal.

2.



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht, um Raum für das Auffangen des Spermas zu schaffen. Im Reservoir eingeschlossene Luft erhöht das Risiko einer

Beschädigung des Kondoms. Ziehen Sie die Vorhaut komplett zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners bzw. der Partnerin kommt. Prüfen Sie die korrekte Position des Kondoms. Rollen Sie es dann bis zur Peniswurzel ab. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

3.

Ziehen Sie nach der Ejakulation und vor Erschlaffung das Glied vorsichtig aus der Vagina. Zur Vermeidung eines Auslaufens des



Spermas halten Sie das Kondom an der Basis fest. Drücken Sie den Penis nach unten und entfernen Sie das Kondom.

4.

Verknöten Sie das gebrauchte Kondom, wickeln Sie es in ein Papiertuch und entsorgen Sie es hygienisch. Nicht in die Toilette werfen. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch (ⓧ) bestimmt!

HINWEISSYMBOL



Gebrauchsanleitung



Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!



Kondome nicht verwenden, wenn die Verpackungsfolie beschädigt ist. Gebrauchshinweise beachten



Kondome vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Kondome trocken lagern



Kondome kühl lagern



Haltbarkeitsdatum



Chargennummer Kondome



Chargennummer Packung



Medizinprodukt



Artikelnummer Packung



Hersteller



Herstellerland - INDIA



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft



Importer



Distributor