




## Lieber Gluco-test Plus Anwender:

Vielen Dank für Ihre Wahl unseres Gluco-test Plus Blutzuckermesssystems. Mit dem Gluco-test Plus haben Sie sich für ein benutzerfreundliches Blutzuckermesssystem entschieden, welches Ihnen auch die Möglichkeit bietet, Blutproben von alternativen Körperstellen (AST) zu gewinnen. Besondere Vorteile bietet auch die Teststreifen-Auswurf-Funktion sowie die Erinnerungsfunktion zum Einstellen definierter Messzeiten. Diese Kurzinformation soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen Gluco-test Plus vertraut zu werden.

### Bestandteile zur Blutzuckermessung

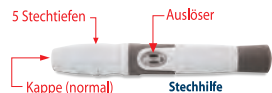

 TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION  
B1-7F., No. 127, Wugong 2nd Road,  
Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)  
[www.taidoc.com](http://www.taidoc.com)

 MedNet GmbH  
Borkstraße 10, 48163 Münster, Deutschland

**Vertrieb:** Aristo Pharma GmbH  
Wallenroder Straße 8-10  
13435 Berlin, Deutschland

CE 0123

# Gluco-test *Plus* <sup>+</sup> TD-4230

## STARTERSET ZUR BLUTZUCKERMESSUNG

*In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung*



## Schnellanleitung



40012640/6

# 1. Messung des Blutzuckers



**1-1** Waschen Sie sich Ihre Hände gründlich und trocknen Sie diese sorgfältig ab. Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose und verschließen Sie diese dann fest.




**1-2** Führen Sie den Teststreifen in das Gerät ein. Das Gerät ist eingeschaltet. Folgender Dialog erscheint blinkend im Display: CHK und  Umgebungs-temperatur , "d" und die Codenummer.



**1-3** Stellen Sie sicher, dass die Codenummer im Display mit der Codenummer auf der Teststreifendose übereinstimmt.



**1-4** Wenn  in der Anzeige blinkt, lassen Sie bitte Ihr Blut an der Aufnahmeöffnung des Teststreifens einsaugen, bis die Messung selbstständig beginnt.



**1-5** Das Ergebnis Ihrer Blutzuckermessung wird angezeigt, nachdem das Messgerät bis auf 0 zurückgezählt hat. Der Messwert wird automatisch im Messgerät gespeichert.








**1-6** Entfernen Sie den Teststreifen durch Betätigen des seitlichen Streifenauswurf-schiebers oder direkt durch Ziehen mit der Hand. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab. Bitte entsorgen Sie Lanzetten und Teststreifen gemäß den geltenden Vorschriften.

# 2. Anzeigen des Ergebnisses


Ihr Ergebnis wird folgendermaßen angezeigt.

Lo / **low**  /  / **high**  / **KETONE?** / **H** 

Lo	low 	
erscheint, wenn Ihr Ergebnis unterhalb der Messgrenze von < 20 mg/dL (1.1mmol/L) liegt	erscheint, wenn Ihr Ergebnis zwischen 20-69 mg/dL (1.1-3.8 mmol/L) liegt	erscheint, wenn Ihr Ergebnis im Normbereich 70-119 mg/dL (3.9-6.6 mmol/L) liegt
high 	KETONE?	H 
erscheint, wenn Ihr Ergebnis bei 120 mg/dL und mehr (6.6 mmol/L) liegt	erscheint zusammen mit high  , wenn der Wert 240 mg/dL (13.3 mmol/L) und mehr beträgt	wird angezeigt, wenn Ihr Ergebnis einen Wert von > 600 mg/dL (33.3mmol/L) übersteigt

## Warnung:

"Lo" oder "low  " Symbol zeigt Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) an. Sie sollten unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

"H", "high  " oder "KETONE?" Symbol zeigt Hyperglykämie (hoher Blutzucker) an. Sie sollten unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.