

KOD EAN:

5060359483218

NAZWA:

Prezerwatywy Ribs&Dots/Intensity 12 szt.

OPIS:

Ribs&Dots / Intensity to prezerwatywy lateksowe, nawilżane o specjalnej fakturze. Połączone prążki i wypustki zapewniają większe doznania. Dzięki anatomicznemu kształtowi idealnie przylegają.

Długość 190 mm, Szerokość 52 mm, Grubość 65 mikronów

Stosowanie prezerwatywy nie gwarantuje 100% ochrony przed ciążą, wirusem HIV, czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. W razie wątpliwości należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Zawartość lub obecność lateksu z gumy naturalnej.

UWAGA:

Prezerwatywy wykonane z lateksu z gumy naturalnej mogą powodować reakcje alergiczne , w tym wstrząs anafilaktyczny.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Sprawdź czy folia w którą opakowana jest prezerwatywa jest nienaruszona, że nie minęła jeszcze data ważności. W razie uszkodzenia użyj nowej prezerwatywy. Uszkodzoną prezerwatywę wyrzuć.
- Rozerwij foliowe opakowanie wzdłuż jednego boku, obchodząc się ostrożnie z prezerwatywą, również podczas wyjmowania jej z opakowania, aby uniknąć jej uszkodzenia paznokciami, biżuterią itp. Wyjmij prezerwatywę z jej pojedynczego opakowania foliowego zaraz przed użyciem.
- Aby pomóc w zapobieganiu ciąży oraz chorobom przenoszonym drogą płciową, prezerwatywę należy nałożyć na członka w stanie erekcji przed jego kontaktem z innymi częściami ciała partnerki lub partnera.
- Chwyć końcówkę prezerwatywy kciukiem i palcem wskazującym, upewniając się, że prezerwatywa jest w odpowiedniej pozycji do rozwinięcia (zrolowana krawędź zewnętrzna powinna znajdować się na zewnątrz). Pozbądź się powietrza z wnętrza prezerwatywy, ściskając jej czubek, co pozwala zmniejszyć ryzyko jej rozerwania podczas użycia.
- Używając drugiej ręki, rozwiń prezerwatywę w dół na całej długości członka, przez cały czas trzymając za czubek. Upewnij się, że prezerwatywa pozostaje podczas seksu cały czas na swoim miejscu. Jeśli czujesz, że prezerwatywa się zsuwa, zatrzymaj się i sprawdź jej prawidłowe umiejscowienie. Jeśli prezerwatywa nadmiernie ściska członka, należy sprawdzić, gdyż może to spowodować jej pęknięcie.
- Wyjmij członka zaraz po wytrysku, przytrzymując prezerwatywę mocno na swoim miejscu przy jego nasadzie. Prezerwatywę można zdjąć wyłącznie po całkowitym wyjęciu członka. Po użyciu pozbądź się prezerwatywy w sposób higieniczny. Zawij ją w chusteczkę i umieść w pojemniku na odpady. **Nie należy splukiwać jej w toalecie.**

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYWANIA PRODUKTU

Prezerwatyw nie należy używać po raz drugi. Służą one do jednorazowego użytku, a w razie ponownego użycia, istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia lub infekcji. Zwiększa się również ryzyko pęknięcia.

Z prezerwatywą należy zawsze obchodzić się ostrożnie, wyjmując ją z opakowania w taki sposób aby uniknąć jej uszkodzenia paznokciami, biżuterią itp. Nie należy używać jeśli folia lub opakowanie są uszkodzone.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie dodatkowego lubrykantu, użyj lubrykantu zalecanego do stosowania z prezerwatywami, np. do prezerwatyw z lateksu z gumy naturalnej zaleca się lubrykant na bazie wody.

Należy unikać stosowania lubrykantów na bazie olejów, takich jak wazelina, oliwka dla dzieci, balsamy do ciała, olejki do masażu, masło, margaryna itp. gdyż są one szkodliwe dla integralności prezerwatyw lateksowych.

Prezerwatywy stosowane do seksu analnego mogą powodować zwiększone ryzyko zsunienia się lub uszkodzenia. Zaleca się użycie dodatkowego lubrykantu, jeżeli środek nawilżający do pochwy nie jest wystarczający lub do seksu analnego, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia lub zsunienia się prezerwatywy. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać informacje na temat kompatybilności leków o zastosowaniu miejscowym, które mogą wejść w kontakt z prezerwatywą. Jeżeli dojdzie do seksu bez zabezpieczenia, albo twoja metoda antykoncepcji zawiedzie, skontaktuj się z poradnią zdrowia seksualnego lub lekarzem, w celu uzyskania porady w sprawie antykoncepcji awaryjnej, najlepiej nie później niż w ciągu 72 godzin.

Użycie prezerwatywy podczas stosunku oralnego zwiększa ryzyko uduszenia lub zadławienia.

Prezerwatywa to wyrób medyczny do użytku dla dorosłych mężczyzn i kobiet. Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik lub pacjent.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Trzymać z dala od dzieci.

Noszenie prezerwatyw w portfelu, tylnej kieszeni, torebce lub w podobnym miejscu, nie jest wskazane.