

Gebrauchsanweisung

SCHOLL Hühneraugen Pflaster

PZN: 11136145

Medizinprodukt

Wodurch zeichnet sich dieses Scholl Produkt aus?

Die Scholl Hühneraugen Pflaster dienen zur gezielten Behandlung mit medizinischen Wirkstoffen und der sicheren und wirksamen Entfernung von Hühneraugen.

Was sind die Vorteile?

- Durch das 2-Pflaster-System wird die umgebende gesunde Haut geschützt
- Das extra weiche Druckschutzpflaster polstert, schützt und lindert den Schmerz
- Klebstoff dermatologisch getestet

Achtung: Nicht anwenden, wenn:

- Sie unter Diabetes, schweren Durchblutungsstörungen oder Nervenschaden leiden.
- Sie gegen Aspirin oder einen der Inhaltsstoffe empfindlich sind.
- die umgebende Haut entzündet oder verletzt ist.
- Sie schwanger sind oder stillen.

Nicht auf gesunder Haut anwenden. Nicht länger als zwei Wochen anwenden, sofern nicht ärztlich verordnet. Nicht bei Kindern unter 16 Jahren anwenden, sofern nicht ärztlich verordnet.

Warnung:

- Bei Anwendung auf gesunder Haut kann es zu Hautreizungen oder Ausschlägen kommen. In einem solchen Fall entfernen Sie das Produkt und unterbrechen die Anwendung vorübergehend. Wenn die Hautreizung verschwunden ist, wenden Sie ein neues Pflaster nur auf dem Hühnerauge an.
- Falls irgendwelche anderen Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie wende ich das Produkt an?

Auf sauberer und trockener Haut verwenden. Das Wirkstoffpflaster vom Trägerpapier abziehen und mit der Klebeseite zur Haut direkt auf das Hühnerauge kleben. Das Druckschutzpflaster darüber kleben. Behandlung täglich wiederholen, bis das Hühnerauge entfernt ist.

Warnhinweise: Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25°C aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung des Kartons beschädigt ist. Nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Die Wirkstoffpflaster enthalten: Salicylsäure 40%w/w, Polyvinylalkylether, Titandioxid, Paraffinöl, 4,4'-Thio-Bis-2-Tert-Butyl-5-Methyphenol, rotes Eisenoxid, schwarzes Eisenoxid. Salicylsäure wirkt keratolytisch, das heißt, sie weicht die Hühneraugen auf.

Scholl & Diabetes:

Dieses Produkt ist für Diabetiker und für Menschen mit schlechter Durchblutung leider NICHT GEEIGNET.