

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

EMSAN®

KINDERNASENSPRAY

Medizinprodukt

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
Sie haben sich für ein hochwertiges, bewährtes Medizinprodukt entschieden!

Es enthält:

- Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung zäher, festsitzender Sekrete und Neutralisierung entzündlicher Stoffwechselprodukte
- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung
- Natürliches Quellsalz zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten 1 g Mineralsalzmischung, gereinigtes Wasser (Zusammensetzung der Mineralsalzmischung in g/kg: Natürliches Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20).

Emsan® Kindernasenspray ist garantiert frei von Konservierungsstoffen, Treibgasen und allergieauslösenden pflanzlichen Substanzen. Aufgrund der Zusammensetzung ist Emsan® Kindernasenspray für Schwangere und Stillende geeignet.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Emsan® Kindernasenspray befeuchtet, reinigt und befreit die Nasenschleimhaut z.B. bei Schnupfen sowie trockener und/oder verstopfter Nase (z. B. durch Klimaanlage, Heizungsluft oder vermehrter Staub- und Schmutzbelastung).

Dosierungsanleitung:

Je nach Bedarf mehrmals täglich bei Kleinkindern (ab 1 Jahr) einen, bei Schulkindern zwei und bei Erwachsenen mehrere Sprühstöße Emsan® Kindernasenspray in jedes Nasenloch geben. Dabei ist die Flasche möglichst senkrecht zu halten. Wir empfehlen eine Verwendung des Emsan® Kindernasensprays bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Vor der ersten Benutzung des Emsan® Kindernasensprays Schutzkappe abnehmen und 2–3× pumpen, um die Luft aus der Sprühpumpe zu entfernen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich nach jedem Gebrauch den Sprühkopf trocken zu wischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen. Sollten Sie Emsan® Kindernasenspray längere Zeit nicht benutzt haben, sprühen Sie den ersten Sprühstoß zur Reinigung des Adapters in die Luft. Betätigen Sie das Spray nach Anbruch regelmäßig, um einem Verstopfen der Pumpe durch Auskristallisieren von Salz entgegen zu wirken.

Gegenanzeigen:

Bisher keine bekannt.

Anwendungsdauer:

Verwenden Sie Emsan® Kindernasenspray nicht länger als 30 Tage ohne Unterbrechung. Nach einer Unterbrechung von mindestens 2 Tagen kann Emsan® Kindernasenspray wieder verwendet werden. Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsan® Kindernasenspray nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann es lediglich in Einzelfällen zu leichten Reizerscheinungen wie Kribbeln und Brennen in der Nase und leichtem Nasenbluten kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie Sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Bitte beachten:

Emsan® Kindernasenspray wurde ohne Konservierungsmittel in einem Spezialsprühsystem abgefüllt, daher kann es nach Anbruch bis zu 6 Monate angewendet werden.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheiten sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden.

Emsan® Kindernasenspray sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums verwendet werden. Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.

Darreichungsform und Packungsgröße:

20 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase.

Erläuterung der Symbole:

Gebrauchsanweisung beachten



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten



Hersteller



Medizinprodukt



Für Kinder unzugänglich aufbewahren



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

Stand der Information: 2022-08



Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, Mainzer Str. 1c, DE-56130 Bad Ems
www.emcur.com
service@emcur.com

NOT27304V02 · 532454 3 DA

