

# Gebrauchsanweisung

---

EAN 4006671023023

## Scholl Druckstellen Pflaster Kurotex

Das Scholl Druckstellen Pflaster Kurotex lindert Druckschmerzen sofort und schützt vor Reibung.

- Ideal für eng anliegende Schuhe
- Kann auf jeden Teil des Fußes zugeschnitten werden
- Kann z.B. als Fersen- oder Zehenkissen auch direkt in den Schuh geklebt werden.
- Klebstoff dermatologisch getestet

Wenn eine stärkere Polsterung gewünscht wird, empfehlen wir Scholl Druckstellen Pflaster Extra Weich.

**Anwendung:** Auf sauberer und trockener Haut anwenden. Täglich Pflaster wechseln. Pflaster auf die gewünschte Größe zuschneiden und das Trägerpapier abziehen. Aufkleben und fest andrücken.

**Hinweise:** Nur äußerlich anwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht auf entzündeter oder verletzter Haut anwenden. Bei übermäßigen Beschwerden oder Reizungen Anwendung abbrechen und Pflaster entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Nicht zu fest anziehen, nicht um Zehen oder Fuß binden. Kühl und trocken ohne direkte Sonneneinwirkung