

## Das medizinische Hautpflegeprogramm mit dem pH-Wert 5,5

Für empfindliche und problematische Haut bietet sebamed ein komplettes Programm mit dem pH-Wert 5,5:

- Seifenfreie, sanfte Produkte für die Hautreinigung
- Pflegende Duschprodukte
- Schützende und regenerierende Körper- und Gesichtspflegeprodukte
- Schonende Shampoos für gesunde Kopfhaut und schönes Haar
- Milde und zuverlässige Deoroller und -zerstäuber

## Die sebamed Info Hotline beantwortet gerne Ihre Fragen zur Haut- und Körperpflege

Tel. 06742 / 900191  
Fax 06742 / 900230

E-mail: [info@sebamed.de](mailto:info@sebamed.de)  
[www.sebamed.de](http://www.sebamed.de)



Das Produkt ist nach dem  
Öffnen 12 Monate haltbar.

### Symbole

	Hersteller		Bei 2 - 30°C lagern		Indikator für die Konformität des Produktes mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU
	Verwendbar bis		Von Sonnenlicht fernhalten		Geschätzte Inhaltsmenge unter Berücksichtigung zulässiger statistischer Abweichungen
	Chargencode		Änderungsstand der Packmittel	50 ml e	
	Artikelnummer		Recycling-Symbol mit Material-Kennzeichnung		

**Sebapharma®** GmbH & Co. KG  
WISSENSCHAFT FÜR GESUNDE HAUT  
[www.sebamed.de](http://www.sebamed.de)  
56154 Boppard • **Made in Germany**

# sebamed®

## Wund- und Heilsalbe

### Intensivschutz bei oberflächlichen Hautverletzungen oder bei Wundsein

Auch oberflächliche Verletzungen der Haut können ohne äußeren Schutz aufreißen oder sich ausweiten. sebamed Wund- und Heilsalbe schützt die verletzte Haut vor äußeren Einflüssen, pflegt sie und fördert so die Regeneration intakter Haut.

Verletztes Hautgewebe hat keinen natürlichen Schutz gegen Reiz- und Schadstoffe sowie Krankheitserreger. sebamed Wund- und Heilsalbe bildet einen Film auf der Wunde und hilft damit, Reizungen im Wundbereich zu vermeiden.

Pflaster und Verbände schützen die verletzte Stelle zwar vor Schmutz, Stößen und Reibung, können aber ohne zusätzliche Salbe mit der Wunde verkleben. sebamed Wund- und Heilsalbe verhindert das Verkleben des Pflasters oder Verbandes und ermöglicht einen schmerzfreien Wechsel bei ungestörtem Heilungsprozess.

Die neue Haut, die vom Rand her über die Wundfläche wächst, ist anfangs noch sehr dünn, empfindlich und verletzlich. Die Pflegestoffe in sebamed Wund- und Heilsalbe schützen sie und begünstigen den endgültigen Wundverschluss. Gleichzeitig halten sie die zarte neue Haut geschmeidig, so dass weniger Spannungsgefühl entsteht.



471301



REV: 2019-05-09



Sebapharma GmbH & Co. KG  
Binger Straße 80, 56136 Boppard

## Zur Wundbehandlung bei oberflächlichen Verletzungen – sebamed Wund- und Heilsalbe

Mit einem einzigartigen **3-Komponenten-Wirksystem** pflegt sebamed Wund- und Heilsalbe die verletzte Haut intensiv, überzieht sie mit einem Schutzfilm und unterstützt die natürliche Wundheilung. Geeignet bei alltäglichen Bagatelverletzungen der Haut durch Abschürfungen, Schnitte, Wundreiben, Blasen, kleinflächigen und oberflächlichen Verbrennungen und Verbrühungen.

Darüber hinaus fördern pflanzliche Öle, wie Jojobaöl und Sheabutter, die Hautregeneration und helfen, Austrocknung und das Entstehen von Wundrissen zu vermeiden.

**sebamed Wund- und Heilsalbe ist nach modernen dermatologischen Gesichtspunkten entwickelt und enthält keine hautreizenden Substanzen. Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Auch für Kinder geeignet.**

### 3-Komponenten-Wirksystem

- **Dextran\*** bildet einen schützenden Film auf der verletzten Hautstelle, unter dem der natürliche Heilungsprozess ohne Reizungen und Verzögerungen optimal ablaufen kann.
- Feuchtigkeits spendendes **Panthenol** schafft heilungsfördernde Bedingungen in der Wunde.
- Der **pH-Wert 5,5** unterstützt den natürlichen Schutzeffekt des hauteigenen Säureschutzmantels.

\* hochverträglicher patentierter Naturstoff (CN 1515675 A) aus der Medizin



Medizinprodukt

## Beachtenswertes und Pflegetipps bei Verletzungen

Blutungen tragen zur Reinigung der Wunde bei und werden durch die Blutgerinnung auf natürliche Weise rasch gestoppt. Deshalb sollten leichte Blutungen von Wunden nicht unterbunden werden. Nur bei stark blutenden Wunden Gegenmaßnahmen ergreifen!

Stark verschmutzte Wunden können mit frischem, sauberem Wasser oder speziellen Wundreinigungstüchern gereinigt und mit geeigneten Desinfektionsmitteln behandelt werden.

In Biss- und Kratzwunden sowie Stich- oder Schnittwunden mit Messern oder spitzen, scharfkantigen Gegenständen, die mit Schmutz oder Fleisch in Kontakt waren, können sich Krankheitserreger befinden. Eine ärztliche Behandlung ist ratsam. Schlecht heilende, stark nässende oder eitrige Wunden sollten ebenfalls vom Arzt untersucht und behandelt werden.

### Anwendung von sebamed Wund- und Heilsalbe

- Auf saubere, nicht stark blutende Wunden ca. 2 bis 5 mm dick direkt auf die verletzte Haut und den umliegenden Bereich auftragen
- Kann in Verbindung mit einem Verbandsstoff, der die Wunde zusätzlich vor äußeren Einflüssen schützt, angewendet werden
- Verschmutzte Wunden erst sorgfältig reinigen und dann die Salbe auftragen
- Bis zum vollständigen Abheilen mehrmals täglich auftragen
- Zur Reinigung der Haut im Bereich von Wunden eignet sich sebamed Flüssig Wasch-Emulsion. Beim Waschen und Abtrocknen keinen Druck und keine Reibung auf die Wundstelle ausüben

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.