

ANWENDUNG:

1. Zahnspange abspülen und zusammen mit einer Zahnspangenreinigungstablette in ein Glas geben.
2. Röhrchen mit der Verschlusskappe wieder fest verschließen.
3. Das Glas mit warmem Wasser füllen, bis die Zahnspange vollständig bedeckt ist. KEIN KOCHENDES WASSER VERWENDEN, DA DIESES DIE ZAHNSPANGE BESCHÄDIGEN KANN. 10 Minuten einwirken lassen.
4. Zahnspange vor dem Einsetzen abbürsten und unter klarem Wasser gründlich abspülen.
5. Reinigungslösung entsorgen und Glas ausspülen.

Rev. 06.04.2020