



# REGELSCHMERZ-PFLASTER

## Medizinprodukt

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.**

### **Verwendungszweck:**

Wärmetherapie zur vorübergehenden Linderung von krampfartigen Regelbeschwerden.

**Modell:** 12 Stunden

### **Gebrauchsanweisung:**

1. Vor Gebrauch den Beutel aufreißen.
2. Von dem Wärmepad das Papier abziehen, um die Klebeseite freizulegen. Die Klebeseite auf die schmerzende Stelle auf der Unterwäsche auftragen. Das Wärmepad fest und ohne Knicke andrücken, sodass sich die Wärmezellen nicht überlappen. Nicht unmittelbar auf die Haut kleben.
3. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
4. Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine Tragedauer von 12 Stunden. Nicht länger als 12 Stunden tragen. Nicht länger als 12 Stunden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums tragen.
5. Das Wärmepad nicht falten oder knicken, da dies das Risiko von Verbrennungen erhöht.
6. Nur für den einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch entsorgen.

### **Gegenindikationen:**

SOS Regelschmerzpflaster sollte nicht von Personen verwendet werden, die gegenüber extremen Temperaturen unsensibel sind, wie z. B. Personen mit Kreislaufproblemen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut. Bei der Behandlung von Kindern ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

### **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:**

Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Kleinkindern und Tieren aufbewahren. Nicht in der Mikrowelle erwärmen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Wegwerfprodukt. Dieses Produkt kann bei Personen mit empfindlicher Haut oder bei falscher Verwendung Juckreiz, Hautrötungen oder leichte Verbrennungen verursachen. Nicht während des Schlafs tragen. Überprüfen Sie während der Verwendung regelmäßig Ihre Haut. Fragen Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Herzkrankheiten, rheumatische Arthritis leiden oder schwanger sind. Sollten Sie Hautirritationen oder Verbrennungen bemerken, entfernen Sie das Produkt umgehend. Jede Zelle enthält Eisen, das beim Verschlucken schädlich sein kann. Wenn Sie etwas verschluckt haben, waschen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und verständigen Sie den Giftnotruf.

Wenn der Inhalt des Wärmepads mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt, sofort mit Wasser ausspülen. Das Produkt niemals in der Mikrowelle erwärmen und nicht versuchen, es erneut aufzuwärmen, da die Wärmekissen Feuer fangen könnten. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Bestimmungen.

### **Während der Verwendung dieses Produkts:**

Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig auf Anzeichen von Verbrennungen oder Blasen. Sollten Sie diese feststellen, beenden Sie die Verwendung. Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, beenden Sie die Verwendung. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus. Um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden, entfernen Sie das Produkt, bevor Sie sich jeglicher Formen von MRT (Magnetresonanztomographie) unterziehen.



Lieber Kunde, wenn Sie dem QR-Code folgen, gelangen Sie zu einem Fragebogen zu dem von Ihnen gekauften Produkt. Über eine Teilnahme würden wir uns freuen.

### Nicht verwenden:

- wenn das Wärmepad undicht ist und/oder das Pflaster beschädigt oder gerissen ist.
- länger als 12 Stunden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums.
- in Kombination mit Schmerzsalben, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- bei ungesunder, geschädigter oder verletzter Haut.
- auf Bereichen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden aufgetreten sind.
- an Körperstellen, an denen Sie keine Wärme spüren.
- in Kombination mit anderen Wärmequellen.
- bei Personen, die das Produkt nicht selbstständig entfernen können, einschließlich Kinder, Kleinkinder und manche ältere Menschen.
- bei Personen, die nicht in der Lage sind, alle Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

### Wann Sie die Verwendung beenden und einen Arzt aufsuchen:

Bei Schmerzen, die sich verschlimmern oder für mehr als 7 Tage anhalten.

Bei Unwohlsein, Verbrennungen, Schwellungen, Ausschlägen oder sonstigen anhaltenden Hautveränderungen an der Tragestelle.

### Transport und Aufbewahrung:

Das Produkt kann bei Raumtemperatur in trockener und gut gelüfteter Umgebung gelagert und transportiert werden.

### Hauptmaterialien und Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

### Verfallsdatum:

3 Jahre

**Inhalt:** 2 Pflaster (20 x 11 cm)



### Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft

Prolinx GmbH, Brehmstraße 56  
D-40239 Düsseldorf



### Vertrieb:

DISTRICON GmbH  
Bessie-Coleman-Straße 13  
D-60549 Frankfurt



### Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd  
No. 6-10, A5,  
Shandong International  
Tech Park, South Waihuan Road,  
Linyi, 276017 Shandong,  
P. R. China

**Werk:** Wenlv Healthcare Park,  
No.18, Zhenbei Road, Xinyi city,  
221400 Jiangsu, P. R. China

CE 0197

**Stand der Information:** 06.2024

### Bedeutung der Symbole auf Packung:



Gebrauchsanweisung beachten



Eindeutige Geräteidentität



Medizinprodukt



Herstellungsdatum



Trocken lagern



Nicht wiederverwenden



Vor Sonnenlicht schützen



Achtung, halten Sie sich bei der Verwendung an die Gebrauchsanweisung




Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Verfallsdatum



Chargennummer

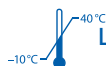

Lagertemperatur