

**MADE IN
GERMANY**



MAPA GmbH
Industriestraße 21-25
27404 Zeven, Germany
www.billy-boy.de



CE 0197

Mat.-Nr. 11.520.187
Rev.10 (2024-11)

EN ISO 4074

BILLY BOY®

DU&ICH
by BILLY BOY.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ZWECKBESTIMMUNG:

Kondome aus Naturkautschuklatex für den Penis zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Infektionskrankheiten.

ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE:

- Kondome kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Kondome sind aus Naturkautschuklatex hergestellt und können eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen.
- Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Sollten dennoch Beschwerden oder Reizungen auftreten, verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.
- Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum - nach Ablauf das Kondom nicht mehr verwenden!
- Bei richtiger Anwendung (s. Gebrauchsanweisung) unterstützen BILLY BOY Kondome bei der Vermeidung von Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitserregern. Jedoch kann kein Verhütungsmittel den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten zu 100 % garantieren.
- Werden im Bereich von Penis und/oder Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Zäpfchen, Salben, Gele etc.) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen und beachten Sie die jeweiligen Gebrauchshinweise.
- **Vorsicht:** Intimschmuck kann das Kondom beschädigen.
- Falls das Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf.

- Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.
- Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.
- Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen.
- Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) und des Sexualpartners ein neues Kondom verwenden.
- Wenn Sie beim Gebrauch merken, dass das Kondom abrischt oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.
- Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z. B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette, Ausnahme Silikonöle) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es leicht zerreißen.
- Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das Kondom abrischt oder reißt.
- Bei analer Verwendung sollten Sie immer ein zusätzliches geeignetes Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern (z. B. BILLY BOY Gleitgel).
- Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

Persönliche und anonyme Beratung zum Thema safer sex und Verhütung: www.liebesleben.de


BEACHTEN SIE BITTE DIE NACHSTEHENDEN HINWEISSYMBOLS

	ACHTUNG! Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durchlesen!
	Nicht wiederverwenden! Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!
	Kondome nicht verwenden, wenn die Verpackungsfolie beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten.
	Vor Sonnenlicht und Hitze schützen.
	Kondome trocken aufbewahren.
	Verwendbar bis

	Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex hergestellt und können bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen.
	Chargennummer Kondom
	Chargennummer Packung
	Medizinprodukt
	Artikelnummer Packung
	Hersteller

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. AUFREISSEN

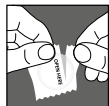

Die Siegelolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle („OPEN HERE“) öffnen. Die Siegelolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen.

Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten

Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden! Diese Kondome werfen!

2. VORSPIEL



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper

des Partners kommt. Lässt sich das Kondom nicht leicht



abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall das Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung.

3. NACHSPIEL



Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, um ein Abrutschen des Kondoms zu verhindern. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfallimer, nicht in die Toilette.

BILLY BOY®

DU&ICH
by BILLY BOY