

130 mm

© Visiomas roztok k uchovávaní tvrdých čoček, 240 ml. Poloxamer v pufovaném, sterilním, izotonickém roztoku. Visiomas roztok k uchovávaní tvrdých kontaktních čoček je určen pro každodenní dezinfekci, zvlhčení a k uchovávaní tvrdých kontaktních čoček. **Použití:** Před manipulací s kontaktní čočkou si důkladně umyjte a osušte ruce. Očistěte kontaktní čočku přípravkem Visiomas čistící roztok na tvrdé kontaktní čočky a opláchněte ji roztokem k uchovávaní tvrdých kontaktních čoček nebo fyziologickým roztokem. Vložte každou čočku do jedné z obou příhradek pouzdra na kontaktní čočky naplněné čerstvým roztokem k uchovávaní, a pouzdro lehce protřepte několik sekund. Pro dostatečnou dezinfekci nechte čočky v roztoku alespoň 4 hodiny nebo přes noc. Před použitím čočky znovu opláchněte roztokem k uchovávaní, v případě citlivých očí fyziologickým roztokem. Po použití vyprázdněte pouzdro, opláchněte ho roztokem k uchovávaní a nechte vyschnout. Roztok v pouzdře vyměňte denně nebo po každém použití a udržívejte pouzdro čisté. **Upozornění/Bezpečnostní opatření:** Nepoužívejte, pokud chybí bezpečnostní kroužek, je poškozený nebo pokud uplynula doba použitelnosti. Po otevření nepoužívejte déle než 60 dní. Láhev po použití dobře uzavřete. Čočky lze uchovávat v roztoku až 30 dní. Roztok nekonsumujte a uchovávejte mimo dosah dětí. Nedotýkejte se kapátka. Čočky a pouzdro nikdy neoplachujte vodou z vodovodu. Skladujte při pokojové teplotě. Použitý roztok vždy zlikvidujte. Informujte výrobce a příslušné úřady o závažných incidentech. Pro bezpečnou likvidaci výrobku nebo jeho zbytků nejsou nutná žádná zvláštní opatření. **Kontraindikace:** Použití očních léků konzultujte s lékařem, zejména při prvním použití nebo změně systému péče. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti nebo alergie na některou ze složek. V případě nesnášenlivosti vyjměte čočky a informujte lékaře nebo optika. **Složení:** Izotonický pufovaný vodný roztok s chloridem sodným, kyselinou boritou, boraxem dekahydrátem, dinatrium-edetátem, poloxamerem, polyvinylpyrrolidonem, hydroxypropylmethylcelulózou a 0,0002 % polyhexanidem. Vyrobeno ve Španělsku. Distributor pro ČR: dm drogerie markt s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, ČR.



- Flasche recyclebar
- Richtig entsorgen:
www.dm.de/recycling

► Hergestellt in Spanien

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich: dm drogerie markt
AT-5071 Wals, www.dm.at

eyelike GmbH, Ringstraße 12
DE-63543 Neuberg, Deutschland

Medizinprodukt



4 069559 000301


- Desinfizieren
- Befeuchten
- Aufbewahren

Für harte Kontaktlinsen 240 ml



Visiomas

HART- LINSEN AUFBEWAH- RUNGSLÖSUNG

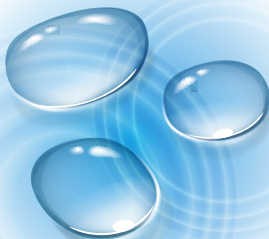

Mit Visiomas das Leben
von der schönsten Seite sehen

Visiomas Hartlinsen-Aufbewahrungslösung zum täglichen Desinfizieren, Befeuchten und Aufbewahren von formstabilen (harten) Kontaktlinsen. Für die Anwendung nach der Reinigung mit dem Visiomas Hartlinsenreiniger. Pflegt die Kontaktlinse und reduziert die Gefahr von Infektionen.

Anwendung: Vor dem Anfassen der Kontaktlinse Hände gründlich waschen und trocknen. Kontaktlinse mit dem Visiomas Hartlinsenreiniger reinigen und mit der Aufbewahrungslösung oder einer Kochsalzlösung abspülen. Jeweils eine Linse in eines der beiden mit frischer Aufbewahrungslösung gefüllten Fächer des Kontaktlinsenbehälters legen und Behälter ein paar Sekunden leicht schütteln. Um eine ausreichende Desinfektion zu gewährleisten, sollten die Linsen mind. 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung liegen. Linsen vor Gebrauch erneut mit der Aufbewahrungslösung, bei empfindlichen Augen mit Kochsalzlösung abspülen. Behälter nach Gebrauch leeren und vor dem Trocknen mit der Aufbewahrungslösung ausspülen. Die Lösung im Behälter täglich bzw. nach Gebrauch erneuern und Behälter sauber halten.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen: Nicht verwenden, wenn der Sicherheitsring fehlt, beschädigt oder Verfallsdatum überschritten ist. Nach Öffnen nicht länger als 60 Tage verwenden. Flasche nach Gebrauch gut verschließen. Die Linsen können bis zu 30 Tage in der Lösung aufbewahrt werden. Nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tropföffnung nicht berühren. Linsen und Behälter niemals mit Leitungswasser abspülen. Bei Zimmertemperatur lagern. Nach jeder Reinigung die gebrauchte Flüssigkeit entsorgen.

Interaktionen/Kontraindikationen/Nebenwirkungen: Verwendung von Augenmedikamenten mit dem Augenarzt abstimmen, dies empfiehlt sich auch bei erstmaligem Benutzen oder Wechsel des Pflegesystems. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit/Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei Unverträglichkeiten Kontaktlinsen herausnehmen und Arzt/Optiker informieren.

Zusammensetzung: Gepufferte isotonische wässrige Lösung mit Natriumchlorid, Borsäure, Borax Decahydrat, Diantriumedetat, Poloxamer, Polyvinylpyrrolidon, Hydroxypropylmethylcellulose und Polyhexanid 0,0002 %. Letzte Revision: 2024/10/09

Informieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde bei Auftreten von schwerwiegenden Vorfällen.



152 mm