

60 mm

# dm **Visionmax** **KOMBI** **LÖSUNG** **SUPER**

Mit extra Proteinentfernung



- Reinigen
- Desinfizieren
- Aufbewahren

Für weiche Kontaktlinsen **60 ml**

## Mit Visionmax das Leben von der schönsten Seite sehen

All-in-one-Lösung zum Reinigen, Desinfizieren und Aufbewahren von weichen Kontaktlinsen. Mit extra Proteinentfernung. Beugt neuen Ablagerungen vor.

**Anwendung:** Hände gründlich waschen und trocknen. Kontaktlinse aus dem Auge nehmen, auf die Handfläche legen, auf beiden Seiten mit der Lösung beträufeln und mit der Fingerspitze 20 Sek. sanft reiben. Beide Seiten der Linse mit der Lösung abspülen und in den mit frischer Kombilösung gefüllten Behälter legen. Behälter verschließen und leicht schütteln. Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung lassen. Die Linsen vor Gebrauch erneut mit der Kombilösung, bei empfindlichen Augen mit Kochsalzlösung, abspülen. Kontaktlinsenbehälter nach Gebrauch leeren und vor dem Trocknen mit der Kombilösung ausspülen. **Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring fehlt, beschädigt oder das Verfallsdatum überschritten ist. Nach dem Öffnen nicht länger als 90 Tage verwenden. Flasche nach Gebrauch gut verschließen. Die Kontaktlinse kann bis zu 30 Tage im geschlossenen Behälter aufbewahrt werden. Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropföffnung nicht berühren. Kontaktlinsen und Behälter niemals mit Leitungswasser abspülen. Bei Zimmertemperatur lagern. Nach jeder Reinigung die gebrauchte Flüssigkeit entsorgen. Informieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde bei Auftreten von schwerwiegenden Vorfällen. **Kontraindikationen:** Verwendung von Augenmedikamenten mit dem Augenarzt abstimmen, dies empfiehlt sich auch bei erstmaligem Benutzen oder Wechsel des Pflegesystems.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit/Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei Unverträglichkeiten Kontaktlinsen herausnehmen und Arzt/Optiker informieren. **Zusammensetzung:** Gepufferte isotonische wässrige Lösung mit Natriumchlorid, Borsäure, Borax-decahydrat, Tetranatrium-1-hydroxyethylidenbiphosphonat, Dinatriumedetat, Poloxamer, Polyvinylpyrrolidon und Polyhexanid 0,0002 %.

Letzte Revision:  
 2024/07/26

STERILE A 5203

CE 0482

MD

► Hergestellt in Spanien

Vertrieb durch:  
 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
 Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe  
[www.dm.de](http://www.dm.de)

Vertrieb in Österreich:  
 dm drogerie markt  
 AT-5071 Wals, [www.dm.at](http://www.dm.at)

eyelike GmbH, Ringstraße 12  
 DE-63543 Neuberg, Deutschland

LOT



HOPE/PET



122 mm