

Dr.Scholl's

TM

Blasenpflaster

Wie und wann sollte ich sie verwenden? Reinigen und trocknen Sie die betroffene Stelle. Stellen Sie sicher, dass die betroffene Stelle frei von Cremes und Ölen ist.

ZEHENPFLASTER



GROSSE UND KLEINE PFLASTER



Erwärmen Sie das Pflaster mit der Hand, um die anfängliche Haftung auf der Haut zu verbessern.

Das Pflaster auf der Haut belassen, bis es sich von selbst löst. Maximale Tragedauer pro Streifen: 7 Tage.

Zum Entfernen des Streifens: Vorsichtig einen Rand des Pflasters anheben und vorsichtig von der Haut abrollen.

Anwendungshinweise

Nicht auf verletzter Haut, offenen oder infizierten Wunden anwenden.

Warnhinweise

Nur zur äußeren Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden. Im Zweifelsfall an medizinische Fachkraft wenden. Bei Allergie auf Wundauflage oder ihre Bestandteile nicht verwenden.

Scholl und Diabetes

Bei Diabetes, schlechter Durchblutung oder Empfindungsstörungen in den Füßen bitte vor Selbstbehandlung einer Blase immer eine medizinische Fachkraft aufsuchen.



ÜBER
100
JAHRE
ERFAHRUNG

CE
2797

Rev 05 (04/2024)



ASO LLC, 300 Sarasota Center Blvd.,
Sarasota FL-34240, USA

EC REP

ASO Europe BV, Nijverheidstraat 48,
6681 LN Bommel, The Netherlands

78-9038276
7005151