

durex®

NATURALS

PURE

ŻEL INTYMNY

100%
NATURAL
INGREDIENTS

100ml e



Wyrób
medyczny

MD



5°C - 30°C
HDPE



500 420 43

30 mm

10 mm

1 mm

TYLKO NATURALNE SKŁADNIKI

Delikatny żel intymny wyprodukowany w 100% ze składników pochodzenia naturalnego, by odczuwać każde zbliżenie naturalnie gładko. Ponadto: ma odpowiednie pH, jest testowany dermatologicznie, bez sztucznych dodatków zapachowych i barwników.

ZANIM PRZEJDZIESZ DO GRY:

Żel jest odpowiedni do seksu waginalnego, analnego i oralnego, a także do użycia z prezerwatywami z naturalnej gumy lateksowej lub prezerwatywami polizoprenowymi. Zużyj w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

INSTRUKCJA UŻYWANIA:

Otwórz korek, delikatnie ściśnij i rozprowadź żel. W trakcie używania z prezerwatywami rozprowadź go na całej długości założonej już prezerwatywy.

KILKA OSTRZEŻEŃ:

Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Nie jest to środek antykoncepcyjny oraz nie zawiera środka plemnikobójczego. Może spowalniać ruchliwość plemników. Unikaj kontaktu z oczami, uszkodzoną skórą lub ranami. Zaprzestań użycia jeśli wystąpi podrażnienie. Skonsultuj się z lekarzem jeśli podrażnienie nie ustanie, doświadczasz ciągłej suchości pochwy, jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. **Nie używaj z prezerwatywami poliuretanowymi.**

Składniki: Aqua, Glycerin, Propanediol, Xanthan Gum, Inulin, Benzoic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Potassium Lactate, Lactic Acid

Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Limited,
Dansom Lane, Hull, East
Yorkshire, HU8 7DS, UK

Data opracowania instrukcji
używania: Rev 02 (08/2021)

EC REP RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
Wyrób medyczny certyfikowany za
zgodność z Dyrektywą 93/42/ EWG
przez SGS. Przed użyciem sprawdź
instrukcję używania.

DUREX i logo DUREX są znakami
towarowymi grupy Reckitt
Pusta butelkę lub przeterminowany
produkt wyrzucić do kosza.

www.durex.com

Infolinia: (22) 211 26 92



CE
1639



5 900627 069891 >

130 mm