

Gebrauchsanweisung!
Bitte aufmerksam lesen!



Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen

Anwendungsinformation

1.  **Oberkiefer-Prothese**
Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung). Danach das Polster 10 Sek. in hand-warmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.

1.  **Unterkiefer-Prothese**
Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.

2.  **Polster auf die befeuch-tete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben. Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt anliegt.**

2.  **Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.**

Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

Wichtige Hinweise

Aus hygienischen Gründen ist das **Protefix®** Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Die Anwendung von Haft-Polstern sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

Zusammensetzung

Natriumalginat (28 %),
Viskose-Faser, Polypropylenfaser

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

Protefix® Haft-Polster möglichst trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!



⚠ Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.).



Diese Gebrauchs-anweisung wurde zuletzt überarbeitet im 06/2019.


Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Deutschland
www.queisser.de



Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht für andere Zwecke an Dritte weitergegeben. Weitere umfangreiche Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in Verbindung mit diesem Beipackzettel finden Sie hier: <https://www.queisser.de/datenschutz/bpz>

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, E-Mail: info@queisser.de, www.queisser.de. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns herzlich!

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Apotheker | <input type="checkbox"/> Bekannte |
| <input type="checkbox"/> Zahnarzt | <input type="checkbox"/> Werbung |

Einige Anmerkungen zur Anwendung:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> das Polster hat die richtige Größe |
| <input type="checkbox"/> das Polster ist zu groß <input type="checkbox"/> zu klein |

Warum verwenden Sie **Protefix®** Haft-Polster?

- ☐ bei mir hält nichts anderes
☐ ich habe (ständig) Druckschmerzen
☐ ich habe eine Interimsprothese
☐ ich probiere **Protefix®** Haft-Polster gerade aus

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- ☐ Ja, und zwar _____
☐ nein

Ich bin _____ Jahre alt und
verwende **Protefix®** Haft-Polster seit _____ Jahren
für den ☐ Oberkiefer ☐ Unterkiefer.

Ihre persönlichen Daten

Name _____
Straße _____
PLZ, Ort _____
Telefon _____ E-Mail _____

☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen sowie für Zwecke der Kundenbefragung durch die Queisser Pharma GmbH & Co. KG verwendet werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Telefonnummer nutzen wir nur im Falle einer Reklamationsbearbeitung, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen unter: www.protefix.de



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

Dafür gibt es **Protefix®** Wund- und Schutzgel.

Das Medizinprodukt **Protefix®** Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnsparagen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem einzigartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnsparge oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.
- Ohne Alkohol.



Protefix® Wund- und Schutzgel
gibt es nur in der Apotheke unter
der PZN 02 651 753.