



med

Warzen-Pflaster

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Anwendung!

16 Warzen-Pflaster in zwei verschiedenen Größen

Das Doppelherz med Warzen-Pflaster ist ein Medizinprodukt zur Entfernung von Warzen. Durch die abdichtende Haftung und die enthaltene Salicylsäure werden bakterielle Infektionen vermieden und die Ausbreitung von Warzen auf andere Hautstellen oder die Übertragung auf andere Personen verhindert.

Das Doppelherz med Warzen-Pflaster ist wasserfest, dermatologisch getestet und der integrierte Applikator erleichtert das hygienische und gezielte Aufbringen des Pflasters. Das Doppelherz med Warzen-Pflaster ist ausschließlich zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Zusammensetzung:

Inhaltsstoff: Salicylsäure
Pflaster-Material: PE-EVA

Vorsichtsmaßnahmen

- Nur zur Behandlung von Warzen, ausschließlich zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden.
- Nicht auf geröteter, geschädigter oder rissiger Haut anwenden.
- Bei Auftreten einer überempfindlichen Reaktion oder einer Reizung ist die Behandlung sofort abzubrechen.
- Diabetiker, Personen mit Durchblutungsstörungen, schwangere und stillende Frauen sowie Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen. Sollten Sie sich unsicher sein, befragen Sie ebenfalls vorher Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Warzen-Pflaster enthält 35-40 % Salicylsäure.
- Nicht länger als 2 Wochen anwenden, ohne vorher Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt zu halten.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie wohnen, zu melden.

Wie wende ich Doppelherz med Warzen-Pflaster an?

- Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich Ihre Hände und stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Hautstelle sauber und trocken ist.
- Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie das Pflaster mithilfe des Applikators vorsichtig auf, sodass es gut auf dem zu behandelnden Bereich haftet. Drücken Sie das Pflaster sorgfältig an und entfernen Sie anschließend den Applikator.
- Führen Sie die Anwendung der Pflaster über mehrere Tage fort - wir empfehlen, das Pflaster alle 12 Stunden zu wechseln.

- Nach einigen Tagen können Sie die obersten aufgeweichten Hautschichten vorsichtig mit einem sauberen, nur von Ihnen verwendeten Schleifmaterial (z. B. Bimsstein oder Fußfeile) entfernen. Wiederholen Sie die Anwendung, bis die Warze vollständig verschwunden ist.

Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsbestandteile gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt:

Faltschachtel: Papier - PAP 21

Umverpackung des Pflasters: Verbundstoff – C/PAP 82

Trägerfolie: Kunststoff - PET 1



Eurosirel S.p.A.
Viale Europa, 30
20047 - Cusago
Mailand, Italien



0051



Queisser
PHARMA



GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND

doppelherz.de/kontakt



Stand der Information: Rev. 01 27/09/2021

	Hersteller		Vertriebs-partner
	Medizin-produkt		Gebrauchs-anweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen		Trocken aufbewahren
	Nicht wieder-verwenden		Verwendbar bis
	Chargen-bezeichnung		Katalog-nummer
	Eindeutige Produkt-identifizierung		



Queisser
PHARMA

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de