

Gebrauchsanweisung

EAN 4002448166092

Scholl Blasenpflaster

Wie & wann sollte ich sie anwenden? Reinigen und trocknen Sie den betroffenen Bereich. Trocknen Sie die Haut sorgfältig ab. Stellen Sie sicher, dass der betroffene Bereich frei von Creme- und Ölrückständen ist.

DE Wärmen Sie das Pflaster mit der Hand an, um die Anfangshaftung auf der Haut zu verbessern. Lassen Sie das Pflaster auf der Haut, bis es sich von selbst löst. Maximale Tragezeit pro Pflaster: 7 Tage. Entfernung des Pflasters: Heben Sie vorsichtig eine Kante des Pflasters an; rollen Sie das Pflaster vorsichtig von der Haut ab.

LARGE PLASTER



Gegenanzeigen

DE Nicht auf verletzter Haut, offenen oder infizierten Wunden verwenden.

Warnhinweise

DE Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Nur für den einmaligen Gebrauch. Brechen Sie die Anwendung ab und entfernen Sie das Pflaster, wenn sich Beschwerden oder Reizungen entwickeln. Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft.

Nicht verwenden, wenn Sie auf die Wundauflage oder ihre Bestandteile allergisch sind. Berührung mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine medizinische Fachkraft. Aufbewahrungshinweise befinden sich auf der Verpackung.

Scholl und Diabetes

DE Wenn Sie eine Blase haben, sollten Sie vor einer Selbstbehandlung immer eine medizinische Fachkraft aufsuchen, wenn Sie an Diabetes, schlechter Durchblutung oder Empfindungsstörungen in den Füßen leiden, da bei Ihnen ein Risiko für die Entwicklung eines Geschwürs bestehen könnte. Ihre medizinische Fachkraft kann Ihnen dieses Produkt empfehlen.