

# Gebrauchsanweisung

---

EAN 5038483255339

## Scholl Gel & Fingerschutz

- Ideal bei wunden Fingern, Zehen, Hühneraugen und Blasen
- Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- waschbar

## Gebrauchsanleitung

- Mit einer Schere auf die gewünschte Länge zuschneiden und über Finger oder Zehen ziehen
- Mindestens 3 - 4 Stunden pro Tag entfernen, damit die Haut atmen kann.

**Pflegehinweise:** Per Hand mit Waschmittel und lauwarmem Wasser waschen. Gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

## Warnhinweise

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Wenn Reizungen, Beschwerden oder andere Hautreaktionen auftreten, Behandlung abbrechen. Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden.

Bitte holen Sie vor der Anwendung Rat ein, wenn Sie an Diabetes leiden, da Ihre Fußbeschwerden möglicherweise eine Behandlung durch einen Arzt erfordern.