

Gebrauchsanweisung

SCHOLL Party Feet Ballenpolster

EAN: 4002448116288

PZN: 26193

Medizinprodukt

Scholl Ballenpolster sind ultradünne, weiche Geleinlagen, die den Fußballen den ganzen Tag schützen. Sie helfen brennenden Schmerz in Ihren Fußballen zu vermeiden.

- Mit GelActiv® Technologie
- Transparentes Gel in ultradünnem und unauffälligem Design
- Rutschfester Halt - haften sicher im Schuh
- Passen bequem in fast alle Damenschuhe

Anwendung:

- Symbole für den rechten und linken Fuß beachten.
- Schutzfolie entfernen und Einlage entsprechend Bild platzieren.

In Ihrem Schuh unter dem Fußballen platzieren:



- Zum Entfernen der Einlage die Sohle Ihres Schuhs nach unten drücken und die Einlage vorsichtig herausziehen.
- Die Einlagen nach 6 Monaten oder bei ersten Anzeichen von Abnutzung ersetzen.

Achtung: Bei Beschwerden oder Irritationen Produkt nichtweiterverwenden. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut verwenden.