

dm visiomax

D TAGES KONTAKTLINSEN

Gebrauchsanweisung

Wichtige Produktinformationen!

Bitte vor erstmaliger Anwendung sorgfältig lesen und für eventuell später auftretende Fragen aufbewahren.

Anwendungsgebiet

Tageskontaktlinse aus besonders weichem sauerstoffdurchlässigem Material mit Hyaluron-Matrix zur Korrektur von Kurzsichtigkeit. Für eine dauerhafte Feuchthaltung der Linsenoberfläche über den ganzen Tag. Mit integriertem UV-Schutz. Besonders geeignet in trockener Umgebung und bei trockenen Augen. Die Linse ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und täglich zu erneuern. Zum Tragestragen.

Inhalt

8 steril, weiche Tageskontaktlinsen mit 58 % Wasser, 42 % HEMA/MA-Copolymer und in der Linse eingebundenem Hyaluron (HA-Matrix). In einer phosphatpufferten Kochsalzlösung mit Hyaluron.

BC: 8,7 mm; DIA 14,2 mm

Allgemeine Hinweise

Falls Sie die Linsen zum ersten Mal tragen bzw. bevor Sie nach längerem Aussetzen wieder mit dem Kontaktlinsenstragen beginnen, lassen Sie Passform und Stärke von einem Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten überprüfen. Die Anweisungen auf der Verpackung als auch die Ihres Kontaktlinsenanpassers müssen befolgt werden. Überschreiten Sie nicht die vom Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen täglichen Tragezeiten. Lassen Sie Ihre Sehschärfe und Linsen zweimal jährlich von einem Augenarzt kontrollieren. Schlafen Sie nicht mit eingesetzten Linsen. Der UV-Schutz ersetzt keine Sonnenbrille.

Verwenden Sie die Linse nicht, wenn diese oder der Originalbehälter beschädigt, die Flüssigkeit nicht klar, nicht vorhanden oder das Verfallsdatum überschritten ist. Wenn der Blister versehentlich geöffnet wurde, ist die Linse nicht mehr steril und muss unverzüglich in Gebrauch genommen oder entsorgt werden.

Kontaktlinsen lichtgeschützt und bei Raumtemperatur aufbewahren.

Gegenanzeigen

Linsen nicht tragen bei Verletzungen, Infektionen und Entzündungen des Auges, veränderter Hornhautsensibilisierung, mangelndem Tränenfluss, Allgemeinerkrankungen, soweit diese mit geschwächter Abwehrtaetigkeit einhergehen. Bei Liddefekten und Hornhauterkrankung nur nach Absprache mit Ihrem Augenarzt verwenden.

Wechselwirkungen

Arzneimittel können eine Veränderung des Tränenfilms bewirken und die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen. Informieren Sie Ihren Augenarzt/Kontaktlinsenspezialisten über geänderte oder neue Anwendungen von Medikamenten. Prinzipiell dürfen medizinische Augentropfen nicht über die Kontaktlinsen

getropft werden. Für Ausnahmen fragen Sie Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen

Bei Veränderung des Tragekomforts, übermäßigen Tränenfluss, stärkeren Rötungen, Verschlechterung des Sehvermögens oder dem Auftreten von allergischen Reaktionen Kontaktlinsen herausnehmen und Augenarzt aufsuchen.

Vorbereitung

Vor dem Ansetzen der Linse Hände sorgfältig waschen und trocknen, damit keine Keime an die Linse gelangen. Alle Gegenstände, die mit der Linse in Berührung kommen, müssen keimfrei gehalten werden. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände und lange Fingernägel, da letztere Bakterien beheimaten und die Augen und die Kontaktlinsen schädigen könnten.

Linse aufsetzen

Nehmen Sie die Linse vorsichtig mit dem Finger aus dem Linsenbehälter, ohne sie über den Rand zu ziehen, und berühren Sie die Linse nicht mit den Fingernägeln. Die Linse kann dabei beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht umgestülpt ist, und setzen Sie die Linse auf Ihre Fingerspitze. Ziehen Sie das untere Lid nach unten und beugen Sie sich über einen Spiegel. Halten Sie beide Augen geöffnet. Ziehen Sie das Oberlid mit einem Finger der anderen Hand nach oben und schauen Sie dabei nach unten. Setzen Sie die Linse mit sanftem Druck auf die Hornhaut und lassen Sie die Lider langsam los. Verfahren Sie mit der anderen Linse ebenso.



Abbildungen 1 und 2:
Kontaktlinse umgestülpt und korrekt

Sehschärfe und Komfort

Sind Sehschärfe oder Tragekomfort schlecht, überprüfen Sie, ob die linke mit der rechten Linse vertauscht bzw. ob sie umgestülpt ist. Wenn sich ein Fremdkörper auf der Linsenoberfläche befindet (z.B. Wimper), spülen sie diesen mit Kochsalzlösung ab. Hält der schlechte Tragekomfort an, entfernen Sie die Linsen und konsultieren Sie Ihren Augenarzt bzw. Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Linse abnehmen

Ziehen Sie das untere Lid nach unten und schauen Sie nach oben. Schieben Sie die Linse vorsichtig auf das Weiße im Auge. Nehmen Sie die Linse vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger heraus.

Einmalprodukt

Die Linse ist zum einmaligen Gebrauch konzipiert worden und darf nicht gereinigt werden. Eine Reinigung und Desinfektion mit anschließendem Wiedergebrauch könnte sie schädigen und damit ihre Form und Funktion beeinträchtigen.

Warnhinweise

Kontaktlinse

- nicht verwenden, wenn sie beschädigt ist
- nicht verwenden, wenn sie bereits getragen wurde nur von einer Person nutzen
- nicht mit Chemikalien oder Wasser in Verbindung bringen

- weder mit Speichel noch mit unsterilem Wasser, etwa aus der Leitung, im Whirlpool, Schwimmbecken oder beim Wassersport usw., in Berührung bringen und nicht befeuchten (Risiko einer mikrobiellen Infektion!)
- nicht mit Haarspray, Kosmetika oder aerosolhaltigen Sprays in Kontakt bringen
- nach dem Auftragen von Make-up einsetzen und vor dem Abschminken absetzen
- unmittelbar nach Kontakt mit reizenden Dämpfen, z.B. chemischen oder gefährlichen Substanzen, oder Kontakt mit einer Umgebung mit Auswurf auf die Augen abnehmen
- nicht einfrieren lassen (Bruchgefahr nach Auftauen!)
- nicht kochen
- vor dem Schlafen herausnehmen, nicht während des Schlafes tragen
- außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Informieren Sie Ihren Arzt und Ihren Arbeitgeber, dass Sie Kontaktlinsen tragen. Wechseln Sie Kontaktlinsentyp, -parameter und -pflegesystem nicht ohne Rücksprache mit einem Kontaktlinsenspezialisten. Bei Augenreizungen Linsen aus den Augen nehmen und Augenarzt aufsuchen. Achten Sie beim Schwimmen darauf, eine wasserdichte Schwimmbrille zu tragen, um ein Verschmutzen der Kontaktlinsen zu vermeiden.

Reklamationen

Die Lotnummer auf dem Blister dient der zügigen Bearbeitung Ihres Anliegens.

Stand: 22.01.2020

eyelike GmbH, Ringstraße 12, DE-63543 Neuburg



Hinweise zur Etikettenbeschriftung

- BC = Krümmung in mm
- DIA = Durchmesser in mm
- PWR/DPT = Kontaktlinsenstärke in Dioptrien
- = verwendbar bis
- LOT = LOT-Nummer/Chargen-Nummer
- STERILE = Sterilisiert mittels Dampf
- = Gebrauchsanweisung beachten
- = Warnhinweise beachten
- = nur einmal verwenden
- = Hersteller
- = vor Sonneneinstrahlung schützen
- = nicht verwenden bei beschädigter Verpackung

CE DENNI KONTAKTKNİ ČOCKY

Návod k použití

Důležité informace k použití!

Před prvním použitím si je důkladně přečtěte a uschovejte pro případné pozdější nejasnosti.

Oblast použití

Denni kontaktní čočky z obzvláště měkkého, kyslík propustějšího materiálu s hyaluronovým matricem ke korekci krátkozrakosti. Pro trvalé udržení vlhkosti povrchu čočky po celý den. S integrovanou UV ochranou. Vhodné zejména v suchém prostředí a v případě suchých očí. Čočka je určena k jednorázovému použití a je nutné ji denně měnit. K dennímu nošení.

Obsah

8 sterilních, měkkých denních kontaktních čoček s 58 % vody, 42 % kopolymeru HEMA/MA a hyaluronem integrovaného v čočce (HA matrix). Ve fosfátovém pufovaném roztoku kuchyňské soli s hyaluronem.

BC: 8,7 mm; DIA 14,2 mm

Všeobecné pokyny

V případě, že si čočky nasazujete poprvé, resp. s nimi začnete znova po delší době, nechte si jeich tvar a sílu zkontrolovat očním lékařem nebo specialistou na kontaktní čočky. Je nutné dodržovat pokyny na balení i pokyny toho, kdo Vám čočky upravil. Nepřekračujte denní dobu nošení doporučenou specialistou na kontaktní čočky. Vše dioptrie a čočky si nechávejte dvakrát ročně zkontrolovat očním lékařem. Nespěte s nasazenými čočkami. UV ochrana nenahrazuje je sluneční brýle.

Pokud je originální obal poškozený, roztok není čirý nebo úplně chybí, nebo pokud je prošlá trvanlivostí, čočku nepoužívejte. Pokud byl blister nechtěně otevřen, čočka již není sterilní a je nutné ji buď ihned použít, nebo zlikvidovat.

Kontaktní čočky skladujte při pokojové teplotě chráněné před světlem.

Kontraindikace

Čočky nenoste v případě zranění, infekce a zánětu očí, změnéné senzibilizace rohovky, nedostatečné tvorby slz, všeobecných onemocnění, pokud způsobují oslabení imunitního systému. V případě vad více a nemocných rohovky čočky používejte pouze po domluvě s Vaším očním lékařem.

Interakce

Léčivé přípravky mohou způsobovat změny slzného povlaku a ovlivňovat tak snášenlivost očních čoček. O změnách nebo používání nových léků informujte svého lékaře/specialistu na oční čočky. Léčivé oční kapky nelze obecně kapat na kontaktní čočky. Vyjmijte zkonzultujte se svým lékařem.

Vedlejší účinky

Při změnách pohodlí při nošení, nadměrném slznění, silnějším zčervenání, zhoršení vidění nebo výskytu alergických reakcí čočky vyndejte a vyhledejte očního lékaře.

Příprava

Před uchopením čočky si důkladně umyjte a osušte ruce, aby se na čočku nedostaly žádné choroboplodné

